


# Neotech RAM Cannula®

Cánula de Oxígeno Nasal

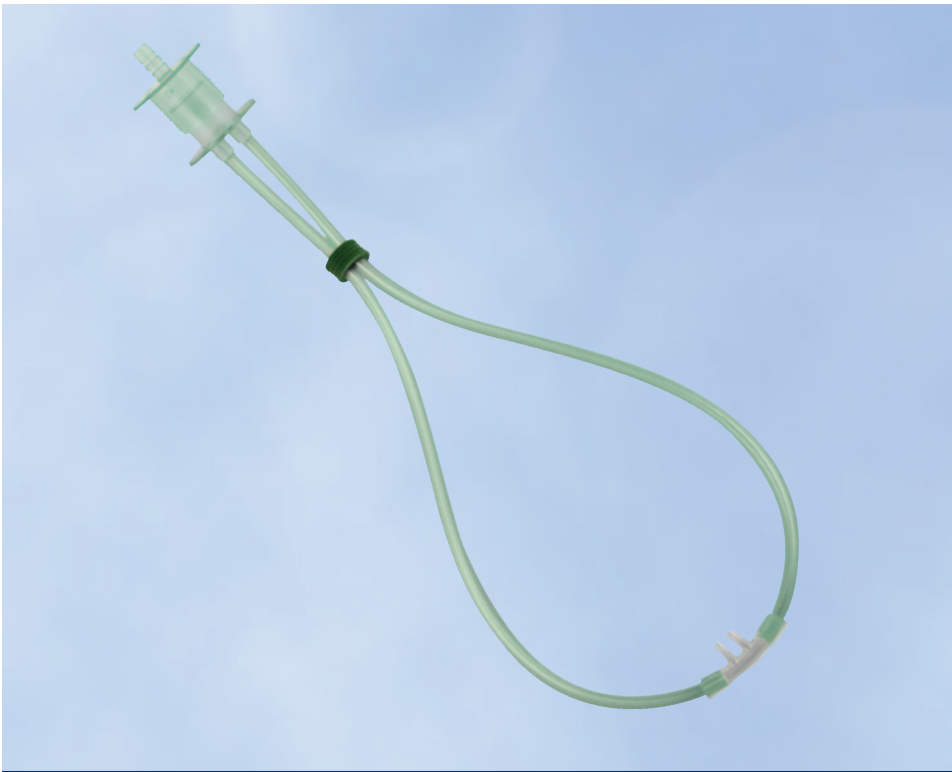

Cómodo para el paciente

Tamaños codificados por colores

Adaptador del tubo de oxígeno

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Puede utilizarse con flujos de oxígeno bajos o elevados
- Puede utilizarse con o sin humedad
- Gafas curvas y suaves
- Tamaños codificados por colores
- Incluye adaptador para el tubo de oxígeno de 15 mm
- No se fabrica con látex de goma natural ni con plastificante DEHP
- Se empaqueta individualmente

Cat No.	Tamaño	Cant/Unidad
N4900	Prematuro Micro	10/caja
N4901	Prematuro	10/caja
N4902	Recién Nacido	10/caja
N4903	Infante	10/caja
N4904	Pequeño	10/caja
N4905	Medio	10/caja
N4906	Grande	10/caja
N4820	Adaptador del Tubo de Oxígeno	50/caja



#8,353,296; #D681,193; #9,027,562;  
Additional Patents Pending

# Neotech RAM Cannula®

## Cánula de Oxígeno Nasal

### INDICACIONES DE USO

Neotech RAM Cannula se ha diseñado para administrar oxígeno a través de las narinas a los pacientes pediátricos (recién nacidos, bebés y niños).

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Paso 1

Seleccione una cánula con el tamaño que mejor se adapte al paciente. El tamaño ideal de las gafas cubrirá el 60-80 % de las narinas.

Nota: Asegúrese de que las gafas no cubran por completo las narinas.

#### Paso 2

Conecte el adaptador del tubo de oxígeno de 15 mm (suministrado) a la cánula RAM. Conecte la cánula a la fuente de oxígeno.

Nota: Asegúrese de que todas las conexiones de la cánula estén bien aseguradas.

#### Paso 3

Inicie el flujo de gas.

#### Paso 4

Inserte las gafas en las narinas del paciente.

Nota: Deje un pequeño espacio entre el tabique del paciente y la base de las gafas.

#### Paso 5

Asegure la cánula a la cara con el tubo EZ-Hold® y el soporte de la cánula, o bien con un producto similar.

#### Paso 6

Sustituya el dispositivo Neotech RAM Cannula cada 14 días o según el protocolo del hospital, lo que ocurra antes.

### CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Neotech RAM Cannula está contraindicado para pacientes con atresia nasal o con deformidades de las estructuras faciales que impidan el uso de soportes respiratorios adecuados.

Las leyes federales de Estados Unidos permiten la venta de este dispositivo exclusivamente a médicos o bajo prescripción facultativa.

La selección incorrecta del tamaño, la colocación incorrecta o el uso incorrecto pueden dar lugar a traumatismos del tabique o necrosis.

Inicie siempre el flujo de gas antes de insertar las gafas en las narinas del paciente.

Puede que sea necesaria la frecuente observación de la posición de las gafas en las narinas del paciente.

Los tubos de la cánula pueden suponer un posible riesgo de estrangulación.

No utilice el dispositivo si el paquete está dañado o abierto.

No debe humedecerse, lavarse ni esterilizarse.

Su uso debe interrumpirse de inmediato si se produce irritación cutánea.

Uso para un solo paciente.



Para información o muestras GRATIS

**1-800-966-0500** or visit [neotechproducts.com](http://neotechproducts.com)

Neotech Products, Inc. • 28430 Witherspoon Pkwy • Valencia, CA 91355, USA