


Radiolucent NeoLead[®]

ELECTRODOS ECG

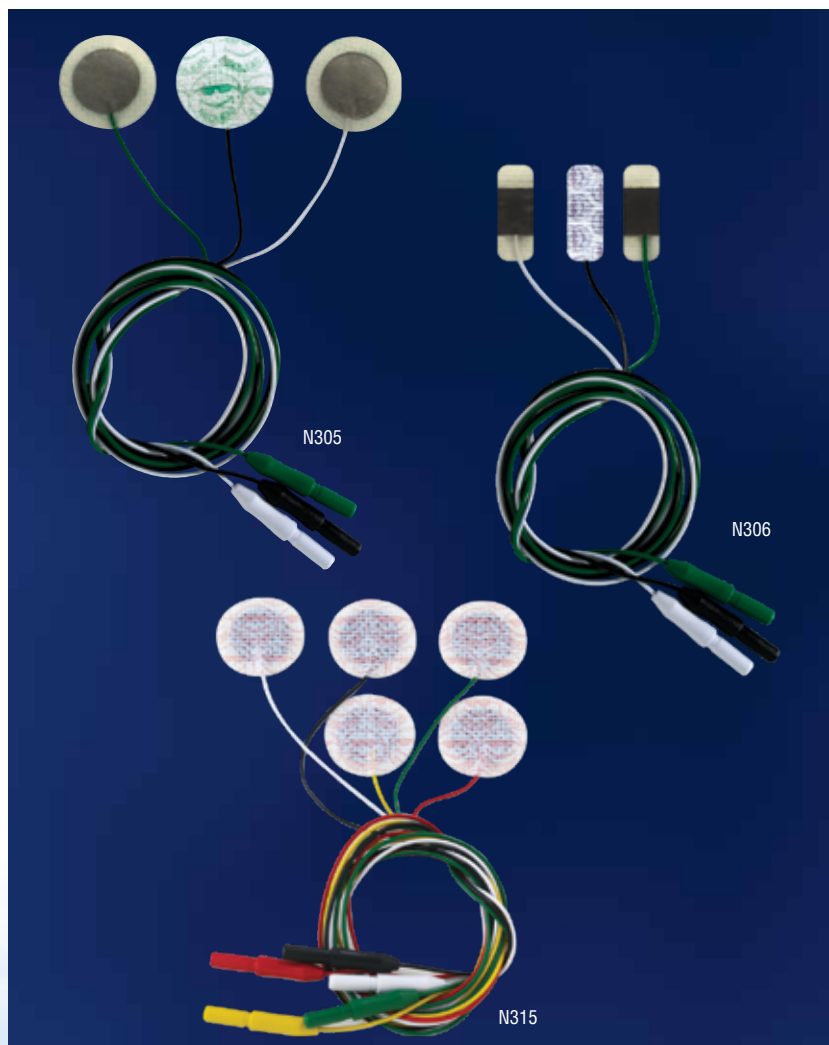

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Los electrodos precableados son casi invisibles en las radiografías
- Centro de hidrogel
- Los bordes hidrocoloides NeoBond[®] están diseñados para:
 - Prevenir que el hidrogel supure o se seque prematuramente
 - Proveer la estabilidad de los sensores para un mejor trazado
 - Minimizar el deslizamiento
- Cables de colores para una fácil identificación
- Conjunto N305 de tres derivaciones
- Conjunto N315 de cinco derivaciones para dos canales continuos de monitoreo
- No fabricado con látex de caucho natural o plastificados DEHP
- Conjuntos de derivaciones empacados individualmente

Micro NeoLead[®]

- Los electrodos precableados son casi invisibles en los rayos x
- Centro de hidrogel
- Las puntas hidrocoloides NeoBond[®] están diseñadas para:
 - Proveer la estabilidad de los sensores para un mejor trazado
 - Minimizar el deslizamiento
- Reducir la necesidad de una banda o cinta
- Cables de colores para una fácil identificación
- No fabricado con látex de caucho natural o plastificados DEHP
- Paquetes individuales de 3 conjuntos

Número	Artículo	Tamaño	Cant. /Unidad
N305	Radiolucent	1" Circulo	20 sets/caja
N306	Micro	1" x 3/8"	20 sets/caja
N315	Pediatrico	1" Circulo	20 sets/caja

Patentes #6,795,722; #8,798,709



Radiolucent NeoLead®

ELECTRODOS ECG

INDICACIONES DE USO

Los electrodos Radiolucent NeoLead y Micro NeoLead ECG están diseñados para monitoreo de ECG. Están diseñados para uso en pacientes pediátricos (nenonatos, bebés y niños).

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación

Limpie y seque la piel según el protocolo del hospital.

Nota: Es importante que la piel esté lo más seca y limpia posible. Los electrodos no se adhieren correctamente a la piel húmeda o al cabello. Las lociones y aceites también pueden afectar negativamente la adhesión.

NO USE ALCOHOL.



Aplicación

- 1 Antes de remover el revestimiento, caliente la derivación en las manos por 60 segundos. También puede sostenerse bajo un calentador radiante o calentador de talones por 10 o 15 segundos.
- 2 Retire y deseche el revestimiento.
- 3 Aplique la derivación a la piel y mantenga en su lugar por 60 segundos para asegurar que se adhiera correctamente.



Extracción

- 1 Sature la derivación con agua o solución salina.
- 2 Lentamente retire la derivación de la piel mientras limpia con un algodón con agua o solución salina.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Las leyes federales de Estados Unidos permiten la venta de este dispositivo exclusivamente a médicos o bajo prescripción facultativa.

Los electrodos Radiolucent NeoLead y Micro NeoLead ECG deben aplicarse únicamente mientras el paciente está en supervisión directa y continua por profesionales de la salud.

Los electrodos no se adhieren correctamente a la piel húmeda o al cabello. Las lociones y aceites también pueden afectar negativamente la adhesión.

No use alcohol para limpiar la piel antes de la aplicación.

No use los electrodos Radiolucent NeoLead (N305, N306, N315) durante sesiones de RM.

Su uso debe interrumpirse de inmediato si se produce irritación cutánea.

Desechable. No lo reutilice.

Uso para un solo paciente.



Para información o muestras GRATIS

1-800-966-0500 • [neotechproducts.com](https://www.neotechproducts.com)

Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355



Hecho en EEUU