


# NeoBar<sup>®</sup>

## SUPPORT POUR SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHÉALE

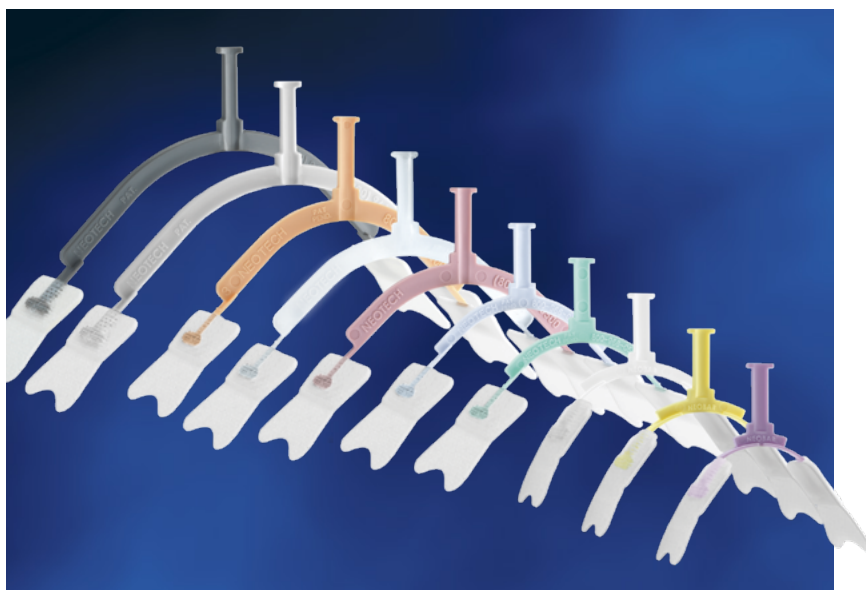

### FONCTIONS ET AVANTAGES

- Languettes hydrocolloïdes hypoallergéniques NeoBond<sup>®</sup>
- Grandes tailles disponibles avec des adhésifs acryliques de qualité médicale
- Conçu pour réduire le nombre d'extubations, éviter les traumatismes du palais et améliorer l'hygiène buccale
- Code de couleur selon les tailles
- Ne contient ni latex de caoutchouc naturel ni plastifiant DEHP
- Emballé individuellement

Catalogue	Taille	Couleur	Quantité/Unité
N709	Mini	Violet	5/boîte
N710	Ultra	Jaune	5/boîte
N711	Micro	Blanc	5/boîte
N712	Petit	Verte	5/boîte
N713	Grande	Bleu	5/boîte
N714	XL	Rose	5/boîte
N715H	Macro	Dégager	5/boîte
N716H	Géant	Gris	5/boîte
<b>Avec adhésif acrylique de qualité médicale</b>			
N715F	Macro	Pêche	5/boîte
N716F	Géant	Carbone	5/boîte
<b>Assorti</b>			

N718 Transport (1 each N709, N710, N711, N712, N713, N714)

Brevet  
#D434,496; #6,050,263

### INDICATIONS D'UTILISATION

NeoBar est indiqué pour fixer une sonde endotrachéale. Elle est conçue pour une utilisation chez les patients en pédiatrie (nouveau-nés, nourrissons et enfants).

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

#### Préparation

- 1 Après avoir intubé le patient, utilisez le ruban de mesure NeoBar fourni pour sélectionner la taille de NeoBar à utiliser.

Placez la bande de milieu dans le septum nasal et recouvrez l'oreille. La couleur au niveau de l'ouverture du conduit auditif indique la bonne taille du NeoBar.

*Remarque : en cas de doute entre deux tailles, essayez d'abord le dispositif de taille plus petite.*

- 2 Pour assurer un bon ajustement, placez NeoBar au centre de la bouche, entre les lèvres supérieure et inférieure. NeoBar ne doit pas entrer en contact avec les lèvres. Les languettes hydrocolloïdes doivent être juste devant l'oreille.
- 3 Nettoyez et séchez la peau au niveau des joues conformément au protocole hospitalier.

*Remarque : Il est important que la peau soit aussi propre et sèche que possible. Les languettes adhésives hydrocolloïdes adhèrent moins bien à une peau moite ou aux poils. Les huiles et les lotions nuisent à la bonne adhérence.*

N'UTILISEZ PAS D'ALCOOL.

#### Application

- 1 Avant de retirer les films protecteurs en plastique, les languettes adhésives hydrocolloïdes doivent être bien réchauffées. Les techniques de réchauffement comprennent : les tenir entre les paumes des mains pendant au moins 60 secondes, les tenir près d'un chauffage rayonnant pendant 10 à 15 secondes, ou les tenir contre un chauffe-talon pendant 10 à 15 secondes.
- 2 Retirez les films protecteurs et jetez-les. Appliquez les languettes adhésives hydrocolloïdes devant l'oreille au niveau de l'os et maintenez-les en place pendant 60 secondes pour assurer une adhérence appropriée.  
*Remarque : assurez-vous que la sonde d'intubation endotrachéale est située en dessous du support pour réduire la pression sur le palais ou les gencives.*
- 3 Enroulez d'abord du ruban adhésif blanc ou un sparadrap de 12,5 mm (1/2 po) autour du support NeoBar, puis autour du support et de la sonde.

#### Retrait

- 1 Remplacez NeoBar tous les cinq jours ou à la fréquence indiquée par le protocole hospitalier, selon la première éventualité.
- 2 Déroulez le ruban adhésif pour séparer la sonde endotrachéale du support NeoBar.
- 3 Saturiez les languettes d'eau ou de solution saline.
- 4 Décollez soigneusement les languettes adhésives hydrocolloïdes de la peau pendant que vous tamponnez la peau avec de l'eau ou du sérum physiologique.

### CONTRAINDICATIONS, CAUTIONS & WARNINGS

Le NeoBar est contre-indiqué pour les patients atteints d'infections cutanées ou d'écorchures pouvant empêcher le placement correct des languettes.

Ce dispositif n'est pas préconisé chez l'adulte.

Les lois fédérales des États-Unis imposent que ce produit soit uniquement vendu par un médecin ou sur ordonnance de celui-ci.

Le NeoBar ne peut être utilisé que lorsque le patient est sous la surveillance continue et directe de professionnels médicaux formés.

Cessez l'utilisation immédiatement si une irritation cutanée se produit.

Ne mettez pas le NeoBar en contact avec les lèvres.

Les languettes adhésives hydrocolloïdes adhèrent moins bien à une peau moite ou aux poils. Les huiles et les lotions nuisent à la bonne adhérence.

N'utilisez pas d'alcool pour nettoyer la peau avant application.

À usage unique.