

# NeoShades® com Banda para a Cabeça

PARA OS OLHOS EM SESSÕES DE FOTOTERAPIA



## — CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS —

- Material de proteção ocular macio e acolchoado com um design bonito de óculos de sol
- Bolsos oculares criados para o conforto e segurança do paciente
- Tira de cabeça NeoFoam® patentada e macia que mantém o NeoShades no lugar
- Tira de cabeça ajustável criada para minimizar deslizamentos e ajudar a reduzir a moldagem da cabeça
- Formato de cinta de cabeça exclusivo criado para garantir um ajuste ideal
- Não fabricado com látex de borracha natural ou plastificante DEHP
- Embalado individualmente

Cat. #	Item	Unidade de quantidade
N727	Micro	50/caixa
N728	Small	50/caixa
N729	Large	50/caixa

Patente dos EUA #8,070,288;  
Patentes adicionais pendentes



# NeoShades® com Banda para a Cabeça

## PARA OS OLHOS EM SESSÕES DE FOTOTERAPIA

### INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Os NeoShades são indicados para usar como proteção para os olhos durante as sessões de fototerapia. Concebidos para utilização em pacientes pediátricos (recém-nascidos, bebês e crianças).

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

#### 1 Selecione o tamanho certo.

Tamanho aproximado:  
Micro – 28 semanas e menos  
Pequeno – 29-36 semanas  
Grande – 37 semanas e mais


#### 2 Posicione a banda por trás da cabeça com a face lisa com espuma contra a cabeça.

#### 3 Cubra os olhos com os NeoShades.

#### 4 Prenda suavemente o tecido da presilha na extremidade da banda para a cabeça aos NeoShades.

Repita no lado oposto.

*Nota: As bandas podem ser cortadas para um ajuste adequado.*

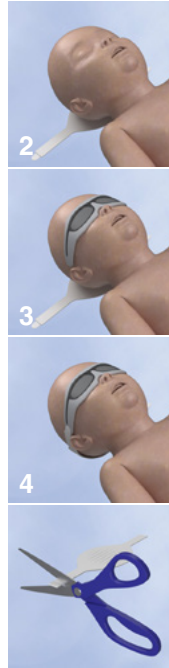

### PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Os NeoShades não se destinam a ser usados em adultos.

Segundo a legislação em vigor, a venda deste dispositivo está sujeita a receita ou indicação médica.

Os NeoShades só devem ser usados em pacientes sob supervisão contínua e direta de profissionais de saúde.

Utilizar apenas num único paciente.

Aplicam-se práticas gerais de transporte e armazenamento.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2023 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT, Arnhem  
The Netherlands



PPE Regulation (EU) 2016/425  
Notified Body: BSI Group (2797),  
Say Building, John M. Keynesplein 9  
1066 EP Amsterdam, Netherlands

M693 Rev C