


Neotech RAM Cannula[®]

KYSLÍKOVÉ BRÝLE

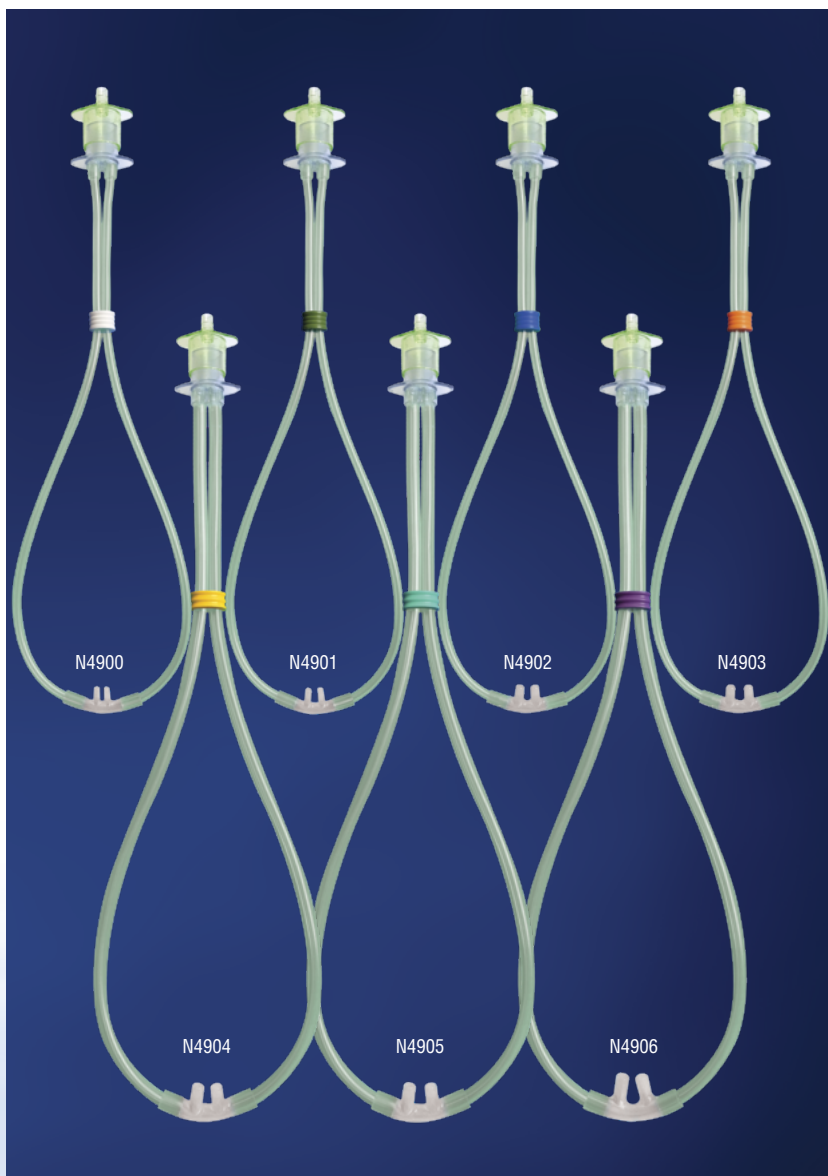

VLASTNOSTI A VÝHODY

- K použití se zkapalněným kyslíkem o nízkém/ vysokém průtoku.
- Měkké, zakřivené výstupy
- Barevně odlišené velikosti
- Včetně 15mm adaptéru na kyslíkovou hadičku
- Není vyrobeno z přírodního latexu ani změkčovadla DEHP
- Baleno jednotlivě

Katalog #	Položka	Množství/Jednotka
N4900	Bílý	10/krabice
N4901	Zelená	10/krabice
N4902	Modrý	10/krabice
N4903	Oranžový	10/krabice
N4904	Žlutá	10/krabice
N4905	Teal	10/krabice
N4906	Nachový	10/krabice
N4820	Adaptér na kyslíkové hadičky	50/krabice



U.S. Patent #8,353,296; #D681,193; #9,027,562; #9,808,593; #9,861,777; Další zahraniční patenty čekají na schválení

Neotech RAM Cannula®

KYSLÍKOVÉ BRÝLE

INDIKACE PRO POUŽITÍ

Kanyla Neotech RAM je určena k použití u předčasně narozených novorozenců, kojenců a pediatrických pacientů, kteří potřebují doplňkový kyslík, respirační podporu nebo pomoc při dýchání v ambulantním, nemocničním nebo institucionálním prostředí. Používá se k zajištění kyslíku následujícími způsoby:

1. Zahřátý nebo nezahřátý, zkapalněný kyslík o nízkém průtoku.
2. Zahřátý, zkapalněný kyslík o vysokém průtoku.

NÁVOD K POUŽITÍ

- 1 Pomocí průvodce velikosti RAM, který je součástí balíčku, vyberte vhodnou velikost kanyly. Při ideální velikosti výstupů je zaplněno 80 % nosních dírek. Zajistěte, aby výstupy nezaplnily úplně nosní dírky.
- 2 Připojte 15mm adaptér pro kyslíkovou hadičku (přiložen) ke kanyle RAM. Připojte kanylu ke zdroji kyslíku. Přesvědčte se, že připojení kanyly jsou řádně zajištěna.
- 3 Než zařízení přiložíte na pacienta, otevřete a otestujte úroveň proudění kyslíku.
- 4 Výstupy zasuňte do pacientových nosních dírek a mezi přepážkou a výstupy ponechte malou mezeru.
- 5 Brýle na tváři zajistěte pomocí hadičky EZ-Hold® a držákem kanyly nebo srovnatelným výrobkem.
- 6 Kyslíkové brýle Neotech RAM vyměňujte každých 14 dní nebo podle zavedených postupů nemocnice podle toho, co nastane dříve. Zlikvidujte použitou RAM kanylu podle nemocničního protokolu.

KONTRAINDIKACE, UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Kyslíkové brýle Neotech RAM jsou kontraindikovány u pacientů s nosní neprůchodností nebo u pacientů s deformacemi obličejové struktury, které brání vhodné podpoře dýchání.

Podle federálního zákona USA smí být tento přístroj prodáván výlučně lékařem nebo na jeho pokyn.

Toto zařízení by mělo být používáno jen tehdy, je-li pacient pod nepřetržitým přímým dohledem zdravotnického odborníka a je nutné časté sledování polohy výstupů v pacientových nosních dírkách.

Nevhodná volba velikosti, nesprávné umístění nebo nesprávné použití mohou způsobit poranění nebo nekrózu přepážky.

Trubičky kanyly mohou představovat potenciální nebezpečí uškrcení. K zajištění zařízení na pacienta nepoužívejte těsnící kroužky.

Než vložíte výstupy do nosních dírek, vždy zapněte průtok plynu.

Nepoužívejte, pokud je balení poškozeno nebo otevřeno.

Nenamáčejte, neumývejte ani nesterilizujte.

Opětovné použití tohoto zařízení by mohlo způsobit křížovou kontaminaci.

Pokud dojde k podráždění kůže, okamžitě je přestaňte používat.

Pouze pro jednoho pacienta.

Průtokový odpor

N4900, N4901, N4902, N4903

0.446 cmH₂O / L / min @ 2.5 LPM

N4904, N4905, N4906

0.230 cmH₂O / L / min @ 15 LPM



2797

Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2023 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.

EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem
The Netherlands



M713 Rev C