


NeoBridge[®]

PLASTER DO CEWNIKA PĘPOWINOWEGO

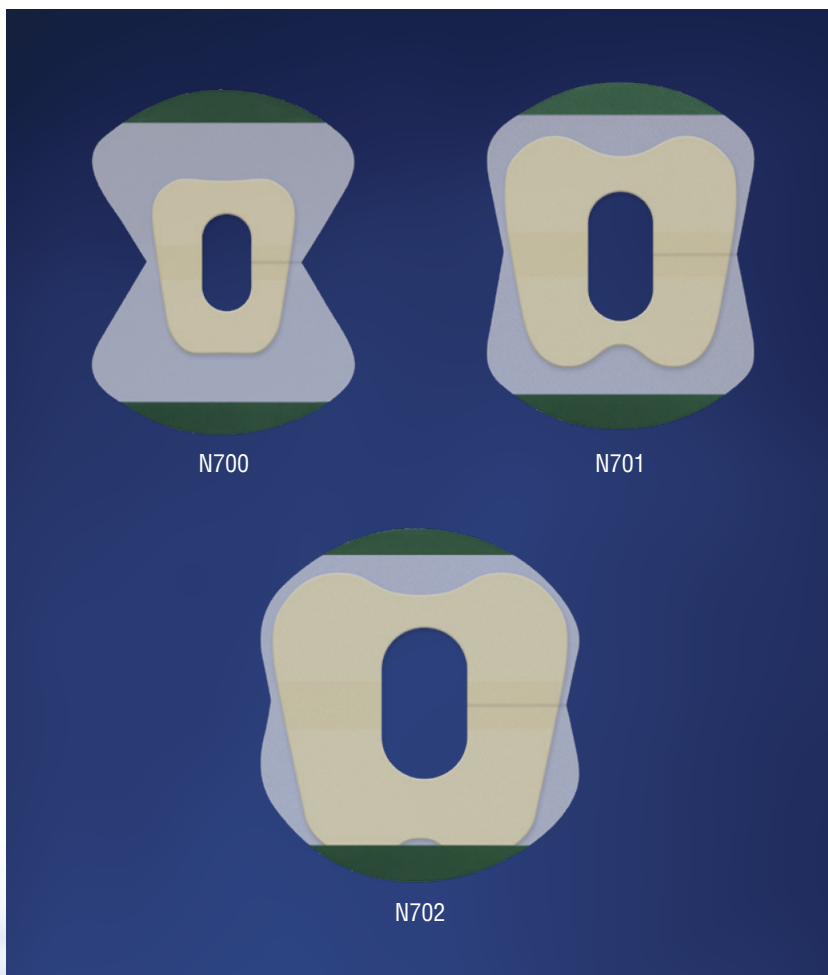

CECHY PRODUKTU

- Hydrokoloidowa warstwa NeoBond[®] nieszkodliwa dla skóry
- Skrzydełka zapewniające lepsze zamocowanie, zmniejszające napięcie przewodów i zapobiegające przesunięciu
- Produkt przystosowany do wielokrotnego otwierania i zamykania
- Przezroczyste skrzydełka zapewniające lepszą widoczność
- Produkt wykonany bez użycia kauczuku naturalnego ani zmiękczacza DEHP
- Pakowanie indywidualne

Katalog	Rozmiar	Okolo. waga	Ilość/jednostka
N700	Mikro	800 or less	20/skrzynka
N701	Mały	800-1200 gm	20/skrzynka
N702	Wielki	1200-2200 gm	20/skrzynka

Patent USA #5,370,627



NeoBridge®

PLASTER DO CEWNIKA PĘPOWINOWEGO

ZASTOSOWANIE

Plaster NeoBridge służy do mocowania i podtrzymywania cewników pępowinowych. Produkt przeznaczony do użytku na oddziałach pediatrycznych (noworodki, niemowlęta i dzieci starsze).

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Przygotowanie

Po założeniu cewnika oczyścić i osuszyć skórę zgodnie z procedurami szpitalnymi.

Uwaga: Należy jak najdokładniej oczyścić i osuszyć skórę. Na wilgotnej lub owłosionej skórze plaster NeoBridge nie zostanie prawidłowo zamocowany. Oleje i płyny kosmetyczne również utrudniają prawidłowe mocowanie produktu.

NIE WOLNO UŻYWAĆ ALKOHOLU.

Zakładanie

- 1 Klej hydrokolooidowy musi być aktywnie ogrzewany przed usunięciem plastikowej osłonki. Techniki rozgrzewania obejmują: trzymanie między dłońmi przez co najmniej 60 sekund, trzymanie w pobliżu ogrzewacza promiennikowego przez 10-15 sekund lub trzymanie przy chemicznym ogrzewaczu pięt przez 10-15 sekund.
- 2 Usunąć białą papierową warstwę ochronną, a następnie usunąć przezroczystą plastikową folię z przylepnej warstwy hydrokolooidowej.
- 3 Przełożyć cewnik przez środek uchwytu NeoBridge, ustawiając go tak, aby otwór znajdował się z prawej strony, a szerszy koniec bazy hydrokolooidowej był skierowany w stronę głowy pacjenta.
- 4 Umieścić przylepną warstwę plastra na skórze i przytrzymać przez 60 sekund, aby umożliwić prawidłowe przymocowanie.
- 5 Usunąć matową osłonę z górnego skrzydełka. Podnieść je i przytwierdzić do niego cewnik, tworząc łuk lub kształt litery U, aby zminimalizować napięcie powodowane przez cewnik z boku skrzydełka.

Uwaga: Nie przytwierdzaj cewnika do zielonego obszaru skrzydełka. Jeśli używasz dwóch cewników, każdy z nich powinien znajdować się po innej stronie skrzydełka.

- 6 Usunąć osłonę z dolnego skrzydełka. Podnieść je i przyłożyć zielony obszar dolnej części do zielonego obszaru górnej części, a następnie mocno dociśnij, umieszczając cewnik pomiędzy skrzydełkami.
- 7 Rozdzielić skrzydełka, aby usunąć lub przesunąć cewniki zgodnie z wymaganiami, a następnie zamknij skrzydełka.

Usuwanie

- 1 Wymieniaj plaster NeoBridge na nowy co 5 dni lub częściej, zależnie od procedur szpitalnych.
- 2 Rozdzielić skrzydełka, aby wyjąć cewniki.
- 3 Nasącz plaster NeoBridge wodą lub solą fizjologiczną.
- 4 Powoli oderwij NeoBridge od skóry, jednocześnie przecierając skórę wodą lub solą fizjologiczną.

PRZESTROGI I OSTRZEŻENIAW

Przepisy federalne zezwalają na sprzedaż tego produktu wyłącznie przez lekarzy lub na ich zlecenie.

Plaster NeoBridge powinien być używany wyłącznie w przypadku pacjentów pozostających pod stałym nadzorem przeszkolonego personelu medycznego.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy zrezygnować z używania produktu.

Na wilgotnej lub owłosionej skórze plaster NeoBridge nie zostanie prawidłowo zamocowany. Oleje i płyny kosmetyczne również utrudniają prawidłowe mocowanie produktu.

Nie wolno czyścić skóry alkoholem przed przymocowaniem produktu.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla pojedynczego pacjenta.

