

# NeoShades<sup>®</sup> med Hovedrem

## ØJENSKJOLD TIL FOTOTERAPI



### FUNKTIONER OG FORDELE

- Bløde og polstrede øjenafskærmninger med sødt solbrilledesign
- Øjenlommer designet til patientkomfort og sikkerhed
- Blød, patenteret NeoFoam<sup>®</sup> hovedrem holder NeoShades på plads
- Justerbar hovedrem konstrueret til at minimere, at den glider ud af plads, og den hjælper med at reducere deformering af hovedfacon
- Unik form af hovedrem designet til at sikre ideel pasform
- Ikke fremstillet med naturgummilatex eller blødgøringsmidlet DEHP
- Individuelt emballeret

Antal	Punkt	Antal/Enhed
N727	Mikro	50/boks
N728	Lille	50/boks
N729	Stor	50/boks

Amerikansk patent nr. 8.070.288;  
Yderligere patenter under behandling



Fremstillet i USA

# NeoShades® med Hovedrem

## ØJENSKJOLD TIL FOTOTERAPI

### INDIKATIONER FOR BRUG

NeoShades er indiceret til brug som øjenbeskyttelse under fototerapisesioner. De er beregnet til brug på pædiatriske (nyfødte, spædbørn og børn) patienter.

### BRUGSANVISNING

#### 1 Vælg den rigtige størrelse.

Omtrentlig størrelse:

Mikro – 28 uger og derunder

Lille – 29-36 uger

Stor – 37 uger og opefter


#### 2 Placer hovedremmen bag hovedet med skummets glatte side ind mod hovedet.

#### 3 Dæk øjnene med NeoShades.

#### 4 Fastgør forsigtigt krogstoffet på enden af NeoShades-hovedremmen.

Gentag på modsatte side.

*Bemærk: Remmen kan klippes til for korrekt pasf.*

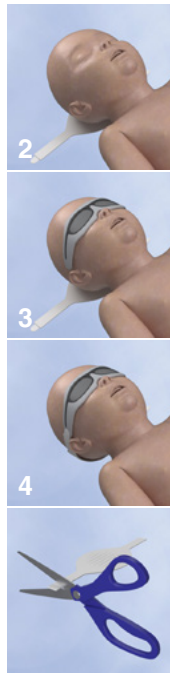

### FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER

NeoShades er ikke beregnet til brug på voksne.

Føderal lovgivning begrænser denne enhed til salg af eller efter ordre fra en læge.

NeoShades bør kun anvendes, mens patienten er under konstant direkte opsyn af sundhedspersonale.

Kun til brug for en enkelt patient.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT, Arnhem  
The Netherlands

CE PPE Regulation (EU) 2016/425  
Notified Body: BSI Group (2797),  
Say Building, John M. Keynesplein 9  
1066 EP Amsterdam, Netherlands