


NeoGlo[®] TRANSILUMINADOR



Available Colors

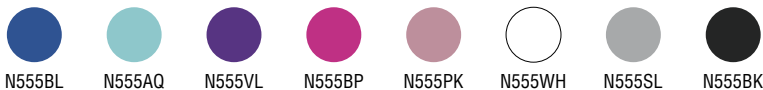

N555BL N555AQ N555VL N555BP N555PK N555WH N555SL N555BK



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Las luces LED se enfrían al tacto para mayor seguridad del paciente
- Múltiples ajustes de luz según preferencia del usuario:
 - Luces blancas hacia adelante
 - Luces blancas hacia arriba
 - Luces rojas hacia arriba
 - Luces blancas y rojas hacia arriba
- Diseño ergonómico para comodidad del médico clínico
- Tamaño compacto para uso en incubadora
- Ilumina venas, arterias y otras estructuras internas
- Diseñado para apagarse antes de que las luces se vuelvan ineficientes
- Requiere una sola pila alcalina AA (incluida)
- Cinco colores para elegir
- Aro de cordón
- Precio asequible
- No fabricado con látex de caucho natural o plastificados DEHP

NeoGlo Sleeve

- Ayuda a controlar e inhibir el crecimiento de bacterias
- Duradera y desechable
- Solapa autoadhesiva
- No fabricado con látex de caucho natural o plastificados DEHP

Número	Color	Cant. /Unidad
N555BL	Azul	1/caja
N555AQ	Aguamarina	1/caja
N555VL	Violeta	1/caja
N555BP	Rosa Brillante	1/caja
N555PK	Rosa	1/ caja
N555WH	Blanco	1/ caja
N555SL	Plata	1/ caja
N555BK	Negro	1/ caja
N55100	Manga	100/ caja*

*Manga NeoGlo: compra mínima de 10 cajas.

Patente Pendiente



Hecho en EEUU

INDICACIONES DE USO

El transiluminador NeoGlo es un dispositivo manual alimentado por pilas que funciona como fuente de luz destinada a transmitir luz a través de tejidos para ayudar a examinar a los pacientes.

La funda NeoGlo está diseñada para su uso como cubierta protectora temporal que ayuda a mantener limpio el transiluminador NeoGlo.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1 Retire la tapa de la pila, coloque la pila alcalina AA (incluida) y vuelva a colocar la tapa.

Nota: Se recorrerá el ciclo de ajustes de luz una vez y luego se volverá a la configuración desactivada.

Cuidado: No mire directamente a las luces. Si coloca la pila en la dirección incorrecta, puede producirse calor y dañar la unidad.

- 2 • Seleccione el ajuste de luz deseado: ☺
• Presione el botón de encendido una vez para las luces blancas hacia adelante.
• Presione de nuevo para las luces blancas hacia arriba.
• Presione de nuevo para las luces rojas hacia arriba.
• Presione de nuevo para las luces blancas y rojas hacia arriba.
• Presione de nuevo para apagar.
• Repita el ciclo según sea necesario.

- 3 Con el ajuste de luz preferido activado, mantenga NeoGlo en la piel del paciente para iluminar.

Nota: Luces de habitación tenues para una iluminación más eficaz.

- 4 Limpie NeoGlo con alcohol, limpie después de cada uso.

Garantía de satisfacción de 30 días

Si no está satisfecho con el rendimiento de su NeoGlo por alguna razón, simplemente devuélvalo dentro de los 30 días posteriores a la compra. Envíe su NeoGlo en su embalaje original junto con un comprobante de compra y Neotech le reembolsará el precio de compra completo, menos el coste del envío. Se le devolverá el coste del envío solamente si el producto es defectuoso.

El cliente es responsable del envío de devolución. No

aceptamos devoluciones por ningún motivo después de 30 días. Si su unidad no funciona correctamente después de 30 días, consulte la GARANTÍA.

Los transiluminadores NeoGlo comprados a través de un vendedor externo están sujetos a su política de devolución.

Garantía

Garantía de un año de rendimiento electrónico basado en el uso y almacenamiento normal previsto (-40 °C/-40 °F a +85 °C/185 °F, humedad relativa entre 5 % y 95 %, sin condensación).

Exclusiones; la garantía no cubre:

- a) Sustitución de la pila
- b) Daños o fallos causados por baterías recargables, fugas de pilas, herrumbre, corrosión, agua y otros daños líquidos, plagas, negligencia, abuso o mal uso
- c) No seguir los procedimientos de operativos recomendados por el fabricante

Se debe devolver NeoGlo en su embalaje original junto con el comprobante de compra. Si devuelve el producto sin el embalaje original, puede anularse la garantía.

Cumple con RoHS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No encienda la luz directamente en los ojos.

No sumerja NeoGlo en líquido.

No esterilice en autoclave NeoGlo. La exposición al vapor o a la humedad excesiva puede causar fallos eléctricos.

Utilice únicamente pilas alcalinas AA. No utilice pilas recargables. Si inserta la pila incorrectamente puede producirse calor, dañar la unidad y anular la garantía.

Deseche NeoGlo de acuerdo con las normas electrónicas locales.

Funda NeoGlo no está diseñada para proteger a NeoGlo del agua ni de cualquier otro daño.

Funda NeoGlo para un único uso.