


NeoBar®

SUPPORT POUR SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHÉALE

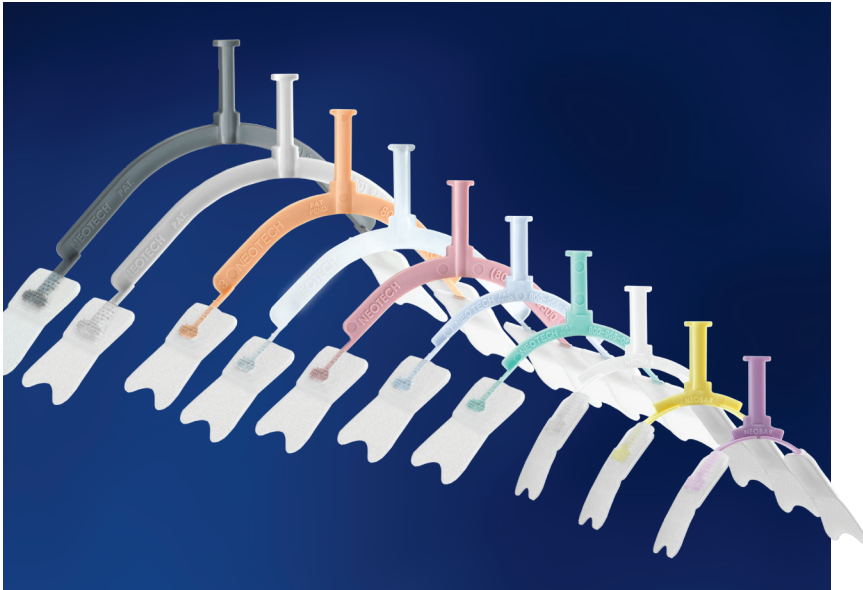

FONCTIONS ET AVANTAGES

- Languettes hydrocolloïdes hypoallergéniques NeoBond®
- Grandes tailles disponibles avec des adhésifs acryliques de qualité médicale
- Conçu pour réduire le nombre d'extubations, éviter les traumatismes du palais et améliorer l'hygiène buccale
- Élimine le recours aux rubans adhésifs appliqués à proximité du nez ou de la bouche Peut être coupé en cas de retrait d'urgence
- Code de couleur selon les tailles
- Ne contient ni latex de caoutchouc naturel ni plastifiant DEHP
- Emballé individuellement

Catalogue	Taille	Couleur	Quantité/Unité
N709	Mini	Violet	5/boîte
N710	Ultra	Jaune	5/boîte
N711	Micro	Blanc	5/boîte
N712	Petit	Verte	5/boîte
N713	Grande	Bleu	5/boîte
N714	XL	Rose	5boîte
N715H	Macro	Dégager	5/boîte
N716H	Géant	Gris	5/boîte
Avec adhésif acrylique de qualité médicale			
N715F	Macro	Pêche	5/boîte
N716F	Géant	Carbone	5/boîte
Assorti			
N718 Transport (1 each N709, N710, N711, N712, N713, N714)			
N719N Assorti (2 each N709, N710, N711, N712, N713, N714)			

Brevet
#D434,496; #6,050,263

INDICATIONS D'UTILISATION

NeoBar est indiqué pour fixer une sonde endotrachéale. Elle est conçue pour une utilisation chez les patients en pédiatrie (nouveau-nés, nourrissons et enfants).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation

- 1 Après avoir intubé le patient, utilisez le ruban de mesure NeoBar fourni pour sélectionner la taille de NeoBar à utiliser.

Placez la bande au milieu du septum et recouvrir l'oreille. La couleur au niveau de l'ouverture du conduit auditif indique la bonne taille de NeoBar.

Remarque : si la taille est comprise entre deux couleurs, choisissez la taille supérieure.

- 2 Après avoir intubé le patient, utilisez le ruban de mesure NeoBar fourni pour sélectionner la taille de NeoBar à utiliser.

Placez la bande au milieu du septum et recouvrir l'oreille. La couleur au niveau de l'ouverture du conduit auditif indique la bonne taille de NeoBar.

Remarque : si la taille est comprise entre deux couleurs, choisissez la taille supérieure

- 3 Nettoyez et séchez la peau selon le protocole hospitalier.

Remarque : il est important de maintenir la peau aussi propre et sèche que possible. Les languettes adhèrent mal sur une peau ou des poils humides. Les huiles et les lotions affecteront négativement l'adhérence.

N'UTILISEZ PAS D'ALCOOL.

Application

- 1 Avant de retirer les films protecteurs, réchauffez les languettes dans vos mains pendant 60 secondes. Vous pouvez également les placer sous un incubateur chauffant ou un chauffe-talon pendant 10 à 15 secondes.
- 2 Retirez et jetez les films de protections. Fixez les languettes devant les oreilles au niveau des os, puis maintenez-les en place pendant 60 secondes pour garantir une bonne adhérence.

Remarque : assurez-vous que la sonde d'intubation endotrachéale est située en dessous du support pour réduire la pression sur le palais ou les gencives.

- 3 Enroulez un ruban adhésif ou un sparadrap de 1,27 cm d'abord autour du support NeoBar, puis autour du support et de la sonde.

Retrait

- 1 Remplacez NeoBar tous les cinq jours ou à la fréquence indiquée par le protocole hospitalier, selon la première éventualité.
- 2 Déroulez le ruban adhésif pour séparer la sonde endotrachéale du support NeoBar.
- 3 Saturez les languettes d'eau ou de solution saline.
- 4 Retirez doucement les languettes de la peau, tout en appliquant un tampon imbibé d'eau ou de solution saline.

Retrait d'urgence

Coupez soigneusement la partie mince de NeoBar à l'aide de ciseaux à bouts ronds au niveau de la jonction de la barre et de la languette.

Séparez NeoBar et de la sonde endotrachéale.

Retirez les languettes plus tard. (Voir Retrait)

CONTRAINDICATIONS, CAUTIONS & WARNINGS

Le NeoBar est contre-indiqué pour les patients atteints d'infections cutanées ou d'écorchures pouvant empêcher le placement correct des languettes.

Ce dispositif n'est pas préconisé chez l'adulte.

Les lois fédérales des États-Unis imposent que ce produit soit uniquement vendu par un médecin ou sur ordonnance de celui-ci.

Le NeoBar ne peut être utilisé que lorsque le patient est sous la surveillance continue et directe de professionnels médicaux formés.

Cessez l'utilisation immédiatement si une irritation cutanée se produit.

Ne mettez pas le NeoBar en contact avec les lèvres.

Les languettes n'adhèrent pas correctement à la peau humide ou aux cheveux. Les huiles et lotions rendent l'adhérence plus difficile.

N'utilisez pas d'alcool pour nettoyer la peau avant application.

Pour retirer le dispositif en urgence, consultez la section INDICATIONS D'UTILISATION : Retrait en urgence.

À usage unique.