


EZCare[™] Softouch

SUPOORTE PARA TUBO DE TRAQUEOSTOMIA

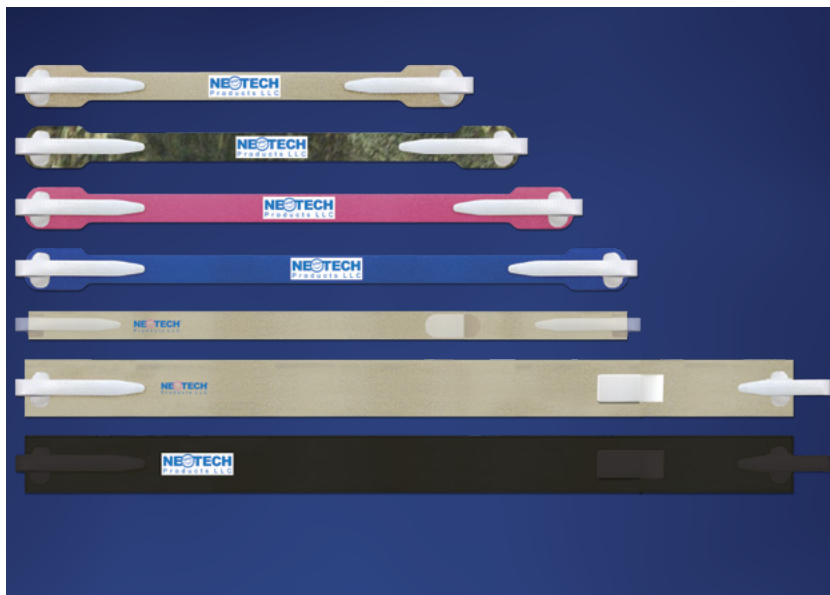

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- NeoFoam[®] ultra espesso para melhor estabilidade
- NeoFoam macio, respirável e confortável para a pele que elimina a transpiração
- Concebido para proporcionar conforto
- Leve e ajustado ao formato
- N925 e N926 18" podem ser cortados no tamanho certo
- Material exclusivo que ajuda a evitar deslizamentos
- Não fabricado com látex de borracha natural ou plastificante DEHP
- Embalado individualmente

CAT. #	Tamanho	HCPCS	Qtd/Unidade
N9105	5" Peça única	A7526	20/caixa
N9106	6" Peça única	A7526	20/caixa
N9107	7" Peça única	A7526	20/caixa
N9108	8" Peça única	A7526	20/caixa
N9109	9" Peça única	A7526	20/caixa
N9110	10" Peça única	A7526	20/caixa
N9111	11" Peça única	A7526	20/caixa
N925*	11" 2 peças (apenas bronzeado)	A7526	20/caixa
N926**	18" 2 peças (apenas bronzeado)	A7526	20/caixa
N926BK-10**	18" 2 peças (apenas preto)		10/pacote

Bronzeada=TN, Camuflar=CO, Rosa=PK, Azul=BL

*1/2" alta

**1" alta



Pai Inventou



Feito nos Estados Unidos

EZCare™ Softouch

SUORTE PARA TUBO DE TRAQUEOSTOMIA

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O EZCare Softouch serve para proteger o tubo de traqueostomia de um paciente. Concebido para utilização em pacientes pediátricos (recém-nascidos, bebês e crianças).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Medidas

Selecione o tamanho adequado usando a fita métrica fornecida com o EZCare Softouch.

Posicione a linha de arranque na flange do lado esquerdo e enrole à volta do pescoço até a flange direita. Se as medidas estiverem entre tamanhos, tente primeiro um tamanho maior.

Peça única (N9105-N9111)

- 1 Com o lado liso e branco voltado para o pescoço, insira a aba do gancho na flange de um dos lados da placa.
- 2 Puxe a aba para trás sobre a flange e pressione firmemente o tecido do gancho branco no tecido do colarinho para garantir uma segurança adequada.
- 3 Enrole o EZCare à volta do pescoço e insira a aba do gancho através da flange no outro lado da placa.
- 4 Puxe a aba para trás sobre a flange e pressione firmemente o tecido do gancho branco no tecido do colarinho para garantir uma segurança adequada.

Nota: Certifique-se de que o EZCare está apertado, mas não excessivamente esticado. Ajuste conforme necessário.

- 5 Substitua o EZCare Softouch a cada 5 dias ou de acordo com o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro. Substitua imediatamente se a aba do gancho estiver visivelmente gasta ou suja.

2-pecas (N925-N926)

- 1 Separe as duas peças.
- 2 Com o lado liso e branco voltado para o pescoço, insira as abas do gancho nas flanges de cada um dos lados da placa.
- 3 Puxe a aba para trás sobre a flange e pressione firmemente o tecido do gancho branco no tecido do colarinho para garantir uma segurança adequada.
- 4 Enrole os dois lados do EZCare ao redor do pescoço e junte-os.

- 5 Determine o comprimento adequado, puxe o pedaço mais longo para longe do pescoço e corte o excesso.

Nota: Certifique-se de que a pele não será exposta à aba de segurança do tecido do gancho.

- 6 Volte a juntar os dois lados e pressione com firmeza a aba de segurança do tecido do gancho branco no tecido do pescoço para garantir uma segurança adequada.

Nota: Certifique-se de que o EZCare está apertado, mas não excessivamente esticado. Ajuste conforme necessário.

- 7 Substitua o EZCare Softouch a cada 5 dias ou de acordo com o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro. Substitua imediatamente se a aba do gancho estiver visivelmente gasta ou suja.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Segundo a legislação em vigor, a venda deste dispositivo está sujeita a receita ou indicação médica.

Substitua imediatamente se a aba do gancho estiver visivelmente gasta ou suja. Abas desgastadas podem causar decanulação.

Verifique regularmente para evitar a desanexação.

Descontinue imediatamente a utilização em caso de irritação cutânea.

Utilize apenas num único paciente.

Certified



Corporation

Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2025 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech. M780 Rev B 2025.10.01

