


# Neotech Meconium Aspirator<sup>®</sup>

## DISPOSITIVO DE REMOÇÃO DE MECÔNIO

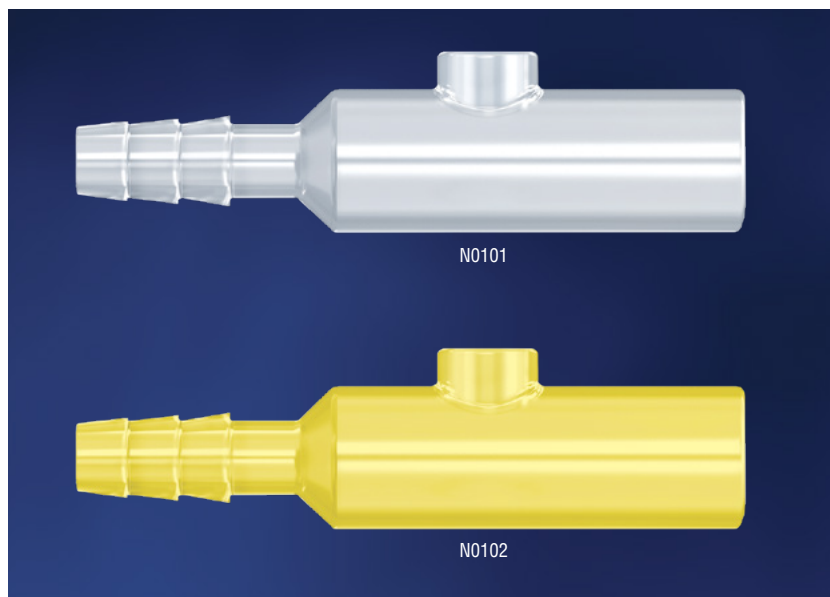


### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Concebido para eliminar a aspiração de mecônio pela boca
- Entrada de controlo de sucção para sucção intermitente
- Fixa-se à maioria dos tubos endotraqueais
- Apresentado no Livro Didático de Reanimação Neonatal 1
- NO102 (amarelo) permite uma identificação mais fácil
- Não fabricado com látex de borracha natural ou plastificante DEHP
- Embalado individualmente

1) Textbook of Neonatal Resuscitation, 6th Edition (2011)  
pg. 43, Figure 2.7

Número	Item	Qtd/Unidade
N0101	Transparente	40/caixa
N0102	Amarela	40/caixa

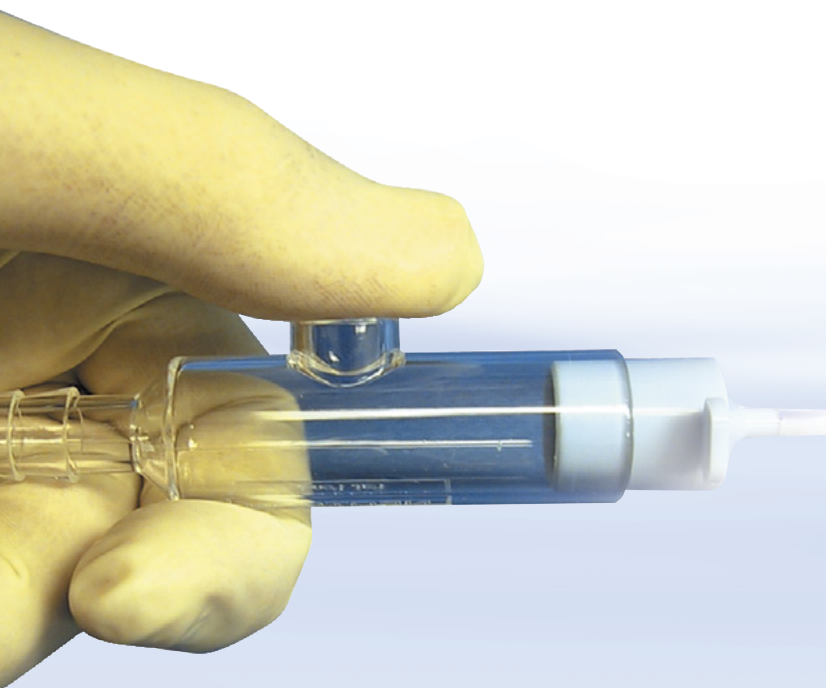

# Neotech Meconium Aspirator®

## DISPOSITIVO DE REMOÇÃO DE MECÓNIO

### INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O Aspirador de Mecónio Neotech serve para ser utilizado como dispositivo de aspiração, aspirando o mecónio da via respiratória superior de um recém-nascido.

### PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Segundo a legislação em vigor, a venda deste dispositivo está sujeita a receita ou indicação médica. Utilize apenas num único paciente.

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1 Conecte a extremidade farpada do Aspirador de Mecónio Neotech à linha de aspiração.
- 2 Defina a pressão de aspiração em 80 mm Hg ou menos.
- 3 Intube o paciente com um tubo traqueal adequado.
- 4 Conecte a extremidade de 15mm I.D. do Aspirador de Mecónio Neotech à de 15mm O.D. Adaptador do tubo traqueal.
- 5 Bloqueie a entrada do polegar com o polegar para começar a aspirar.
- 6 Aspirar por dois segundos ou menos de cada vez até que o mecónio seja completamente removido. Aspire o mecónio intermitentemente.

*Nota: Para aspiração intermitente, desbloqueie a entrada do polegar e pare de aspirar. Bloqueie a entrada do polegar novamente para continuar a aspiração.*

- 7 Continuar a aspirar enquanto o tubo traqueal estiver a ser retirado.
- 8 Descarte após usar.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2025 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech. M784 Rev B 2025.10.01

