


NEOPULSE™

WEGWERFIMPULS-OXIMETER-VERPACKUNG

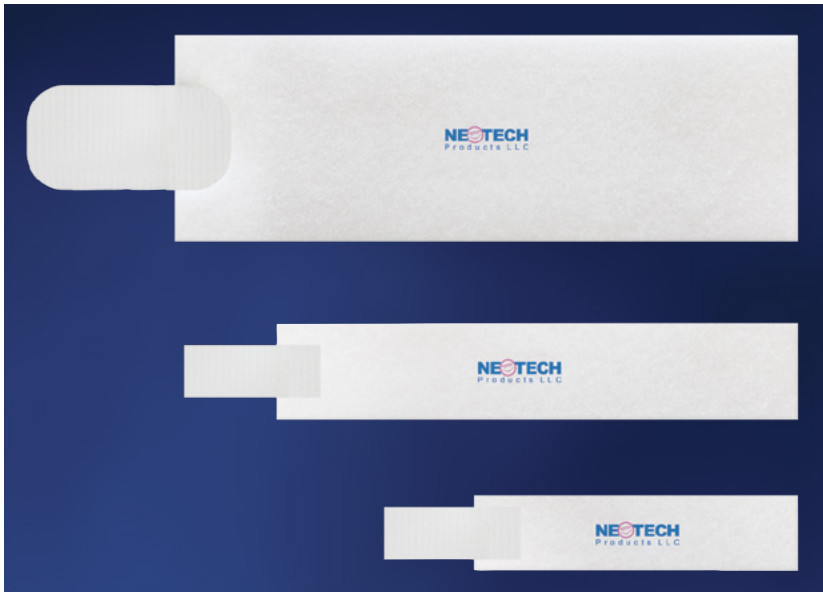

MERKMALE & VORTEILE

- Weicher, atmungsaktiver, hautfreundlicher NeoFoam® lässt Schweiß verdunsten
- Leicht im Gewicht, formschlüssig und justierbar
- Entworfen für Komfort und Stabilität
- Wurde nicht mit natürlichem Latex oder Plastifizierungsmittel DEHP hergestellt
- Einzeln verpacktes

Katalog-Nr.	Größe	Maße	QTY/UNIT
N781	Klein	3/4" x 3"	100/Kasten
N782	Groß	1" x 5"	100/Kasten
N783	X-groß	2" x 6"	100/Kasten

NEOPULSE™

WEGWERFIMPULS-OXIMETER-VERPACKUNG

GEBRAUCHSHINWEIS

Der NeoPulse soll einen Impulsoximeter-Sensor an der richtigen Stelle halten. Er ist für Gebrauch bei pädiatrischen Patienten (Neugeborene, Kleinkinder und Kinder) bestimmt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1 Platzieren Sie den Impulsoximeter-Sensor gemäß dem Krankenhausprotokoll.
- 2 Wickeln Sie den NeoPulse um den Fuss und den Impulsoximeter-Sensor und befestigen Sie den Haken sanft am Verband.

Anmerkung: Kann für passenden Sitz gekürzt werden. Stellen Sie sicher, daß der Verband nicht zu fest sitzt. Haken sollte den Verband ganz überlagern.

- 3 Überprüfen Sie den Fuß nach dem Anlegen des Verbands, damit eine ausreichenden Zirkulation gesichert ist.
- 4 Wechseln Sie den NeoPulse alle 5 Tage oder gemäß Krankenhausprotokoll, je nachdem, welcher Termin früher ist.

Ersetzen Sie es sofort, wenn es sichtbar abgenutzt oder verschmutzt ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN & WARNUNGEN

Stellen Sie sofort die Behandlung damit ein, wenn eine Hautentzündung auftritt.

Nur für einen Patienten gebrauchen.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2021 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



HERGESTELLT
IN DEN USA

M679 Rev A