


NeoSeal®

LACRE DE CÂNULA NASAL

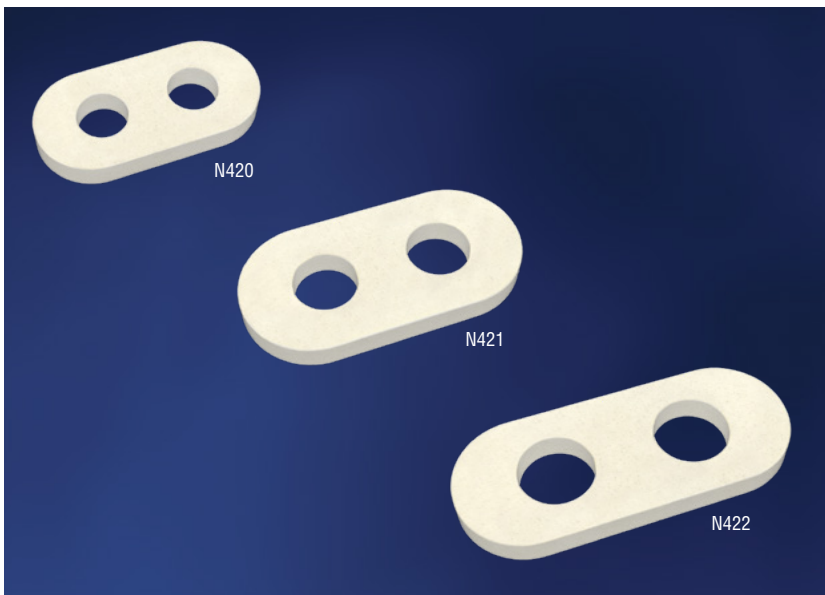

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Criado para melhorar a vedação para maior e mais eficaz suporte respiratório
- Protege a pele do septo e narinas
- Compatível com a maioria das pontas nasais
- Não fabricado com látex de borracha natural ou plastificante DEHP

Cat. #	Tamanho	Unidade de quantidade
N420	Micro	150/caixa
N421	Pequena	150/caixa
N422	Grande	150/caixa

Patente pendente



NeoSeal®

LACRE DE CÂNULA NASAL

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A NeoSeal foi concebida para criar um lacre em torno das narinas e proteger a pele do septo e das narinas. Concebida para utilização em pacientes pediátricos (recém-nascidos, bebês e crianças).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1 Descole a película da NeoSeal.
- 2 Deslize a cânula nasal com o adesivo virado para a cânula.
Nota: O lado macio e liso sem adesivo deve estar em contato com a pele do paciente.
- 3 Coloque a cânula de acordo com o protocolo hospitalar.
- 4 Substitua a NeoSeal todos os dias ou de acordo com o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro.

Nota: Substitua imediatamente se estiver suja ou molhada.

PRECAUÇÕES

Segundo a legislação em vigor, a venda deste dispositivo está sujeita a receita ou indicação médica.

Perigo de asfixia. O NeoSeal s deve ser usado em pacientes sob supervisão contínua e direta de profissionais de saúde.

Substitua imediatamente se estiver suja ou molhada.

Descontinue imediatamente a utilização em caso de irritação cutânea.

Utilize apenas num único paciente.

