


NeoSeal[®]

TENUTA PER REBBI NASALI

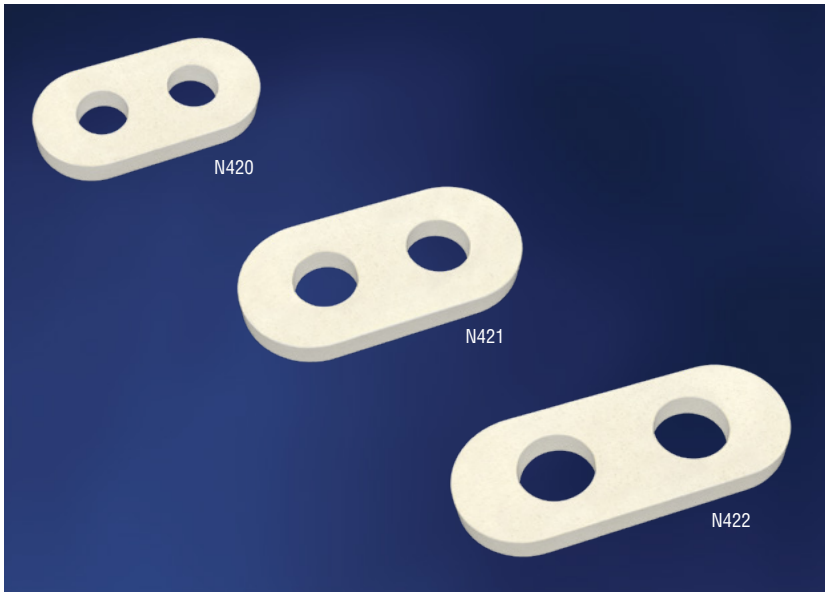

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Progettato per migliorare la tenuta per un supporto respiratorio più efficace
- Protegge la pelle del setto e delle narici
- Compatibile con la maggior parte dei rebbi nasali
- Non contiene lattice di gomma naturale o DEHP plastificante

Cat. #	Dimensione	Qtà/Unità
N420	Micro	150/scatola
N421	Piccola	150/scatola
N422	Larga	150/scatola

In attesa di brevetto

NeoSeal®

TENUTA PER REBBI NASALI

INDICAZIONI D'USO

Il NeoSeal è pensato per creare una tenuta intorno alle narici e protegge la pelle del setto e delle narici. È destinato all'uso su pazienti pediatrici (neonati, infanti e bambini).

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1 Staccare il NeoSeal dal rivestimento.
- 2 Far scivolare sui rebbi nasali con l'adesivo rivolto verso la cannula.

Nota: il lato morbido e liscio senza adesivo dovrebbe toccare la pelle del paziente.

- 3 Posizionare la cannula in base al protocollo ospedaliero.
- 4 Sostituire NeoSeal quotidianamente o a ogni protocollo ospedaliero, se precedente.

Nota: sostituire immediatamente se sporco o bagnato.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

La legge federale limita la vendita di questo dispositivo da parte o su prescrizione di un medico.

Rischio di soffocamento. NeoSeal deve essere usato esclusivamente sotto continua e diretta supervisione di personale qualificato.

Sostituire immediatamente se sporco o bagnato. Interrompere immediatamente in caso di irritazione cutanea.

Esclusivamente per uso monopaziente.

