


## NeoSeal<sup>®</sup>

### SELLO DE CÁNULAS NASALES

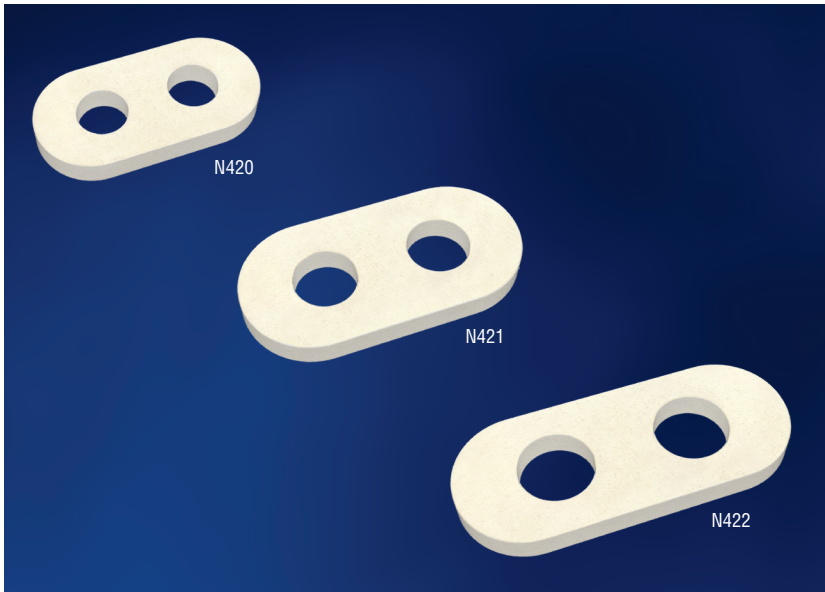

#### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseñado para mejorar el sello y obtener un soporte respiratorio más eficaz
- Protege la piel del tabique y las narinas
- Compatible con la mayoría de cánulas nasales
- No fabricado con látex de caucho natural o DEHP plastificante

Número	Tamaño	Cant./Unidad
N420	Micro	150/caja
N421	Pequeño	150/caja
N422	Grande	150/caja

Patente Pendiente



# NeoSeal®

## SELLO DE CÁNULAS NASALES

### INDICACIONES DE USO

El NeoSeal está diseñado para crear un sello alrededor de las fosas nasales y proteger la piel del tabique nasal y las fosas nasales. Está previsto para uso en pacientes pediátricos (recién nacidos, lactantes y niños).

### INSTRUCCIONES DE USO

- 1 Retire NeoSeal del recubrimiento de plástico
- 2 Deslice sobre las cánulas nasales con el adhesivo mirando hacia la cánula.  
*Nota: el lado suave y uniforme sin adhesivo debe estar en contacto con la piel del paciente*
- 3 Inserte las cánulas conforme al protocolo hospitalario. Documente la colocación del NeoSeal en la historia clínica del paciente.  
*Nota: Para minimizar el riesgo de aspiración/ ingestión, asegúrese de que las cánulas nasales o el NeoSeal no entren en la boca del bebé.*
- 4 Sustituya NeoSeal a diario o según el protocolo hospitalario, el que sea el plazo más breve.  
*Nota: sustituya de inmediato si está sucio o húmedo.*
- 5 Documente la extracción o la sustitución en la historia clínica del paciente.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Las leyes federales restringen la venta de este dispositivo a un médico o según sus indicaciones.

Peligro de asfixia. El NeoSeal solo debe utilizarse mientras el paciente esté bajo supervisión directa y continua de un profesional sanitario cualificado.

Riesgo de ingestión o aspiración. Cuando esté en uso, asegúrese de que las cánulas nasales o el NeoSeal no entren en la boca del bebé.

Sustituya de inmediato si está sucio o húmedo.

Interrumpa de inmediato si se presenta irritación en la piel.

Solo para usar en un único paciente.



Para información o muestras GRATIS

**1-800-966-0500 • [neotechproducts.com](http://neotechproducts.com)**

Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



Hecho en EEUU

M655 Rev B