


## NeoSeal<sup>®</sup>

### DICHTUNG FÜR NASENPRONGS

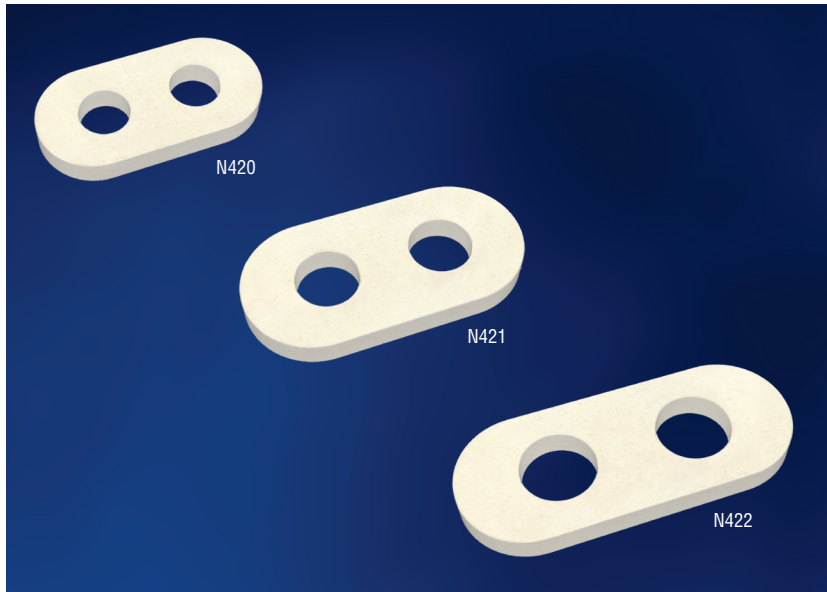

#### MERKMALE & VORTEILE

- Zur besseren Abdichtung für eine effizientere Atmungsunterstützung entwickelt
- Schützt die Haut an Nasenscheidewand und Nasenlöchern
- Kompatibel mit den meisten Nasenprongs
- Ohne Naturkautschuklatex und DEHP-Weichmacher

Katalog-Nr.	Größe	Mengeinheit
N420	Mikro	150/Kasten
N421	Klein	150/Kasten
N422	Groß	150/Kasten

Patent angemeldet



### GEBRAUCHSHINWEIS

NeoSeal dient zur Abdichtung der Nasenlöcher und zum Schutz der Haut von Nasenscheidewand und Nasenlöcher. Zur Verwendung bei pädiatrischen Patienten (Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern) bestimmt.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1 NeoSeal von der Kunststoffolie abziehen.
- 2 Mit der Klebeseite zur Kanüle hin über die Nasenprongs schieben.  
*Hinweis: Die weiche, glatte Seite ohne Klebstoff sollte auf der Haut des Patienten aufliegen.*
- 3 Enden gemäß dem Krankenhausprotokoll einführen. Dokumentieren Sie die Platzierung des NeoSeal in der Krankenakte des Patienten.  
*Hinweis: Achten Sie zur Minimierung des Aspirations-/Verschluckungsrisikos darauf, dass die Enden der Nasenkanülen bzw. das NeoSeal nicht in den Mund des Säuglings gelangen.*
- 4 NeoSeal gemäß Krankenhausprotokoll oder mindestens täglich erneuern.  
*Hinweis: Bei Verschmutzung oder Nässe unverzüglich austauschen.*
- 5 Dokumentieren Sie die Entfernung bzw. den Wechsel in der Krankenakte des Patienten.

### VORSICHTSMASSNAHMEN & WARNUNGEN

Nach Bundesgesetz darf dieses Gerät nur von einem Arzt oder auf Verordnung eines Arztes verkauft werden.

Erstickungsgefahr. NeoSeal darf nur unter ständiger direkter Überwachung des Patienten durch geschultes medizinisches Fachpersonal verwendet werden.

Verschluckungs- oder Aspirationsgefahr. Achten Sie bei der Verwendung darauf, dass die Enden der Nasenkanülen bzw. das NeoSeal nicht in den Mund des Säuglings gelangen.

Bei Verschmutzung oder Nässe unverzüglich austauschen.

Bei Hautreizungen unverzüglich entfernen.

Nur für den Einmalgebrauch.