


NeoSeal®

LACRE DE CÂNULA NASAL

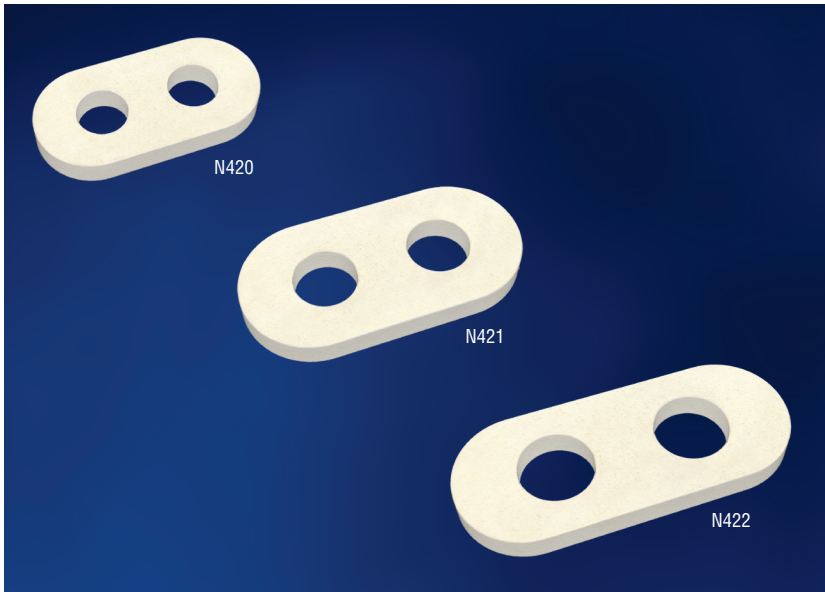

— CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS —

- Criado para melhorar a vedação para maior e mais eficaz suporte respiratório
- Protege a pele do septo e narinas
- Compatível com a maioria das pontas nasais
- Não fabricado com látex de borracha natural ou plastificante DEHP

Cat. #	Tamanho	Unidade de quantidade
N420	Micro	150/caixa
N421	Pequena	150/caixa
N422	Grande	150/caixa

Patente pendente



NeoSeal®

LACRE DE CÂNULA NASAL

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A NeoSeal foi concebida para criar um lacre em torno das narinas e proteger a pele do septo e das narinas. Concebido para utilização em pacientes pediátricos (recém-nascidos, bebês e crianças).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1 Descasque a NeoSeal dos revestimentos de plástico.
- 2 Deslize a cânula nasal com o adesivo virado para a cânula.

Nota: O lado macio e liso sem adesivo deve estar em contato com a pele do paciente.

- 3 Insira as cânulas de acordo com o protocolo do hospital. Documente a colocação do NeoSeal no prontuário do paciente.

Nota: Para minimizar o risco de aspiração/ingestão, certifique-se de que os pinos da cânula nasal e/ou NeoSeal não entrem na boca do bebê.

- 4 Substitua a NeoSeal todos os dias ou de acordo com o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro.

Nota: Substitua imediatamente se estiver suja ou molhada.

- 5 Remoção e/ou substituição de documentos no prontuário do paciente.

PRECAUÇÕES

Segundo a legislação em vigor, a venda deste dispositivo está sujeita a receita ou indicação médica.

Perigo de asfíxia. O NeoSeal só deve ser usado em pacientes sob supervisão contínua e direta de profissionais de saúde.

Risco de ingestão ou aspiração. Quando em uso, certifique-se de que os pinos da cânula nasal e/ou NeoSeal não entrem na boca do bebê.

Substitua imediatamente se estiver suja ou molhada.

Descontinue imediatamente a utilização em caso de irritação cutânea.

Utilize apenas num único paciente.

Certified



Corporation

Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



Feito nos
Estados Unidos

M691 Rev B