


NeoSeal®

TENUTA PER REBBI NASALI

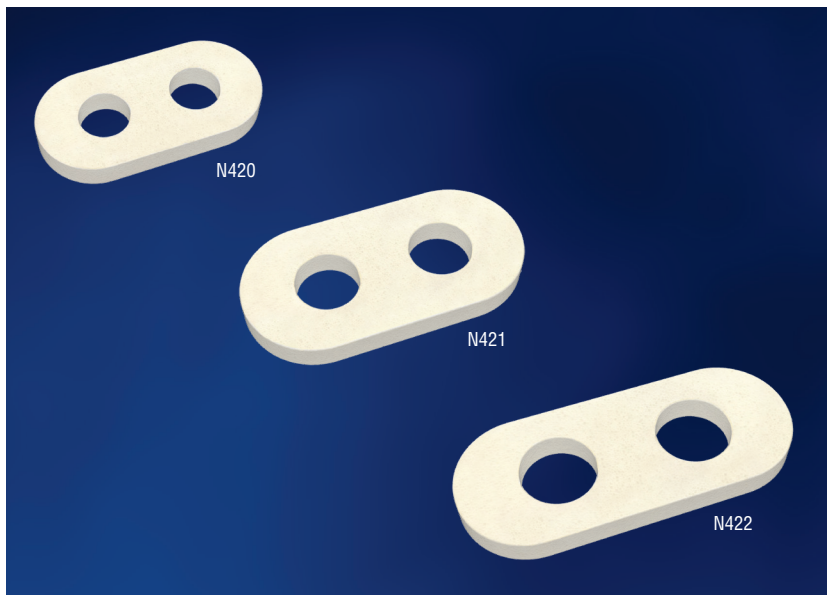

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Progettato per migliorare la tenuta per un supporto respiratorio più efficace
- Protegge la pelle del setto e delle narici
- Compatibile con la maggior parte dei rebbi nasali
- Non contiene lattice di gomma naturale o DEHP plastificante

Cat. #	Dimensione	Qtà/Unità
N420	Micro	150/scatola
N421	Piccola	150/scatola
N422	Larga	150/scatola

In attesa di brevetto

NeoSeal®

TENUTA PER REBBI NASALI

INDICAZIONI D'USO

NeoSeal è pensato per creare una tenuta intorno alle narici e proteggere la pelle del setto nasale e delle narici. È progettato per l'uso su pazienti pediatrici (neonati, infanti e bambini).

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1 Staccare NeoSeal dal rivestimento plastico.
- 2 Far scivolare sui rebbi nasali con l'adesivo rivolto verso la cannula.
Nota: il lato morbido e liscio senza adesivo dovrebbe toccare la pelle del paziente.
- 3 Inserire i rebbi secondo il protocollo ospedaliero. Documentare il posizionamento di NeoSeal nella cartella clinica del paziente.
Nota: per ridurre al minimo il rischio di aspirazione/ ingestione, assicurarsi che i rebbi della cannula nasale e/o NeoSeal non entrino nella bocca del neonato.
- 4 Sostituire NeoSeal quotidianamente o a ogni protocollo ospedaliero, se precedente.
Nota: sostituire immediatamente se sporco o bagnato.
- 5 Documentare la rimozione e/o la sostituzione nella cartella clinica del paziente.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

La legge federale limita la vendita di questo dispositivo da parte o su prescrizione di un medico.

Pericolo di soffocamento. NeoSeal deve essere utilizzato solo quando il paziente è sotto la supervisione continua e diretta di operatori sanitari qualificati.

Rischio di ingestione o aspirazione. Durante l'uso, assicurarsi che i rebbi della cannula nasale e/o NeoSeal non entrino nella bocca del neonato.

Sostituire immediatamente se sporco o bagnato.

Interrompere immediatamente in caso di irritazione cutanea.

Esclusivamente per uso monopaziente.

