


NeoSeal[®]

PLASTRY DO OCHRONY NOSA NOWORODKA PRZY WENTYLACJI DONOSOWEJ

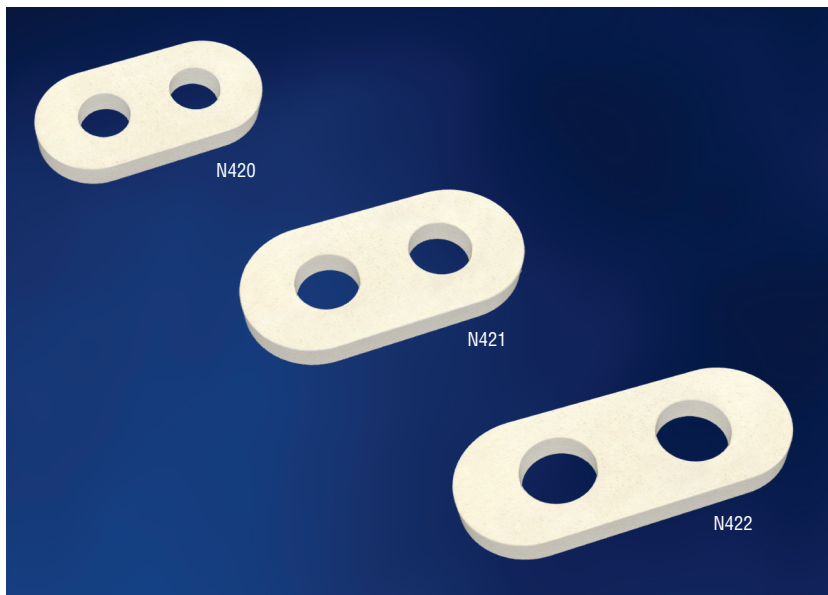

CECHY PRODUKTU

- Lepsze uszczelnienie i bardziej efektywne wspomaganie oddechu
- Ochrona skóry przegrody nosowej i nozdrzy
- Zgodność z większością wąsów tlenowych
- Produkt wykonany bez użycia kauczuku naturalnego ani zmiękczacza DEHP

Katalog nr	Rozmiar	Ilość/Jednostka
N420	Mikro	150/skrzynka
N421	Mały	150/skrzynka
N422	Wielki	150/skrzynka



Patent w toku

ZASTOSOWANIE

Plastry NeoSeal są przeznaczone do poprawy uszczelnienia wokół nozdrzy i ochrony skóry przegrody nosowej oraz nozdrzy. Służą do stosowania u pacjentów pediatrycznych (noworodków, niemowląt i dzieci).

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- 1 Usunąć plastikową osłonkę NeoSeal.
- 2 Wsuń plastry na wąsy tlenowe tak, aby warstwa przyklepna była skierowana w stronę kaniuli.
Uwaga: Miękką, gładką powierzchnią bez warstwy przyklepnej powinna przylegać do skóry pacjenta.
- 3 Wprowadzić wąsy tlenowe zgodnie z protokołem szpitalnym. Udokumentować umieszczenie plastra NeoSeal w dokumentacji medycznej pacjenta.
Uwaga: Aby zminimalizować ryzyko zaaspirowania/ połknięcia, należy zadbać o to, aby końcówki wąsów tlenowych i/lub plaster NeoSeal nie dostały się do ust niemowlęcia
- 4 Wymieniaj plaster NeoSeal na nowy raz dziennie lub częściej, zależnie od procedur szpitalnych.
Uwaga: W przypadku zanieczyszczenia lub zawilgocenia należy natychmiast wymienić produkt na nowy.
- 5 Udokumentować usunięcie i/lub wymianę w dokumentacji medycznej pacjenta.

PRZESTROGI I OSTRZEŻENIA

Przepisy federalne zezwalają na sprzedaż tego produktu wyłącznie przez lekarzy lub na ich zlecenie.

Zagrożenie udławieniem. Plaster NeoSeal można stosować wyłącznie, jeśli pacjent znajduje się pod stałym i bezpośrednim nadzorem przeszkolonych pracowników systemu opieki zdrowotnej.

Ryzyko połknięcia lub zaaspirowania. Podczas stosowania należy zadbać o to, aby końcówki wąsów tlenowych i/lub plaster NeoSeal nie dostały się do ust niemowlęcia.

W przypadku zanieczyszczenia lub zawilgocenia należy natychmiast wymienić produkt na nowy.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy zrezygnować z używania produktu.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla pojedynczego pacjenta.