


NeoSeal®

TĚSNĚNÍ PRO NAZÁLNÍ VÝSTUPY

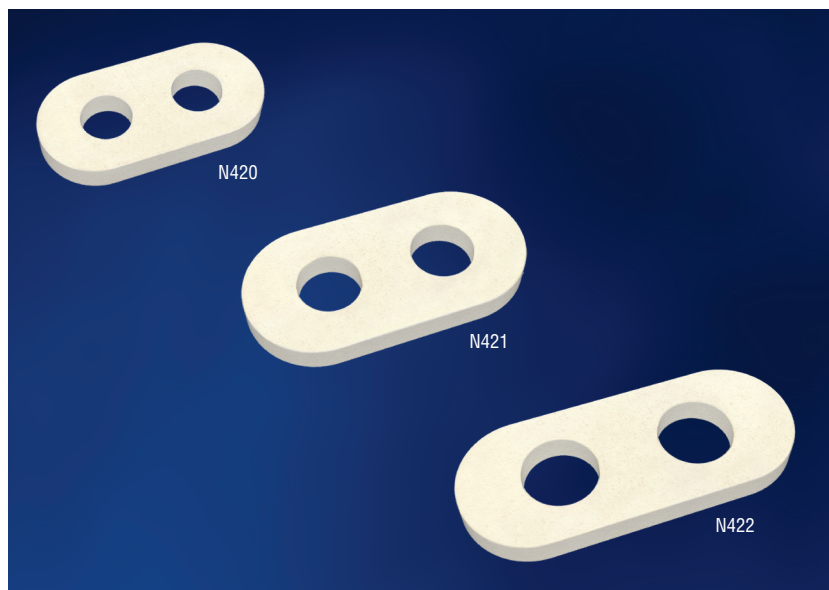

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Navrženo za účelem vylepšení těsnění pro efektivnější respirační podpěru
- Chrání pokožku přepážky a nosních dírek
- Kompatibilní s většinou nazálních výstupů
- Není vyrobeno z přírodního latexu ani změkčovadla DEHP

Katalog #	Velikost	Množství/Jednotka
N420	Micro	150/krabice
N421	Malý	150/krabice
N422	Velký	150/krabice

Patent v řízení



Vyrobeno
v USA

TĚSNĚNÍ PRO NAZÁLNÍ VÝSTUPY

INDIKACE PRO POUŽITÍ

Těsnění NeoSeal je určeno pro vytvoření utěsnění kolem nosních dírek a pro ochranu pokožky nosní přepážky a nosních dírek. Je určeno pro použití u pediatrických pacientů (novorozenců, kojenců a dětí).

NÁVOD K POUŽITÍ

- 1 Sloupněte těsnění NeoSeal z plastové fólie.
- 2 Nasuňte přes nazální výstupy s lepicí stranou směrem ke kanyle.

Poznámka: Měkká, hladká strana bez lepidla by se měla dotýkat pokožky pacienta.

- 3 Vložte kanylu dle postupů nemocnice. Zdokumentujte umístění NeoSeal ve zdravotní dokumentaci pacienta.

Poznámka: Abyste minimalizovali riziko aspirace/ požití, zajistěte, aby koncovky nosní kanyly a/nebo NeoSeal nevnikly do úst dítěte.

- 4 Těsnění NeoSeal vyměňujte denně nebo podle zavedených postupů nemocnice podle toho, co nastane dříve.

Poznámka: Těsnění vyměňte okamžitě, pokud je znečištěné nebo mokré.

- 5 Zdokumentujte odstranění a/nebo výměnu ve zdravotní dokumentaci pacienta.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Podle federálního zákona USA smí být tento přístroj prodáván výlučně lékařem nebo na jeho pokyn.

Nebezpečí udušení. Těsnění NeoSeal by mělo být použito jen tehdy, když je pacient pod stálým a přímým dohledem proškolených zdravotníků.

Nebezpečí požití nebo aspirace. Když se používá, zajistěte, aby koncovky nosní kanyly a/nebo NeoSeal nevnikly do úst dítěte.

Těsnění vyměňte okamžitě, pokud je znečištěné nebo mokré.

Pokud dojde k podráždění kůže, okamžitě je přestaňte používat.

Pouze pro jednoho pacienta.