


## NeoSeal®

### CANULE NASALE ÉTANCHE

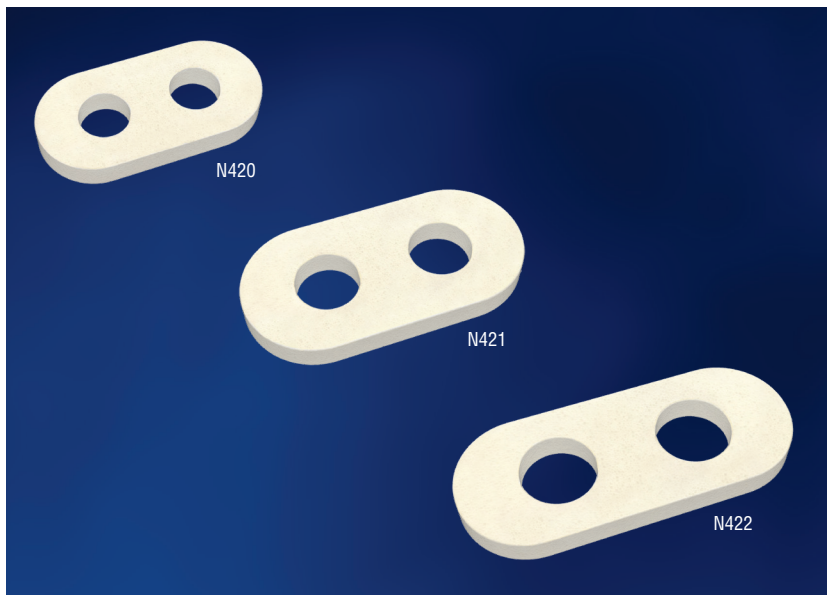

#### FONCTIONS ET AVANTAGES

- Conçue pour améliorer l'étanchéité pour une assistance respiratoire plus efficace
- Protège la peau du septum et des narines
- Compatible avec la plupart des canules nasales
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et plastifiant DEHP

Catalogue	Taille	Qté/Unité
N420	Micro	150/boîte
N421	Petite	150/boîte
N422	Grande	150/boîte

Brevet en instance

# NeoSeal®

## CANULE NASALE ÉTANCHE

### INDICATIONS D'UTILISATION

NeoSeal est conçu pour créer une étanchéité autour des narines et protéger la peau au niveau du septum nasal et des narines. Il est conçu pour une utilisation chez les patients en pédiatrie (nouveau-nés, nourrissons et enfants).

### INDICATIONS D'UTILISATION

- 1 Détachez NeoSeal du film protecteur.
- 2 Glisser les pinces nasales avec l'adhésif face à la canule.  
*Remarque : La partie lisse et souple, sans adhésif doit être en contact avec la peau du patient.*
- 3 Introduire les canules dans les narines conformément au protocole hospitalier. Consigner le placement de NeoSeal dans le dossier médical du patient.

*Remarque : Pour réduire au minimum le risque d'aspiration ou d'ingestion, s'assurer que les pinces de la canule nasale ou NeoSeal ne pénètrent pas dans la bouche du nourrisson.*

- 4 Remplacer le NeoSeal tous les jours ou conformément au protocole hospitalier, selon la première de ces éventualités.  
*Remarque : Remplacer immédiatement le produit s'il est sale ou mouillé.*
- 5 Consigner le retrait ou le remplacement du dispositif dans le dossier médical du patient.

### PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

La loi fédérale n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par un médecin.

Risque d'étouffement. NeoSeal ne doit être utilisé que lorsque le patient est sous la surveillance directe et permanente de professionnels de santé qualifiés.

Risque d'ingestion ou d'aspiration. Lors de l'utilisation, s'assurer que les pinces de la canule nasale ou NeoSeal ne pénètrent pas dans la bouche du nourrisson.

Remplacer immédiatement le produit s'il est sale ou mouillé.

En cas d'irritation de la peau, cesser d'utiliser le produit immédiatement.

À usage unique exclusivement.

