


NeoBridge[®]

NAVELSTRÄNGSKATETERHÅLLARE

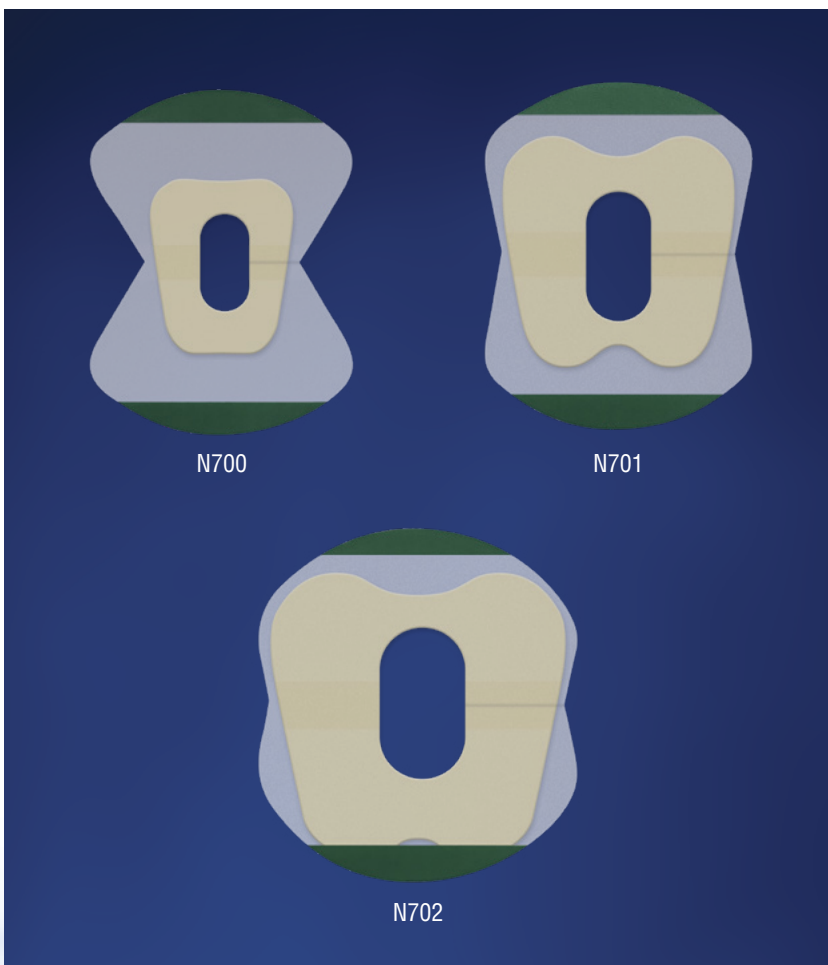

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- Hudvänlig NeoBond[®] hydrokolloidförband
- Säkra positioneringsflärpar utformade för att avlasta påfrestningar på slangarna och hjälpa till att förhindra förskjutning
- Innehåller två katetrar
- Flärpen är utformad för att kunna öppnas och stängas upprepade gånger
- Tydlig flärp för bättre synlighet
- Innehåller ej naturgummi eller mjukgörare (DEHP)
- Singelpackning

| Antal | Storlek | Ungefärlig Vikt | Antal/Enhet |
|-------|---------|------------------|-------------|
| N700 | Micro | 800 eller mindre | 20/låda |
| N701 | Små | 800-1200 gm | 20/låda |
| N702 | Stor | 1200-2200 gm | 20/låda |



Amerikanskt patent #5,370,627



Kliniker uppfann



Tillverkad i USA

NeoBridge®

NAVELSTRÄNGSKATETERHÅLLARE

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

NeoBridge används för att fästa och stödja navelsträngskatetrar. Den är avsedd för barn (nyfödda, spädbarn och barn).

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Förberedelser

Rengör och torka huden enligt gällande riktlinjer på sjukhuset efter att katetern har lagts in.

Obs! Det är viktigt att huden är så ren och torr som möjligt.

NeoBridge fäster inte ordentligt på fuktig hud eller hår. Även oljor och krämer motverkar vidhäftningen.

ANVÄND INTE SPRIT.

Applicering

- 1 Innan du tar bort plastskyddet måste hydrokolloidlimmet aktivt värmas upp. Uppvärmningstekniken är enligt följande: håll mellan handflatorna i minst 60 sekunder, håll i närheten av en strålningsvärmare i 10-15 sekunder eller håll mot en kemisk hälvärmare i 10-15 sekunder.
- 2 Kasta det vita pappersskyddet. Skrapa försiktigt bort det genomskinliga plastskyddet från hydrokolloidförbandet. Kasta plastskyddet.
- 3 Håll hydrokolloidförbandet så att skåran pekar åt höger och den breda änden av förbandet är riktad mot patientens huvud. För katetern igenom hålet i mitten på NeoBridge.
- 4 Applicera plattan på huden och håll det på plats i 60 sekunder så att det fäster ordentligt.
- 5 Skrapa bort och kasta det skrovliga pappersskyddet från den övre fliken. För upp fliken och fixera katetern/katetrarna i en båge/U-form mot fliken så att katetern/katetrarna sträcks så lite som möjligt där de sticker ut på sidan av fliken.

Obs! Se till att katetern/katetrarna inte läggs på den gröna delen av fliken. Vid användning av två katetrar, låt en kateter sticka ut på vardera sidan om fliken.

- 6 Skrapa bort och kasta det skrovliga pappersskyddet på den nedre fliken. För upp fliken så att den gröna delen på den nedre fliken ligger jäms med den gröna delen på den övre fliken och tryck ihop delarna hårt så att katetern/katetrarna innesluts mellan de självhäftande flikarna.

- 7 Om katetern/katetrarna behöver avlägsnas eller placeras om ska flikarna dras isär och efteråt sättas ihop och säkras.

Avlägsning

- 1 Byt NeoBridge var femte dag eller enligt riktlinjerna på sjukhuset, vilket som infaller först.
- 2 Dra isär flikarna för att avlägsna katetern/katetrarna.
- 3 Blöt NeoBridge med vatten eller saltlösning.
- 4 Skrapa försiktigt bort NeoBridge från huden allteftersom huden blöts med vatten eller koksaltlösning.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

Denna produkt får, enligt amerikansk lag, endast säljas av eller på ordination av läkare.

NeoBridge ska endast användas under kontinuerlig, direkt övervakning av utbildad vårdpersonal.

Avlägsna genast om hudirritation uppstår.

NeoBridge fäster inte ordentligt på fuktig hud eller hår. Även oljor och krämer motverkar vidhäftningen.

Använd inte sprit till att rengöra huden innan förbandet appliceras.

Endast avsedd för användning till en patient.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2026 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech. M827 Rev A 2026.05.01



Tillverkad i USA