


# NeoSmile™ Hydrogel

## FUNDA PARA SONDAS TÉRMICAS

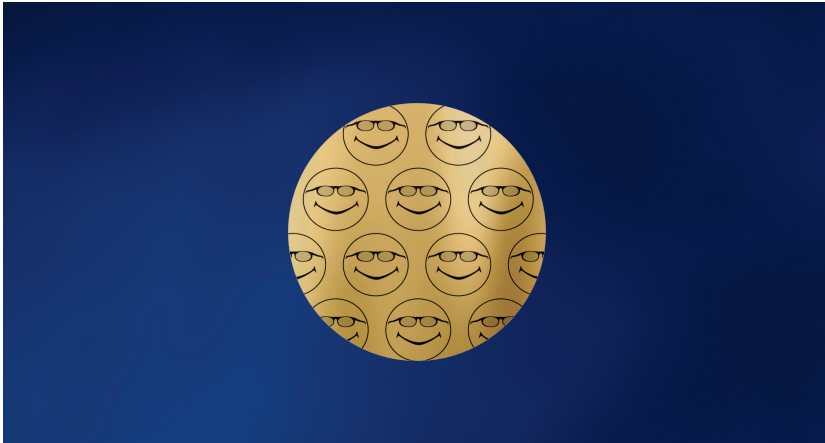

### — CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS —

- La lámina reflectante ayuda a proteger contra el calor ambiental y radiante
- Bonito diseño de cara sonriente
- Base adhesiva de gel de silicona que no daña la piel
- Cambie de posición según sea necesario
- No fabricado con látex de caucho natural o plastificados DEHP
- Empaquetado individualmente

Número	Talla	Cantidad/Unidad
N7321	1" Diámetro	75/caja



Hecho en EEUU

# NeoSmile™ Hydrogel

## FUNDA PARA SONDAS TÉRMICAS

### INDICACIONES DE USO

La funda NeoSmile está diseñada para cubrir y fijar sondas térmicas.

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Preparación

Limpie y seque la piel conforme al protocolo hospitalario.

*Nota: Es importante que la piel esté lo más limpia y seca posible. NeoSmile no se adherirá adecuadamente a piel o cabello húmedo. Los aceites y las lociones también afectarán de forma negativa a la adhesión.*

NO USE ALCOHOL.

#### Aplicación

- 1 Retire y deseche el recubrimiento. Coloque NeoSmile Hydrogel sobre la sonda y la piel.
- 2 Cambie el NeoSmile Hydrogel de posición según sea necesario.

*Nota: Si el adhesivo ya no adhiere, añada una gota de agua (no solución salina) al hidrogel y vuelva a aplicar.*

#### Extracción

- 1 Sustituya el NeoSmile Hydrogel cada 3 días o cuando lo indique el protocolo hospitalario, lo que ocurra primero.
- 2 Levante suavemente el borde del NeoSmile y despéguelo lentamente. Se puede aplicar agua o solución salina en el borde para aflojar la adhesión.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Interrompere immediatamente in caso di irritazione cutanea.

NeoSmile no se adherirá adecuadamente a piel o cabello húmedo. Los aceites y las lociones también afectarán de forma negativa a la adhesión.

No use alcohol para limpiar la piel antes de la aplicación.

Para uso en un solo paciente.



Para información o muestras GRATIS  
**1-800-966-0500 • neotechproducts.com**

Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355

©2023 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



Hecho en EEUU  
M763 Rev A