


## EZ-Hold<sup>®</sup>

### SCHLAUCH- UND KANÜLENHALTER

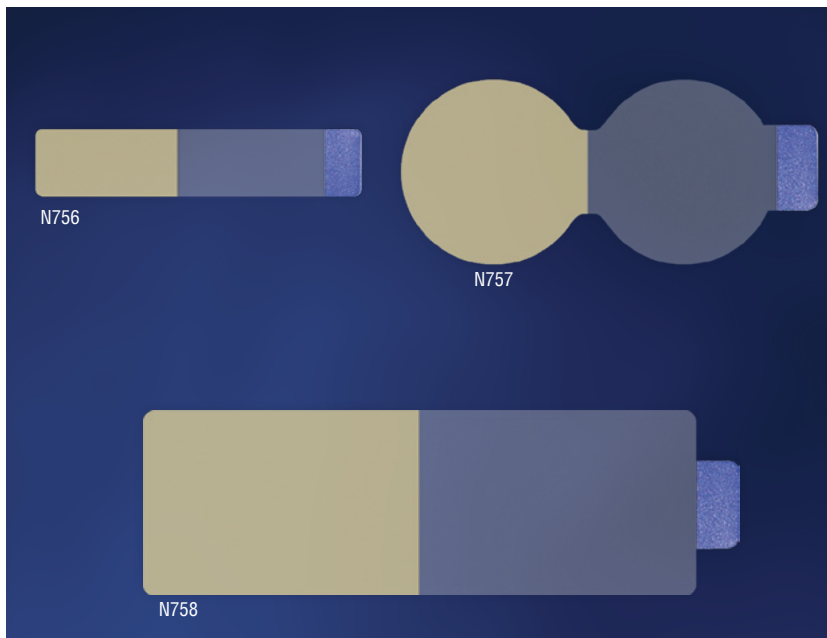

#### MERKMALE & VORTEILE

- Hautfreundliche NeoBond<sup>®</sup> Hydrokolloid-Basis
- Umfaltbare Lasche, die so entworfen wurde, dass Schläuche nur minimal belastet werden
- Lasche ist für das wiederholte Öffnen und Schließen ausgerichtet
- Transparente Lasche sorgt für bessere Sichtbarkeit
- Minigröße und -form eignet sich ideal für Frühgeburten
- Ohne Naturkautschuklatex oder DEHP-Weichmacher

Katalog	Artikel	Mengeneinheit
N756	Mini	100/ Kasten
N757	Standard	100/ Kasten
N758	Extra Groß	100/ Kasten

US-Patent #D506,547

# EZ-Hold®

## SCHLAUCH- UND KANÜLENHALTER

### GEBRAUCHSHINWEIS

EZ-Hold eignet sich zum Verankern und Halten von Atemschläuchen.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

#### Vorbereitung

Haut an der Stelle, an der EZ-Hold platziert werden soll, gemäß Krankenhausprotokoll reinigen und trocknen.

*Hinweis: Es ist wichtig, dass die Haut so rein und trocken wie möglich ist.*

*EZ-Hold kann nicht ordnungsgemäß an feuchter Haut bzw. feuchten Haaren haften. Öle und Lotionen verringern die Haftung.*

KEINEN ALKOHOL VERWENDEN.

#### Anwendung

- 1 Vor dem Abziehen der Kunststoffolie muss der Hydrokolloidkleber aktiv erwärmt werden. Dazu gibt es u. a. die folgenden Möglichkeiten: Für mindestens 60 Sekunden zwischen den Handflächen wärmen; für 10 - 15 Sekunden an einen Wärmestrahler oder für 10 - 15 Sekunden an einen chemischen Fersenwärmer halten.
- 2 Weißen Papierträger entsorgen. Anschließend die transparente, bedruckte Schutzfolie von der Hydrokolloid-Basis abziehen.
- 3 Basis auf Haut auflegen und 60 Sekunden in Position halten, um sicherzustellen, dass EZ-Hold ordnungsgemäß haftet.
- 4 Die zweite mattierte Schutzfolie abziehen, entsorgen und die Lasche um den Schlauch klappen.

*Hinweis: Lasche nach Bedarf anheben, um den Schlauch neu zu positionieren oder zu entfernen.*

#### Entfernung

- 1 EZ-Hold alle fünf Tage oder entsprechend Krankenhausprotokoll ersetzen, wobei der frühere Zeitpunkt maßgebend ist.
- 2 Lasche anheben, um den Schlauch zu entfernen.
- 3 EZ-Hold mit Wasser oder Salzlösung durchtränken.
- 4 EZ-Hold vorsichtig von der Haut abziehen und die Haut dabei mit Wasser oder Kochsalzlösung abtupfen.



### VORSICHTSMASSNAHMEN & WARNUNGEN

Halter nicht weiterverwenden, wenn eine Hautreizung auftritt.

EZ-Hold haftet nicht ordnungsgemäß an feuchter Haut bzw. feuchten Haaren. Auch Öle und Lotionen verringern die Haftung.

Keinen Alkohol verwenden, um die Haut vor der Anwendung zu reinigen.

Nur für den Einsatz an einem Patienten gedacht.