


## NeoBridge<sup>®</sup>

### PLASTER DO CEWNIKA PĘPOWINOWEGO

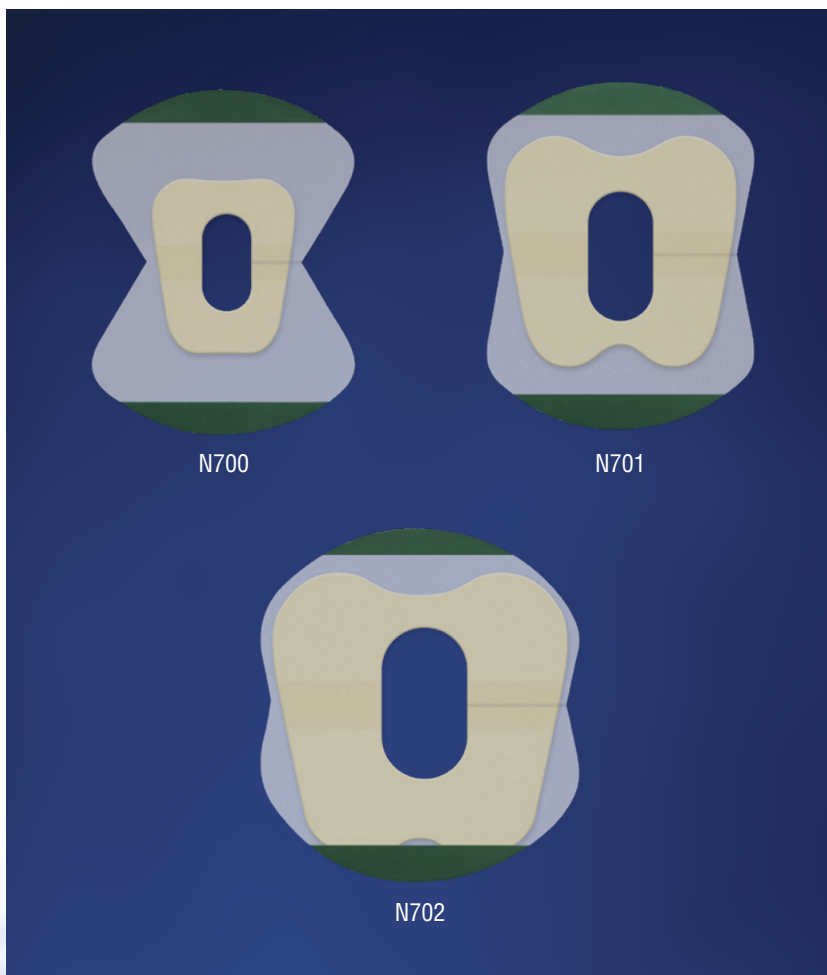

#### CECHY PRODUKTU

- Hydrokoloidowa warstwa NeoBond<sup>®</sup> nieszkodliwa dla skóry
- Skrzydełka zapewniające lepsze zamocowanie, zmniejszające napięcie przewodów i zapobiegające przesunięciu
- Produkt przystosowany do wielokrotnego otwierania i zamykania
- Przezroczyste skrzydełka zapewniające lepszą widoczność
- Produkt wykonany bez użycia kauczuku naturalnego ani zmiękczacza DEHP
- Pakowanie indywidualne

Katalog	Rozmiar	Okolo. waga	Ilość/jednostka
N700	Mikro	800 or less	20/skrzynka
N701	Mały	800-1200 gm	20/skrzynka
N702	Wielki	1200-2200 gm	20/skrzynka

Patent USA #5,370,627



# NeoBridge®

## PLASTER DO CEWNIKA PĘPOWINOWEGO

### ZASTOSOWANIE

Plaster NeoBridge służy do mocowania i podtrzymywania cewników pępowinowych. Produkt przeznaczony do użytku na oddziałach pediatrycznych (noworodki, niemowlęta i dzieci starsze).

### ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

#### Przygotowanie

Po założeniu cewnika oczyść i osusz skórę zgodnie z procedurami szpitalnymi.

*Uwaga: Należy jak najdokładniej oczyścić i osuszyć skórę. Na wilgotnej lub owłosionej skórze plaster NeoBridge nie zostanie prawidłowo zamocowany. Oleje i płyny kosmetyczne również utrudniają prawidłowe mocowanie produktu.*

**NIE WOLNO UŻYWAĆ ALKOHOLU.**

#### Zakładanie

- 1 Klej hydrokoloidowy musi być aktywnie ogrzewany przed usunięciem plastikowej osłonki. Techniki rozgrzewania obejmują: trzymanie między dłońmi przez co najmniej 60 sekund, trzymanie w pobliżu ogrzewacza promiennikowego przez 10-15 sekund lub trzymanie przy chemicznym ogrzewaczu pięt przez 10-15 sekund.
- 2 Usuń białą papierową warstwę ochronną, a następnie usuń przezroczystą plastikową folię z przylepnej warstwy hydrokoloidowej.
- 3 Przełóż cewnik przez środek uchwytu NeoBridge, ustawiając go tak, aby otwór znajdował się z prawej strony, a szerszy koniec bazy hydrokoloidowej był skierowany w stronę głowy pacjenta.
- 4 Umieść przylepną warstwę plastra na skórze i przytrzymaj przez 60 sekund, aby umożliwić prawidłowe przymocowanie.
- 5 Usuń matową osłonę z górnego skrzydełka. Podnieś je i przytwierdź do niego cewnik, tworząc łuk lub kształt litery U, aby zminimalizować napięcie powodowane przez cewnik z boku skrzydełka.

*Uwaga: Nie przytwierdzaj cewnika do zielonego obszaru skrzydełka. Jeśli używasz dwóch cewników, każdy z nich powinien znajdować się po innej stronie skrzydełka.*

- 6 Usuń osłonę z dolnego skrzydełka. Podnieś je i przyłóż zielony obszar dolnej części do zielonego obszaru górnej części, a następnie mocno dociśnij, umieszczając cewnik pomiędzy skrzydełkami.
- 7 Rozdziel skrzydełka, aby usunąć lub przesunąć cewniki zgodnie z wymaganiami, a następnie zamknij skrzydełka.

#### Usuwanie

- 1 Wymieniaj plaster NeoBridge na nowy co 5 dni lub częściej, zależnie od procedur szpitalnych.
- 2 Rozdziel skrzydełka, aby wyjąć cewniki.
- 3 Nasącz plaster NeoBridge wodą lub solą fizjologiczną.
- 4 Powoli oderwij NeoBridge od skóry, jednocześnie przecierając skórę wodą lub solą fizjologiczną.

### PRZESTROGI I OSTRZEŻENIAW

Przepisy federalne zezwalają na sprzedaż tego produktu wyłącznie przez lekarzy lub na ich zlecenie.

Plaster NeoBridge powinien być używany wyłącznie w przypadku pacjentów pozostających pod stałym nadzorem przeszkolonego personelu medycznego.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy zrezygnować z używania produktu.

Na wilgotnej lub owłosionej skórze plaster NeoBridge nie zostanie prawidłowo zamocowany. Oleje i płyny kosmetyczne również utrudniają prawidłowe mocowanie produktu.

Nie wolno czyścić skóry alkoholem przed przymocowaniem produktu.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla pojedynczego pacjenta.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355, USA

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



M749 Rev A