


Oryginalne wyprodukowane w USA

## Little Sucker<sup>®</sup> oraz Little Sucker Cover<sup>®</sup>

Końcówka do odsysania płynów z jamy ustnej i nosa oraz Osłona końcówki do odsysania płynów

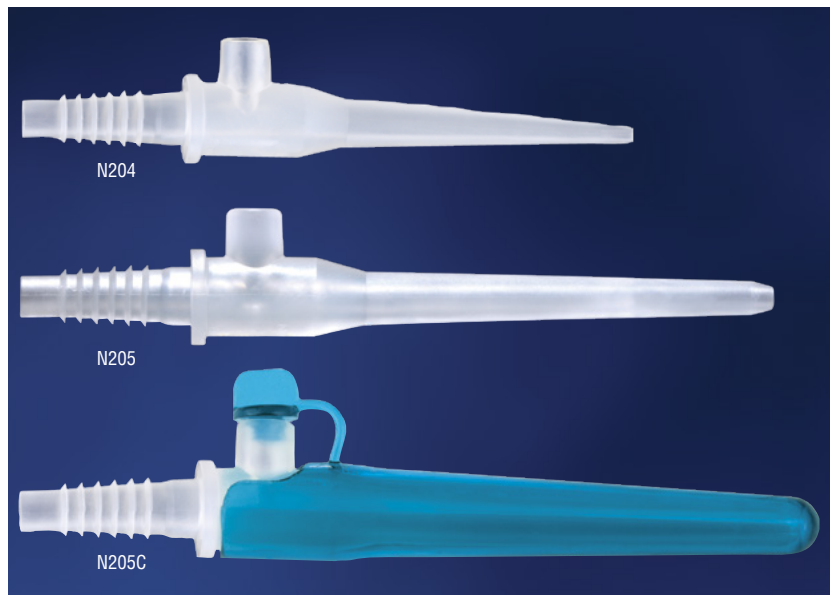

### CECHY PRODUKTU

#### Końcówka Little Sucker

- Umożliwia obsługę wyposażenia odsysającego jedną ręką
- Port umożliwiający aktywację funkcji odsysania kciukiem
- Miękki, elastyczny materiał podobny do używanego do produkcji gruszek medycznych
- Produkt wykonany bez użycia kauczuku naturalnego ani zmiękczacza DEHP

#### Osłona końcówki Little Sucker

- Zapewnia ochronę końcówki Little Sucker przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem
- Jasnoniebieski kolor zapewnia lepszą widoczność
- Kołpak umożliwiający zmniejszenie hałasu
- Produkt wykonany bez użycia kauczuku naturalnego ani zmiękczacza DEHP

Katalog	Przedmiot	Ilość/jednostka
N204	Wcześniak	50/skrzynka
N204C	Preemie z osłoną	50/skrzynka
N204TP	Preemie 2 szt*	50/skrzynka
N205	Standard	50/skrzynka
N205C	Standard z osłoną	50/skrzynka
N205TP	Standard 2 szt*	50/skrzynka
N215	Pokrywa	50/skrzynka

\*2 szt Little Suckers nie są kompatybilne z okładką

Patent USA  
#7,635,361; #D590,056;  
#6,958,050; #D474,269;  
#D655,812

# Little Sucker® oraz Little Sucker Cover®

Końcówka do odsysania płynów z jamy ustnej i nosa oraz Osłona końcówki do odsysania płynów

## ZASTOSOWANIE

Little Sucker jest końcówką przeznaczoną do użytku z przewodem odsysającym płyny z jamy ustnej i nosa.

Osłona zapewnia do ochronę końcówki Little Sucker do odsysania płynów z jamy ustnej i nosa.

## ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- 1 Przy założonej osłonie (dotyczy N204C/N205C) zdejmij kołpak z portu i wysuń końcówkę ssącą z osłony.
- 2 Podłącz przewód ssawny do karbowanego złącza końcówki ssącej.
- 3 Wyreguluj siłę ssania zgodnie z procedurami szpitalnymi lub zaleceniami lekarza.
- 4 Zamknij port kciukiem, aby uaktywnić funkcję odsysania.
- 5 Ssanie w jamie ustnej lub nozdrzach z przerywanym odsysaniem. Zdejmij kciuk z portu, aby przerwać odsysanie. Zablokuj ponownie port, aby kontynuować odsysanie
- 6 Po każdym użyciu odsysaj wodę sterylną przy użyciu końcówki ssącej, aby pozbyć się zanieczyszczeń.
- 7 W stosownych przypadkach umieść ponownie końcówkę ssącą w osłonie i załóż kołpak osłony na port końcówki ssącej.
- 8 Wymieniaj końcówkę ssącą i osłonę na nową co 24 godziny lub częściej, zależnie od procedur szpitalnych.

## PRZESTROGI I OSTRZEŻENIAW

Przepisy federalne zezwalają na sprzedaż tego wyrobu wyłącznie przez lekarza lub na jego zlecenie.

Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania w jamie ustnej i nosowej.

Umieszczenie końcówki zbyt głęboko w jamie ustnej lub nozdrzach może spowodować zranienie.

Należy chronić końcówkę ssącą i osłonę przed zanieczyszczeniem.

Osłona Little Sucker jest zaprojektowana specjalnie do użytku z końcówką Little Sucker do odsysania płynów z jamy ustnej i nosa. Może nie być odpowiednia do innych końcówek do odsysania płynów. Osłona nie jest przeznaczona do użytku z dwuczęściową końcówką Little Sucker ani końcówką Little Sucker Nasal Tip.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla pojedynczego pacjenta.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355, USA

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



Wyprodukowano w USA

M753 Rev A