


Das Original aus den USA

## Little Sucker<sup>®</sup> Nasal Tip

NASAL-SAUGER

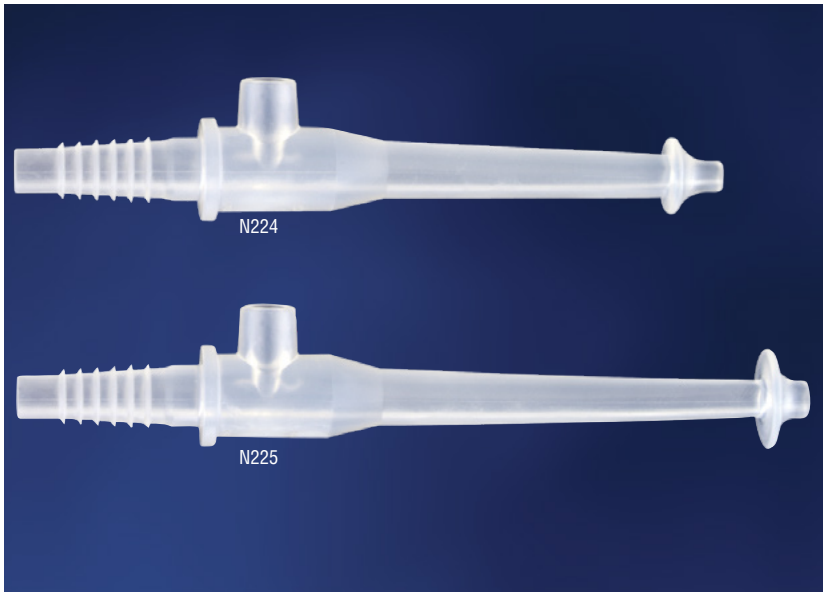

### MERKMALE & VORTEILE

- Spezielle Spitze zur Minimierung potentieller Gewebeerletzungen
- Ausgelegt für das Saugen mit einer Hand
- Daumenöffnung erlaubt intermittierendes Saugen
- Weiche, flexible Spitze wie bei einer Ballspritze
- Ohne Naturkautschuklatex oder DEHP-Weichmacher
- Einzeln verpackt

Katalog	Artikel	Mengeneinheit
N224	Nasenspitze für Frühchen	50/kasten
N224TP	Frühchen 2-tlg	50/kasten
N225	Standard Nasenspitze	50/kasten
N225TP	Standard 2-teilig	50/kasten



U.S. Patent

#7,635,361; # D668,757;

#6,958,050; #D474,269



# Little Sucker® Nasal Tip

## NASAL-SAUGER

### GEBRAUCHSHINWEIS

Der Little Sucker Nasal Tip ist für den Einsatz als Saugspitze für die Absaugung von Flüssigkeiten aus den Nasenlöchern bestimmt.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1 Das mit Widerhaken versehene Ende der Absaugspitze mit der Absaugleitung verbinden.
- 2 Den richtigen Saugdruck entsprechend Krankenhausprotokoll oder Empfehlung des Arztes einstellen.
- 3 Daumen auf die Öffnung legen, um mit dem Saugen zu beginnen.
- 4 Mund und Nasenöffnungen durch intermittierendes Saugen absaugen. Zum Beenden des Saugens den Daumen von der Daumenöffnung nehmen. Daumen wieder auf die Öffnung legen, um mit dem Saugen fortzufahren.
- 5 Nach jedem Gebrauch steriles Wasser durch die Absaugspitze absaugen, um Verschmutzungen zu entfernen.
- 6 Die Absaugspitze/-abdeckung alle 24 Stunden oder je nach üblichen Verfahren im Krankenhaus ersetzen, wobei das frühere Datum maßgebend ist.

### VORSICHTSMASSNAHMEN & WARNUNGEN

Nach Bundesgesetz darf dieses Gerät nur von einem Arzt oder auf Verordnung eines Arztes verkauft werden.

Ausschließlich zur oralen oder nasalen Anwendung bestimmt.

Die zu weite Einführung der Absaugspitze in den Mund oder in die Nasenlöcher kann zu Gewebeverletzungen führen.

Die Absaugspitze/-abdeckung sollte frei von Ablagerungen bleiben.

Die Little Sucker-Abdeckung ist speziell für die Verwendung mit dem Little Sucker-Oral oder Nasal-Sauger ausgelegt. Eventuell kann diese Halterung andere Sauger nicht aufnehmen. Sie eignet sich nicht für den 2-teiligen Little Sucker oder für Little Sucker Nasal Tip.

Nur für den Einsatz an einem Patienten gedacht.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA, 91355

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



M755 Rev A