


Originál vyrobený v USA

Odsávačka Little Sucker[®] s Nazální Špičkou

NOSNÍ ODSÁVAČKA

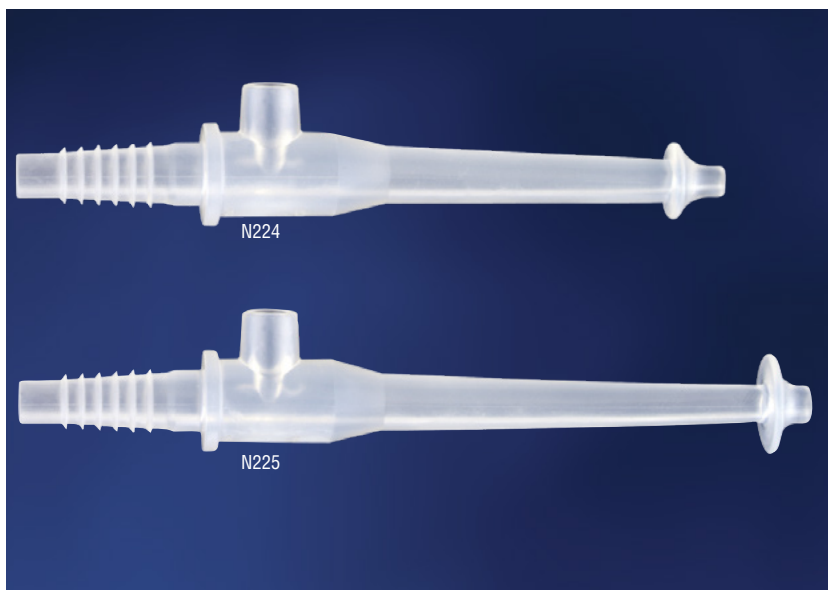

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Speciální špička navržena tak, aby se minimalizovalo potenciální poškození tkáně
- Navrženo pro odsávání jednou rukou
- Otvor pro palec pro přerušované odsávání
- Měkká, pružná špička obdobná jako u stříkačky s balónkem
- Není vyrobeno z přírodního latexu ani změkčovadla DEHP
- Baleno jednotlivě

Katalog	Položka	Množství/jednota
N224	Nosní špička preemie	50/krabice
N224TP	Preemie 2-dílný	50/krabice
N225	Standardní nosní špička	50/krabice
N225TP	Standard 2-dílný	50/krabice



U.S. Patent

#7,635,361; # D668,757;

#6,958,050; #D474,269



Odsávačka Little Sucker® s Nazální Špičkou

NOSNÍ ODSÁVAČKA

INDIKACE PRO POUŽITÍ

Odsávačka Little Sucker s nazální špičkou je určena k použití jako hrot odsávačky pro odsávání tekutin z nosních dírek.

NÁVOD K POUŽITÍ

- 1 Konec s výčnělky odsávačky připojte k sacímu vedení.
- 2 Nastavte sání na příslušný tlak podle zavedených postupů nemocnice nebo podle doporučení lékaře.
- 3 Ucpěte palcem otvor a začněte odsávat.
- 4 Přerušovaným odsáváním odsajte tekutinu z úst nebo nosních dírek. Vytáhněte palec z otvoru na palec, abyste zastavili odsávání. Chcete-li v odsávání pokračovat, znovu ucpěte otvor na palec.
- 5 Po každém použití nasajte odsávačkou sterilní vodu pro odstranění nečistot.
- 6 Odsávačku a ochranný kryt vyměňujte každých 24 hodin nebo podle zavedených postupů nemocnice podle toho, co nastane dříve.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Federální zákon (USA) omezuje prodej tohoto zařízení lékařem.

Pouze pro orální nebo nazální použití.

Pokud hrot odsávačky vložíte příliš hluboko do úst nebo nosních dírek, můžete poranit tkáň.

Hrot odsávačky a ochranný kryt by měly zůstat čisté.

Kryt Little Sucker je určen pro použití s ústním a nosním sacím zařízením Little Sucker. Pro jiná sací zařízení nemusí být vhodný. Není určen pro použití s dvoudílným zařízením Little Sucker 2-piece ani s nosním nástavcem Little Sucker Nasal Tip.

Pouze pro jednoho pacienta.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA, 91355 USA

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



M756 Rev A