

# NeoSmile<sup>™</sup>

## PROTECTION POUR SONDE THERMIQUE



### FONCTIONS ET AVANTAGES

- Base hydrocolloïde hypoallergénique NeoBond<sup>®</sup>
- Pouvoir adhésif longue durée
- Le revêtement réfléchissant permet de protéger contre la chaleur ambiante et rayonnante
- Imprimé smiley
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et sans plastifiant DEHP

| Catalogue | Taille      | Qté/Unité |
|-----------|-------------|-----------|
| N731      | 1" Diamètre | 150/boîte |

## PROTECTION POUR SONDE THERMIQUE

### INDICATIONS D'UTILISATION

Le NeoSmile permet d'assujettir une sonde thermique et de la protéger.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

#### Préparation

Nettoyer et sécher la peau là où NeoSmile sera placé conformément au protocole hospitalier.

*Remarque : il est important de maintenir la peau aussi propre et sèche que possible. Les supports NeoSmile n'adhèrent pas correctement à la peau humide ou aux cheveux. Les huiles et lotions rendent également l'adhérence plus difficile.*

N'UTILISEZ PAS D'ALCOOL.

#### Application

- 1 Avant de retirer le film protecteur en plastique, les languettes adhésives hydrocolloïdes doivent être bien réchauffées. Vous pouvez les réchauffer en utilisant les techniques suivantes : les tenir entre les paumes des mains pendant au moins 60 secondes, les tenir près d'un chauffage rayonnant pendant 10 à 15 secondes, ou les tenir contre un chauffe-talon pendant 10 à 15 secondes.
- 2 Retirez et jetez le film protecteur. Posez le NeoSmile afin de couvrir la sonde et la peau, puis maintenez-le en place pendant 60 secondes pour garantir une bonne adhérence.

#### Retrait

- 1 Remplacez NeoSmile tous les cinq jours ou à la fréquence indiquée par le protocole hospitalier, selon la première éventualité.
- 2 Imbibez le NeoSmile d'eau ou de solution physiologique.
- 3 Décoller doucement NeoSmile de la peau en la tamponnant avec de l'eau ou du sérum physiologique.

### PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Cessez l'utilisation immédiatement si une irritation cutanée se produit.

Le NeoSmile n'adhère pas correctement à la peau humide ou aux cheveux. Les huiles et lotions rendent également l'adhérence plus difficile.

N'utilisez pas d'alcool pour nettoyer la peau avant application.

Ne réutilisez pas le produit et ne le réappliquez pas.

À usage unique exclusivement.