

NeoSmile[™] Hydrogel

FUNDA PARA SONDAS TÉRMICAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- La lámina reflectante ayuda a proteger contra el calor ambiental y radiante
- Bonito diseño de cara sonriente
- Base adhesiva de gel de silicona que no daña la piel
- Cambie de posición según sea necesario
- No fabricado con látex de caucho natural o plastificados DEHP
- Empaquetado individualmente

Número	Talla	Cantidad/Unidad
N7321	1" Diámetro	75/caja



Hecho en EEUU

NeoSmile™ Hydrogel

FUNDA PARA SONDAS TÉRMICAS

INDICACIONES DE USO

La funda NeoSmile está diseñada para cubrir y fijar sondas térmicas.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación

Limpie y seque la piel conforme al protocolo hospitalario.

Nota: Es importante que la piel esté lo más limpia y seca posible. NeoSmile no se adherirá adecuadamente a piel o cabello húmedo. Los aceites y las lociones también afectarán de forma negativa a la adhesión.

NO USE ALCOHOL.

Aplicación

- 1 Retire y deseche el recubrimiento. Coloque NeoSmile Hydrogel sobre la sonda y la piel.
- 2 Cambie el NeoSmile Hydrogel de posición según sea necesario.

Nota: Si el adhesivo ya no adhiere, añada una gota de agua (no solución salina) al hidrogel y vuelva a aplicar.

Extracción

- 1 Sustituya el NeoSmile Hydrogel cada 3 días o cuando lo indique el protocolo hospitalario, lo que ocurra primero.
- 2 Levante suavemente el borde del NeoSmile y despéguelo lentamente. Se puede aplicar agua o solución salina en el borde para aflojar la adhesión.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Interrompere immediatamente in caso di irritazione cutanea.

NeoSmile no se adherirá adecuadamente a piel o cabello húmedo. Los aceites y las lociones también afectarán de forma negativa a la adhesión.

No use alcohol para limpiar la piel antes de la aplicación.

Para uso en un solo paciente.



Para información o muestras GRATIS
1-800-966-0500 • neotechproducts.com
Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355

