


Neotech Bridge[®]

DISPOSITIVO DE ASSISTÊNCIA DE AMAMENTAÇÃO

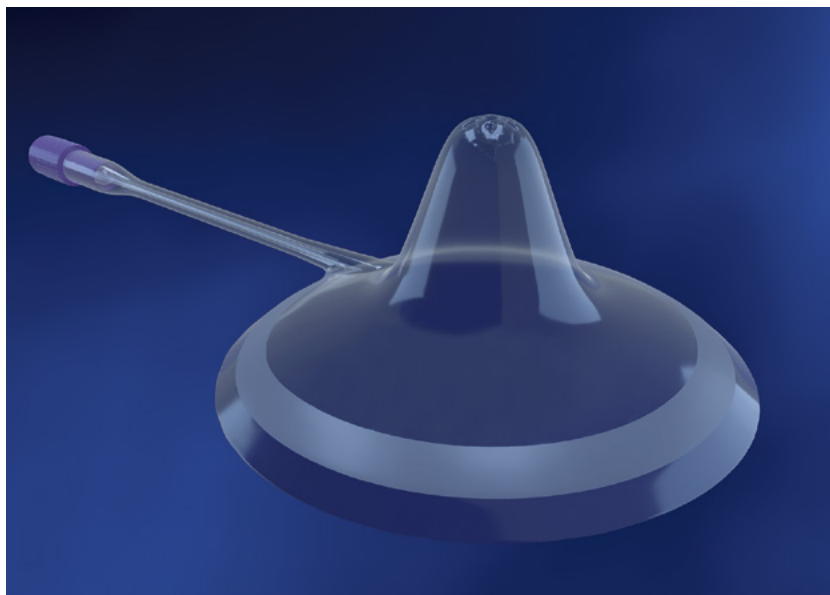

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Permite a suplementação enquanto amamenta, ajudando a estimular a produção de leite natural
- Evita as interrupções na amamentação que levam a problemas de pega do peito e de fornecimento
- Pode ser utilizado para fornecer colostro, leite materno, leite humano fortificado ou fórmula
- A válvula unidirecional evita o refluxo e ajuda a maximizar a produção natural de leite
- Permite um controlo preciso do fluxo do suplemento, taxa e tempo
- Proporciona uma superfície para que o bebé pegue o peito
- Ajudar a manter o contacto com a pele
- Silicone fino de grau médico para uma sensação mais natural
- Não fabricado com látex de borracha natural ou plastificante DEHP

Número	Item	Qtd/Unidade
N8001-5	Bridge	5/caixa
N8001-30	Bridge	30/caixa
N8001-KT*	Conjunto	1/caixa

*Inclui Bridge, extensão, seringa de 20 ml e seringa de 60 ml.

O N8001-KT não está disponível para venda em todos os países. Entre em contacto o seu distribuidor Neotech para obter mais informações.

Patente dos EUA

#12,083,07, #D967,433; #D914,892; Adicional Pendente

Neotech Bridge®

DISPOSITIVO DE ASSISTÊNCIA DE AMAMENTAÇÃO

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O Neotech Bridge é um dispositivo de assistência de amamentação com o objetivo de fornecer nutrientes adicionais a um paciente pediátrico agarrado à mama/peito.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1 Encha a seringa (vendido separadamente para N8001-5 e N8001-30) com leite ou fórmula e vire no conector roxo Neotech Bridge.
- 2 Vire o Bridge ao contrário e coloque no centro do mamilo. Dobre o Bridge no peito para criar um selamento.
- 3 Agarre o bebé no Bridge.
- 4 Pressione a seringa para proporcionar leite conforme necessário.
- 5 Limpe após cada utilização e desinfete diariamente, de acordo com as instruções. Substitua o Bridge após uma semana ou 20 lavagens, o que acontecer mais cedo.

Limpeza

Limpe imediatamente após cada utilização.

- 1 Separe e enxágue todas as peças, incluindo o êmbolo da seringa, dentro de água para eliminar os resíduos de leite.
- 2 Mergulhe todas as peças separadas em água morna com sabão durante 5 minutos.
- 3 Insira novamente o êmbolo na seringa e encha-o com água morna com sabão. Ligue ao Bridge Bridge e ao tubo de extensão (se utilizado; não incluído para N8001-5 e N8001-30). Enxágue e repita várias vezes.
- 4 Encha a seringa com água limpa e volte a ligar ao Bridge e ao tubo de extensão (se usado). Enxágue e repita várias vezes.
- 5 Encha a seringa com ar e volte a ligar ao Bridge e ao tubo de extensão (se usado). Force várias vezes o ar através do tubo para remover gotas de água.
- 6 Desconecte todas as peças, incluindo o êmbolo da seringa e coloque numa superfície limpa e seca e deixe secar ao ar. Guarde as peças secas num saco de plástico/recipiente quando não estiverem a ser utilizadas.

Precaução: Não seque os componentes com papel de cozinha ou semelhante pois poderá diminuir o tempo de vida do dispositivo. Não guarde as peças molhadas ou húmidas.

Desinfecção

Desinfete uma vez por dia. Não utilize esterilizantes ou o microondas.

- 1 Separe e enxágue todas as peças, incluindo o êmbolo da seringa, debaixo de água para eliminar os resíduos de leite.
- 2 Encha uma panela com 8 copos de água potável e ferva.
- 3 Desligue a fonte de calor e deixe que a água a ferver arrefeça durante não menos de dois minutos e meio.
- 4 Coloque as peças separadas na água e deixe que mergulhem durante 10 minutos.
- 5 Deixe que a água arrefeça e remova cuidadosamente da água as peças com pinças.
- 6 Coloque as peças numa superfície limpa e seca e deixe secar ao ar. Guarde as peças secas num saco de plástico/recipiente quando não estiverem a ser utilizadas.

Precaução: Não seque os componentes com papel de cozinha ou semelhante pois poderá diminuir o tempo de vida do dispositivo. Não guarde as peças molhadas ou húmidas.

- CONTRA-INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS -

O Bridge não deverá ser usado se existir uma contra-indicação médica para a amamentação. Se não tiver a certeza, consulte o seu médico.

Não deixe que os conteúdos adicionais sequem dentro da seringa antes de lavar.

Separe e lave todas as peças que entram em contacto com o peito, leite materno ou suplementos imediatamente após a sua utilização para evitar que os resíduos de leite sequem e para evitar o surgimento de bactérias.

Utilize apenas água da torneira potável ou engarrafada para a limpeza.

Não esfregue os componentes da seringa.

Não exponha a calor extremo.

Não seque os componentes com papel de cozinha ou semelhante. Não guarde as peças molhadas ou húmidas.

Siga as instruções de limpeza fornecidas pela Neotech Products.

Certified



Corporation

Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2025 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech. M772 Rev C 2025.02.01