


# Neotech Bridge<sup>®</sup>

## URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE KARMIENIE PIERSIĄ

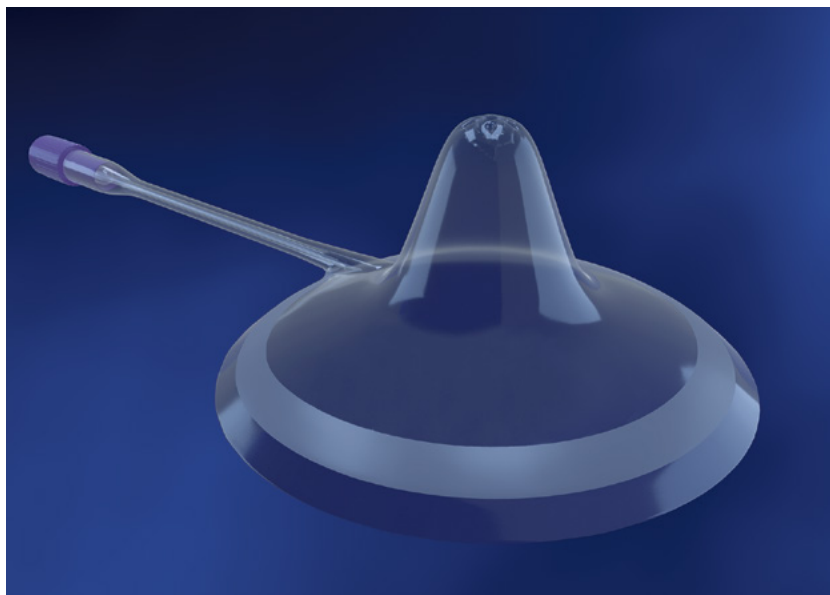

### CECHY PRODUKTU

- Umożliwia suplementację podczas karmienia piersią, co pomaga stymulować naturalną produkcję mleka
- Zapobiega przerwom w karmieniu piersią, które mogą prowadzić do problemów z przystawieniem i produkcją pokarmu
- Może być używany do podawania siary, odciągniętego mleka, wzbogaconego mleka ludzkiego lub mieszanki w razie potrzeby
- Jednokierunkowy zawór zapobiega przepływowi wstecznemu i pomaga zmaksymalizować naturalny wypływ mleka
- Umożliwia precyzyjną kontrolę przepływu, szybkości i czasu podawania pokarmu
- Zapewnia powierzchnię do przystawienia dziecka
- Pomaga utrzymać kontakt skóra do skóry
- Cienki silikon medyczny zapewniający bardziej naturalne odczucia
- Produkt wykonany bez użycia kauczuku naturalnego ani zmiękczacza DEHP

Katalog nr	Przedmiot	Ilość/Jednos
N8001-5	Bridge	5/skrzynka
N8001-30	Bridge	30/skrzynka
N8001-KT*	Zestaw	1/skrzynka

\*Zawiera Bridge, przedłużenie, strzykawkę 20 ml i strzykawkę 60 ml

**N8001-KT nie jest dostępny w sprzedaży we wszystkich krajach. Proszę o kontakt skontaktuj się z dystrybutorem Neotech, aby uzyskać więcej informacji.**

Patent USA

#12,083,074; #D967,443; #D914,892; Dodatkowe oczekujące

# Neotech Bridge®

## URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE KARMIENIE PIERSIĄ

### ZASTOSOWANIE

Neotech Bridge to urządzenie wspomagające karmienie piersią. Pozwala podać dodatkowy pokarm niemowlęciu przystawionemu do piersi.

### ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- 1 Napełnij strzykawkę (sprzedawaną oddzielnie dla N8001-5 i N8001-30) mlekiem lub mieszanką i przykręć do fioletowego złącza Neotech Bridge.
- 2 Odwróć nakładkę Bridge i umieść nad brodawką. Przyłóż nakładkę Bridge tak, aby szczelnie przysssała się do piersi.
- 3 Przystaw dziecko do nakładki Bridge.
- 4 W razie potrzeby naciśnij strzykawkę, aby podać mleko.
- 5 Czyść po każdym użyciu i dezynfekuj codziennie, zgodnie z zaleceniami. Nakładkę Bridge należy wymienić po tygodniu lub 20 myciach w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

### Czyszczenie

Wyczyść natychmiast po każdym użyciu.

- 1 Rozmontuj i opłucz wszystkie części – w tym tłok strzykawki – pod bieżącą wodą, aby usunąć pozostałości mleka.
- 2 Namocz wszystkie części osobno w ciepłej wodzie z mydłem przez 5 minut.
- 3 Ponownie włóż tłok do strzykawki i napełnij ją ciepłą wodą z mydłem. Podłącz do nakładki Bridge i rurki przedłużającej (jeśli jest używana; niedołączona dla N8001-5 i N8001-30). Przepłucz i powtórz czynność kilka razy.
- 4 Napełnij strzykawkę czystą wodą i ponownie podłącz do nakładki Bridge i rurki przedłużającej (jeśli jest używana). Przepłucz i powtórz czynność kilka razy.
- 5 Napełnij strzykawkę powietrzem i ponownie podłącz do nakładki Bridge i rurki przedłużającej (jeśli jest używana). Kilkakrotnie przepuść powietrze przez rurkę, aby usunąć kropelki wody.
- 6 Odłącz wszystkie części – w tym tłok strzykawki. Umieść na czystej, suchej powierzchni i pozostaw do wyschnięcia. Po osuszeniu przechowuj nieużywane części w plastikowej torbie/pojemniku.

*Przeostroga: Nie osuszaj części ręcznikiem papierowym lub podobnym materiałem, ponieważ skróci to żywotność urządzenia. Pamiętaj o osuszeniu części przed ich przechowywaniem.*

### Dezynfekcja

Dezynfekuj raz dziennie. Nie używaj do tego celu sterylizatorów ani kuchenki mikrofalowej.

- 1 Rozmontuj i opłucz wszystkie części – w tym tłok strzykawki – pod bieżącą wodą, aby zmyć pozostałości mleka.
- 2 Wlej do garnka 8 szklanek wody pitnej i doprowadź do wrzenia.
- 3 Wyłącz źródło ciepła i poczekaj co najmniej dwie i pół minuty, aż woda ostygnie.
- 4 Włóż wszystkie części osobno do wody i namocz przez 10 minut.
- 5 Poczekaj, aż woda w otwartym naczyniu ostygnie i delikatnie wyjmij części z wody przy pomocy szczypiec.
- 6 Umieść części na czystej, suchej powierzchni i pozostaw do wyschnięcia. Po osuszeniu przechowuj nieużywane części w plastikowej torbie/pojemniku.

*Przeostroga: Nie osuszaj części ręcznikiem papierowym lub podobnym materiałem, ponieważ skróci to żywotność urządzenia. Pamiętaj o osuszeniu części przed ich przechowywaniem.*

### — PRZECIWWSKAZANIA, PRZESTROGI I OSTRZEŻENIA —

Nie należy stosować nakładki Bridge, jeśli istnieją medyczne przeciwwskazania do karmienia piersią. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

Nie dopuszczaj do wyschnięcia zawartości suplementu w strzykawce przed jej umyciem.

Natychmiast po użyciu rozmontuj i umyj wszystkie części mające kontakt z piersią, mlekiem matki lub suplementem, aby uniknąć zaschnięcia pozostałości mleka i zapobiec rozwojowi bakterii.

Do czyszczenia używaj wyłącznie wody pitnej z kranu lub wody butelkowanej.

Nie szoruj elementów strzykawki.

Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.

Nie osuszaj części ręcznikiem papierowym ani podobnym materiałem. Pamiętaj o osuszeniu części przed ich przechowywaniem.

Postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia Neotech Products.

Certified



Corporation

Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2025 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech. M789 Rev B 2025.05.01