


## NeoSnug

### SOPORTE PARA TUBOS

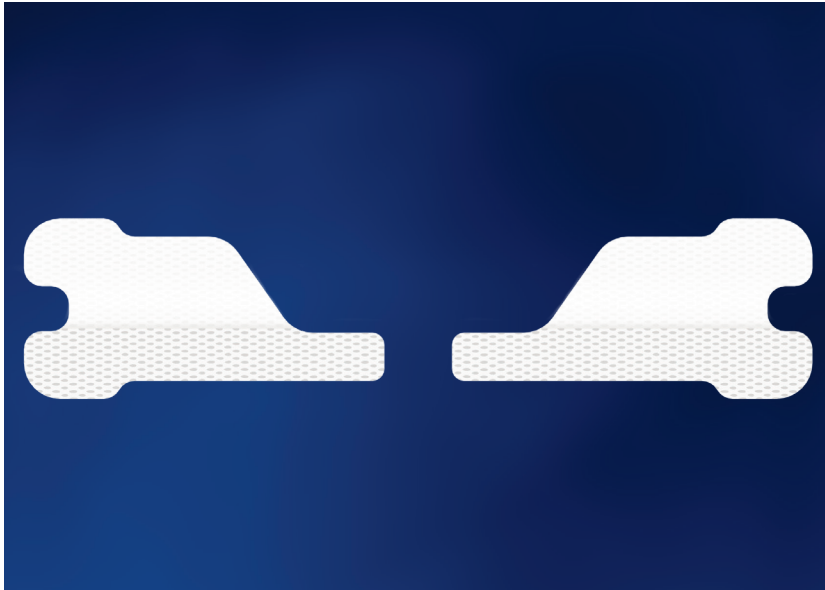

#### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Base adhesiva de hidrocoloide NeoBond<sup>®</sup> que no daña la piel
- Solapa plegable diseñada para evitar presión en los tubos
- Solapa de sujeción permanente que fija los tubos en su sitio
- Forma única que permite fijar los tubos cerca de las fosas nasales
- Tela no tejida que se amolda a la cara o el cuerpo
- Juego de dos unidades con soporte para tubos izquierdo y derecho

| CAT. #   | SIZE    | QTY/UNIT |
|----------|---------|----------|
| N7015-15 | Pequeña | 30/caja* |

\*15 juegos de 2 (izquierda/derecha)

Patente pendiente



# NeoSnug

## SOPORTE PARA TUBOS

### INDICACIONES DE USO

NeoSnug está previsto para sujetar, asegurar y mantener los tubos gastrointestinales en la piel de los pacientes.

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Preparación

Limpie y seque la piel donde se colocará el NeoSnug conforme al protocolo hospitalario.

*Nota: Es importante que la piel esté lo más limpia y seca posible. NeoSnug no se adhiere adecuadamente a la piel o el cabello húmedos. Los aceites y las lociones también afectarán de forma negativa a la adhesión.*

NO USE ALCOHOL.

#### Aplicación

- 1 Antes de quitar el recubrimiento plástico, el adhesivo hidrocoloide debe calentarse activamente. Las técnicas de calentamiento incluyen: sostener entre las palmas de las manos durante al menos 60 segundos, sostener cerca de un calentador radiante durante 10 a 15 segundos o sostener contra un calentador químico para talones durante 10 a 15 segundos.
- 2 Uno a la vez, despegue el NeoSnug del recubrimiento impreso transparente, colóquelo sobre la piel y manténgalo en su lugar durante 60 segundos para garantizar una adhesión adecuada.
- 3 Pliegue hacia abajo la solapa y retire el recubrimiento blanco de papel marcado con "1" de la base del NeoSnug. La superficie adhesiva quedará expuesta.
- 4 Coloque el tubo a lo largo de la base.
- 5 Retire de la solapa el recubrimiento blanco de papel marcado con "2" y pliegue la solapa sobre el tubo para fijarlo.

*Nota: Una vez cerrada, la solapa del NeoSnug está diseñada para permanecer fija en su sitio. No se puede abrir y cerrar varias veces.*

### Extracción

- 1 Sustituya el NeoSnug y el tubo conectado cada 5 días o cuando lo indique el protocolo hospitalario, lo que ocurra antes.
- 2 Con el tubo aún fijado, sature el NeoSnug con agua o solución salina.
- 3 Retire lentamente el NeoSnug de la piel mientras limpia la piel con agua o solución salina.
- 4 Retire el tubo según el protocolo hospitalario y deséchelo junto con el NeoSnug.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Las leyes federales restringen la venta de este dispositivo a un médico o según sus indicaciones.

Peligro de asfixia. El NeoSnug solo debe utilizarse mientras el paciente esté bajo la supervisión directa y continua de un profesional sanitario cualificado.

Riesgo de ingestión o aspiración.

Interrumpa el uso de inmediato si se presenta irritación en la piel.

NeoSnug no se adhiere adecuadamente a la piel o el cabello húmedos. Los aceites y las lociones también afectarán de forma negativa a la adhesión.

No use alcohol para limpiar la piel antes de la aplicación.

Desechable. No reutilizar.

Para uso en un solo paciente.

Certified



Corporation

Para información o muestras GRATIS

1-800-966-0500 • [neotechproducts.com](http://neotechproducts.com)

Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355

©2023 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



Hecho en EEUU

M771 Rev A