

Neotech Ocular Exam Kit


ESPÉCULO E DEPRESSOR DESCARTÁVEIS



— CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS —

- Descartável, estéril e pronto a usar
- Espéculo único criado para:
 - Se colocar na posição certa com pressão palpebral
 - Permitir visualização irrestrita
 - Abrir e fechar com facilidade
- Espéculo disponível em dois tamanhos
- Espéculo neonatal (N6500, N6501, N6502) ideal para exame RDP
- Depressor de dupla face com textura inovadora destinada a prender suavemente a conjuntiva
- Não fabricado em látex de borracha natural ou plastificante DEHP
- Embalado individualmente

Número	Item	Qtd/Unidade
N6501	Espéculo/Depressor Neonatal	10/caixa
N6511	Espéculo/Depressor Padrão	10/caixa

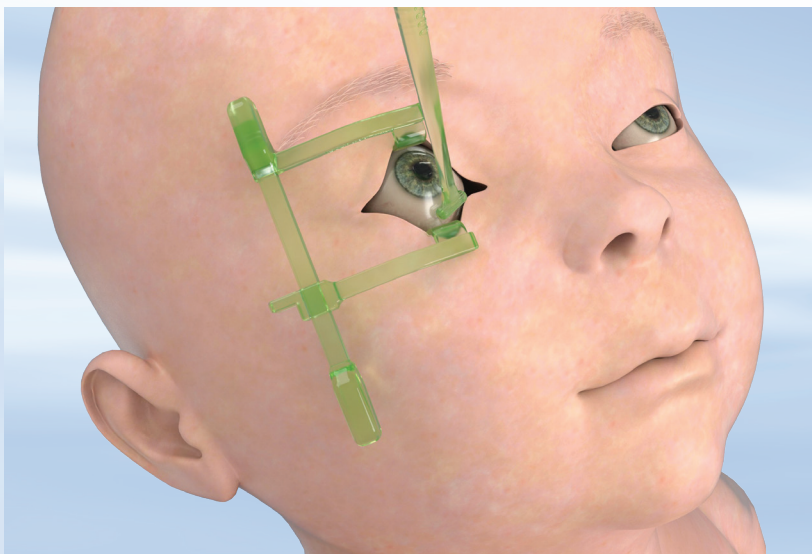

Patente dos EUA #9,289,199



Neotech Ocular Exam Kit

ESPÉCULO E DEPRESSOR DESCARTÁVEIS

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O Kit de Exame Ocular da Neotech destina-se a ajudar nos exames oculares.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1 Mova o braço deslizante para a posição fechada.
- 2 Insira as lâminas curvas sob as margens das pálpebras superior e inferior.
- 3 Mova o braço deslizante para abrir as pálpebras para o espaçamento desejado e solte.
- 4 Use o depressor para ajudar na visualização.
- 5 Passe o braço deslizante para a posição fechada e remova as lâminas curvas das margens da pálpebra.
- 6 Deite o espéculo e o depressor fora.

Exame Bilateral

Repita os passos acima com o segundo espéculo e depressor.

Precaução: Para evitar contaminação cruzada, use um conjunto de instrumentos por olho.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Segundo a legislação em vigor, a venda deste dispositivo está sujeita a receita ou indicação médica.

O Kit de Exame Ocular Neotech só deve ser usado em pacientes sob supervisão contínua e direta de profissionais de saúde.

Para evitar contaminação cruzada, use um conjunto de instrumentos por olho.

Pressão excessiva no olho pode causar trauma na conjuntiva.

Não use se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Não use um único espéculo e/ou depressor para os dois olhos.

Utilize apenas uma vez, num único paciente.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2023 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.

