

Hold-A-Line[™]

SUPOORTE DE CATETER E DE TUBOS



— CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS —

- Base hidrocolóide NeoBond[®] confortável para a pele
- Abas de posicionamento seguras projetadas para aliviar a tensão nos tubos e ajudar a evitar o deslocamento
- Formato único que permite coto umbilical saliente
- Aba concebida para ser aberta e fechada repetidamente
- Aba transparente para uma maior visibilidade
- Não fabricada com látex de borracha natural ou plastificante DEHP

| Número | Item | Qtd/Unidade |
|--------|--------|-------------|
| N705 | Padrão | 40/caixa |



Hold-A-Line™

SUORTE DE CATETER E DE TUBOS

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O Hold-A-Line foi concebido para ancorar e suportar cateteres e tubos umbilicais. Concebido para utilização em pacientes pediátricos (recém-nascidos, bebês e crianças).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação

Depois de posicionar o cateter ou o tubo, limpe e seque a pele de acordo com o protocolo hospitalar.

Nota: É importante assegurar que a pele esteja o mais limpa e seca possível. O Hold-A-Line não adere devidamente à pele ou cabelo húmidos. A presença de óleos e loções também afeta adversamente a aderência.

NÃO UTILIZAR ÁLCOOL.

Aplicação

- 1 Antes de remover o revestimento plástico, o adesivo hidrocolóide deve ser aquecido ativamente. As técnicas de aquecimento incluem: segurar entre as palmas das mãos por pelo menos 60 segundos, segurar perto de um aquecedor radiador por 10 a 15 segundos ou segurar contra um aquecedor químico pequeno por 10 a 15 segundos.
- 2 Deite o forro de papel branco fora, em seguida descole e descarte o revestimento plástico transparente da base hidrocolóide.
- 3 Aplique a base sobre a pele e mantenha no sítio durante 60 segundos, para garantir a devida aderência.
- 4 Descole e descarte o revestimento fosco e cole o cateter ou tubo à base.
- 5 Dobre a aba sobre o cateter ou tubo, alinhe com a base e pressione-os firmemente um contra o outro, colocando o cateter ou o tubo entre os adesivos.
- 6 Levante a aba conforme necessário para reposicionar ou remover o tubo ou o cateter.

Remoção

- 1 Substitua o Hold-A-Line a cada 5 dias ou segundo o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro.
- 2 Levante a aba para remover a tubulação.
- 3 Sature o Hold-A-Line com água ou soro fisiológico.
- 4 Descole lentamente o Hold-A-Line da pele com a ajuda de uma compressa embebida em água ou soro fisiológico.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Segundo a legislação em vigor, a venda deste dispositivo está sujeita a receita ou indicação médica.

O Hold-A-Line só deve ser usado em pacientes sob supervisão contínua e direta de profissionais de saúde.

Descontinuar imediatamente a utilização em caso de irritação cutânea.

O Hold-A-Line não aderem devidamente a pele ou cabelo húmidos.

A presença de óleos e loções afeta adversamente a aderência. A presença de óleos e loções afeta adversamente a aderência.

Não utilizar álcool para limpar a pele, antes da aplicação.

Utilizar apenas num único paciente.

