
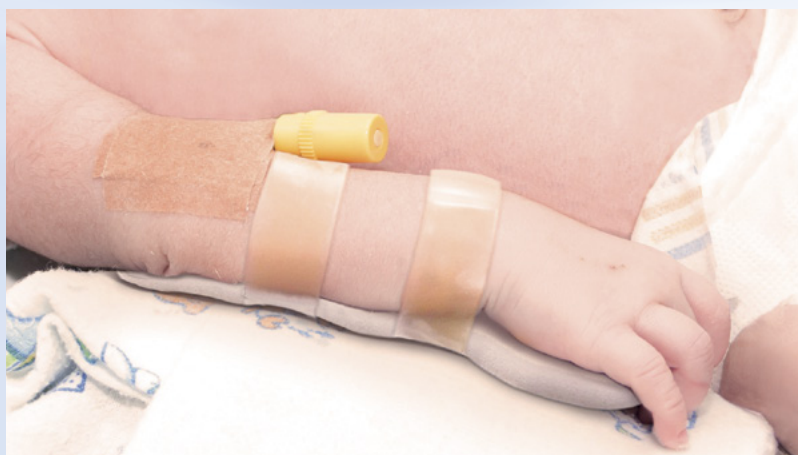


NeoBond®

ADESIVO HIDROCOLOIDE

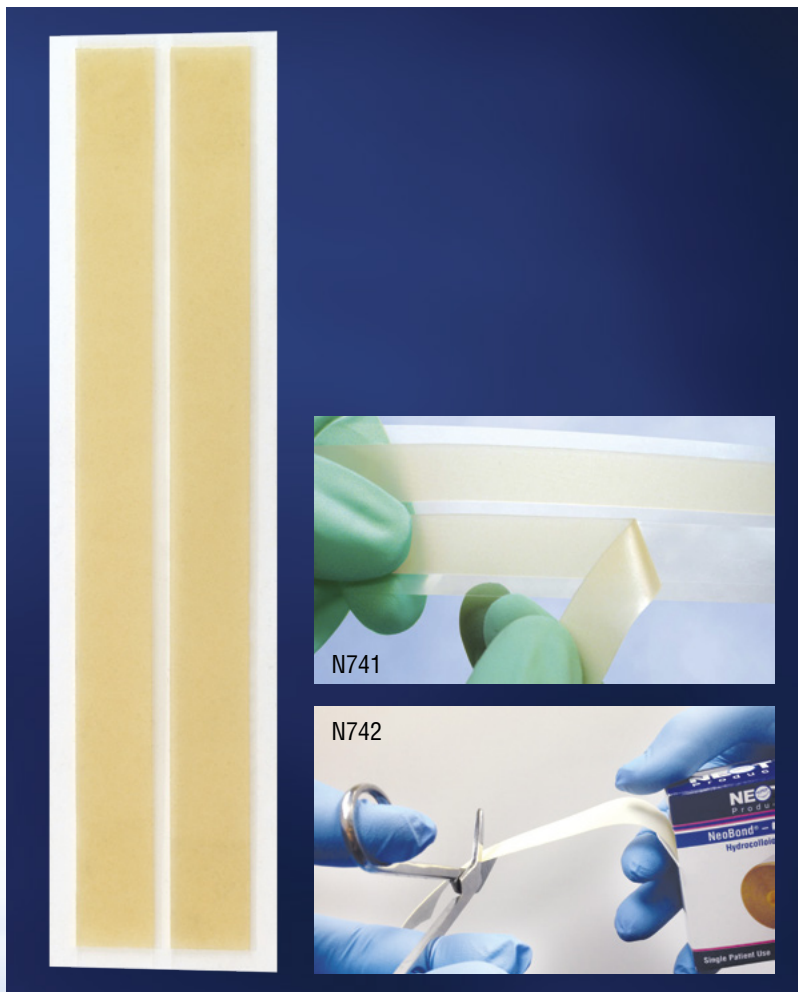

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Alternativa à fita acrílica confortável para a pele
- Desenvolvido para fixação de longo prazo
- Ideal para uso com placas de membros
- Não fabricado com látex de borracha natural ou plastificante DEHP

Número	Tamanho	Qtd/Unidade
N741	1/2" x 6" Tiras	100/caixa*
N742	1" x 15' Rolo	1/caixa

*50 conjuntos de 2

NeoBond®

ADESIVO HIDROCOLOIDE

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

As tiras adesivas hidrocolóides NeoBond servem para ser usadas como adesivo médico.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação

Limpe e seque a pele onde o NeoBond será colocado de acordo com o protocolo hospitalar.

Nota: É importante assegurar que a pele esteja o mais limpa e seca possível. O NeoBond não adere devidamente à pele ou cabelo húmidos. A presença de óleos e loções também afeta adversamente a aderência.

NÃO UTILIZE ÁLCOOL.

Aplicação

- 1 Antes de remover os revestimentos plásticos, as alças adesivas hidrocolóides devem ser aquecidas ativamente. As técnicas de aquecimento incluem: segurar entre as palmas das mãos por pelo menos 60 segundos, segurar perto de um aquecedor radiador por 10 a -15 segundos ou segurar contra um aquecedor químico pequeno por 10 a -15 segundos.
- 2 Descole da película. Enrole ou aplique o NeoBond na pele e no produto (ex. tubo de alimentação, tala de imobilização de membros) e mantenha-o nessa posição por 60 segundos para garantir uma adesão adequada. Descarte a película ao terminar.

Remoção

- 1 Substitua o NeoBond a cada 5 dias ou de acordo com o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro.
- 2 Saturar o NeoBond com água ou soro fisiológico.
- 3 Descole lentamente o NeoBond da pele com a ajuda de uma compressa embebida em água ou soro fisiológico.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Descontinue imediatamente a utilização em caso de irritação cutânea.

O NeoBond não adere devidamente à pele ou cabelo húmidos.

A presença de óleos e loções também afeta adversamente a aderência.

Não utilize álcool para limpar a pele, antes da aplicação.

Utilizar apenas num único paciente.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2023 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.

