


NeoGlo® TRANSILUMINADOR



Cores disponíveis

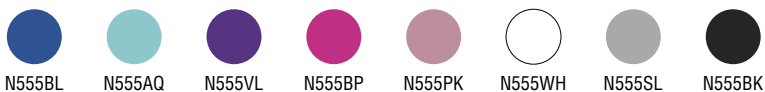

N555BL

N555AQ

N555VL

N555BP

N555PK

N555WH

N555SL

N555BK



CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Luzes LED frias ao toque para segurança do paciente
- Múltiplas configurações de luz de acordo com a preferência do utilizador
- Design ergonómico para conforto clínico
- Tamanho compacto para uso em incubadores
- Ilumina veias, artérias e outras estruturas internas
- Projetado para desligar antes que as luzes se tornem ineficazes
- Requer uma única pilha alcalina AA (incluída)
- Oito cores de onde escolher
- Argola de cordão
- Preço acessível
- Não fabricado com látex de borracha natural ou plastificante DEHP

NeoGlo Sleeve

- A capa protetora ajuda a manter o NeoGlo limpo e a proteger contra fluidos corporais
- Durável e descartável
- Aba autovedante
- Não fabricado com látex de borracha natural ou plastificante DEHP

Número	Item	Qtd/Unidade
N555BL	Azul	1/caixa
N555AQ	Água	1/caixa
N555VL	Toilet	1/caixa
N555BP	Rosa brilhante	1/caixa
N555PK	Rosa	1/caixa
N555WH	Branca	1/caixa
N555SL	Silver	1/caixa
N555BK	Preta	1/caixa
N55100	Sleeve Pacote 100	100/caixa*

*NeoGlo Sleeve: compra mínima de 10 caixas

Patente dos EUA #D506,547



INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O transiluminador NeoGlo é um dispositivo portátil a bateria, uma fonte luminosa destinada a transmitir luz através dos tecidos para auxiliar nos exames dos pacientes.


A NeoGlo Sleeve deverá ser utilizada como capa protetora temporária para ajudar a manter o transiluminador NeoGlo limpo.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1 Remova a tampa da bateria, insira uma pilha alcalina AA (incluída) e recoloque a tampa..

Nota: As configurações de luz farão um ciclo e retornarão à configuração “desligada”.

Precaução: Não olhe diretamente para as luzes. Inserir a pilha na direção errada pode produzir calor e danificar a unidade.

- 2 Selecione a configuração de luz desejada:
 - Pressione o botão  de alimentação uma vez para as luzes brancas da frente.
 - Pressione novamente para as luzes brancas viradas para cima.
 - Pressione novamente para as luzes vermelhas viradas para cima.
 - Pressione novamente para as luzes brancas e vermelhas viradas para cima.
 - Pressione novamente para desligar.
 - Repita o ciclo conforme necessário.

- 3 Com a configuração de luz preferida, fixe o NeoGlo na pele do paciente para iluminar.

Nota: Luzes de ambiente escuras para iluminação mais efetiva.

- 4 Limpe o NeoGlo com álcool após cada utilização. Para obter instruções sobre NeoGlo Sleeve, consulte o site ou a embalagem.

Garantia

30 dias de garantia de satisfação. Se não estiver satisfeito com o desempenho do NeoGlo seja porque motivo for, basta devolvê-lo no prazo de 30 dias após a compra. Devolva o NeoGlo na embalagem original juntamente com o comprovativo de compra e a Neotech reembolsará o valor total da compra, menos o montante do envio. O custo de envio só será reembolsado se o produto estiver com defeito.

Os clientes são responsáveis pelos custos da remessa de devolução. Não aceitamos devoluções seja porque motivo for após 30 dias. Se a sua unidade não estiver a funcionar corretamente após 30 dias, verifique a GARANTIA.

Os transiluminadores NeoGlo adquiridos através de um vendedor terceirizado estão sujeitos à sua política de devolução.

Garantia

Garantia de um ano para desempenho eletrônico baseado num uso e armazenamento normal (-40°C/-40°F a + 85°C/+ 185°F; humidade relativa entre 5% e 95%, sem condensação).

Exclusões; a garantia não cobre:

- a) Substituição das pilhas
- b) Danos ou falhas causados por pilhas com derrames, ferrugem, corrosão, água e outros danos líquidos, infestação, negligência, abuso ou uso indevido
- c) Não cumprimento dos procedimentos de operação e manutenção recomendados pelos fabricantes. O NeoGlo deve ser devolvido na embalagem original juntamente com o comprovativo de compra. A devolução sem a embalagem original pode anular a garantia.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Não incida a luz diretamente nos olhos.

Não submerja o NeoGlo em líquido.

Não autoclave o NeoGlo. Exposição ao vapor ou humidade excessiva pode causar falha elétrica.

Use apenas pilhas alcalinas AA. Não use pilhas recarregáveis. Inserir a pilha de forma incorreta pode produzir calor, danificar a unidade e anular a garantia.

Descarte o NeoGlo de acordo com os regulamentos eletrônicos locais.

Certified



Corporation

Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA, 91355 USA

©2024 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



Feito nos
Estados Unidos
M788 Rev A