
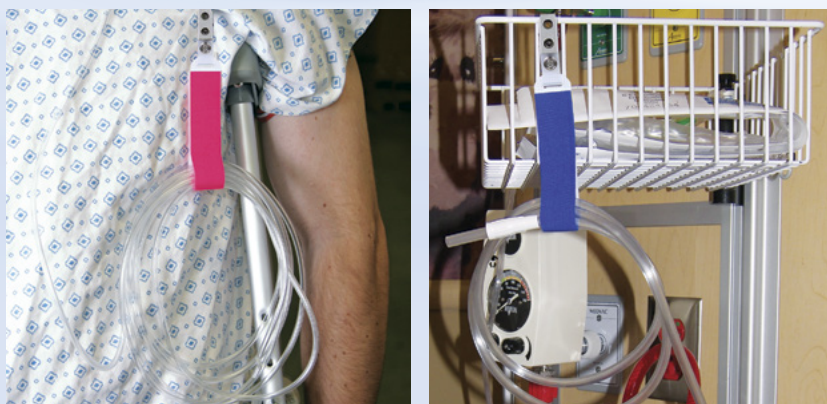


NeoGrip[®]

SLANG- OCH SLADDKLÄMMA

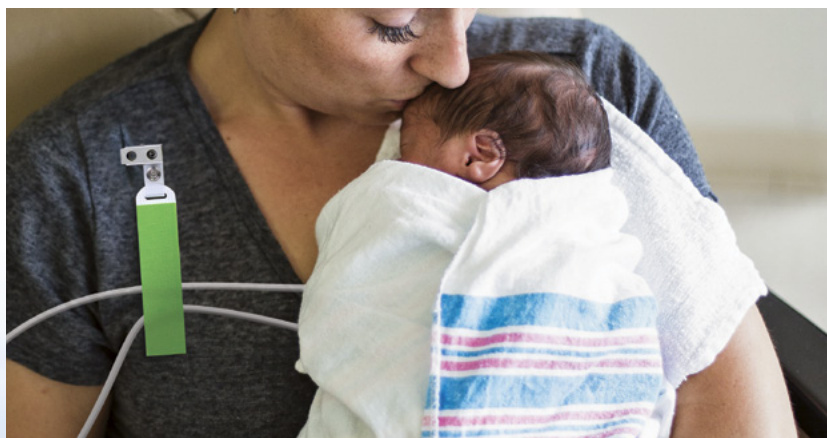

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- Hjälper till att hålla slangar, kablar och kretsar samlade
- Ger förbättrad patientrörlighet
- Fäster på lakan eller kläder utan att orsaka skador
- Användbar under känguruvård
- Kan öppnas och stängas upprepade gånger utan rester
- Kan användas i klinisk miljö eller i hemmet
- Utmärkt för ambulera patienter
- Innehåller ej naturgummi eller mjukgörare (DEHP)

Antal	Färg	Antal/Enhet
N601	Kricka (VersaGrip)	40/låda
N602	Rosa/Blå	40/låda
N602B	Blå	40/låda
N602P	Rosa	40/låda
N602R	Röd	40/låda
N602G	Grön	40/låda
N602Y	Gul	40/låda
N602O	Orange	40/låda
N602V	Violett	40/låda
N603	Vit	40/låda

Patent #D814,568



Klinikern uppfunnen



Tillverkad i USA

NeoGrip®

SLANG- OCH SLADDKLÄMMA

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

NeoGrip/VersaGrip används för att samla slangar, sladdar och kontaktdon.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

- 1 Separera krok och upphängningsklämma.
- 2 För in slangar, sladdar och kontaktdon.
- 3 Se till att hakdelen och fliken ligger jäms med varandra och tryck ihop delarna.
- 4 Dra försiktigt isär hakdelen och fliken för avlägsning och lyft försiktigt bort slangar, sladdar och kontaktdon.

Obs! Byt ut omedelbart om hakdelen eller fliken visar tecken på slitage.

VARNINGAR

Får inte användas om hakdelen eller tygfliken visar tecken på slitage.

Endast avsedd för användning till en patient.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2026 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech. M800 Rev A 2026.03.01



Tilverkad i USA