

NeoGrip[®]

SLANGE- OG KABELHOLDER



FUNKTIONER OG FORDELE

- Hjælper med at holde styr på slanger, kabler og kredsløb
- Giver bedre patientmobilitet
- Fastgøres til linned eller tøj uden at beskadige det
- Nyttig under kængurupleje (pleje hud mod hud)
- Kan åbnes og lukkes gentagne gange uden rester
- Kan bruges i kliniske omgivelser eller ved hjemmepleje
- God til ambulante patienter
- Ikke fremstillet med naturgummilatex eller blødgøringsmidlet DEHP

Antal	Farve	Antal/Enhed
N601	Blågrøn (VersaGrip)	40/boks
N602	Pink/blå	40/boks
N602B	Blå	40/boks
N602P	Pink	40/boks
N602R	Rød	40/boks
N602G	Grøn	40/boks
N602Y	Gul	40/boks
N602O	Orange	40/boks
N602V	Violet	40/boks
N603	Hvid	40/boks

Patent #D814,568



Kliniker opfundet



Fremstillet i USA

NeoGrip®

SLANGE- OG KABELHOLDER

INDIKATIONER FOR BRUG

NeoGrip/VersaGrip er beregnet til at holde styr på slanger, kabler og kredsløb.

BRUGSANVISNING

- 1 Separat burrebåndsmateriale.
- 2 Indsæt slanger, kabler og kredsløb.
- 3 Juster burrebåndet, og tryk på det for at sikre det.
- 4 For at fjerne dem skal du langsomt trække burrebåndsmaterialet fra hinanden og forsigtigt fjerne slanger, kabler og kredsløb.

Bemærk: Udskift burrebåndsmaterialet med det samme, hvis det er slidt.

FORHOLDSREGLER

Må ikke bruges, hvis burrebåndsmaterialet er slidt.
Kun til brug for en enkelt patient.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2026 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech. M802 Rev A 2026.03.01



Fremstillet i USA