

# NeoShades<sup>®</sup> varustettuna Kielekkeillä

## VALOHOIDON SILMIENSUOJAIMET



N724



N725



N726



### OMINAISUUDET JA EDUT

- Pehmeät, pehmustetut silmäsuojat, joissa söpö aurinkolasikuvio
- Okulaaritaskut suunniteltu potilaan mukavuutta ja turvallisuutta varten (N724, N725, N726)
- Ihoa ärsyttämättömät NeoBond<sup>®</sup>-hydrokolloidikiinnikkeet pitävät NeoShades-suojukset paikallaan
- Valmistuksessa ei käytetty luonnonkumia (lateksia) tai DEHP-ftalaattia (pehmenintä)
- Yksittäispakattu

Määrä	Tuote	Määrä/Yksikkö
N720	Mikro	50/Laatikko
N721	Pieni	50/Laatikko
N722	Suuri	50/Laatikko
Silmätaskuilla		
N724	Mikro	50/Laatikko
N725	Pieni	50/Laatikko
N726	Suuri	50/Laatikko

Yhdysvaltain patentti #8,070,288;  
Lisää patenteja vireillä



Valmistettu USA:ssa

# NeoShades® varustettuna Kielekkeillä

## VALOHOIDON SILMIENSUOJAIMET

### KÄYTTÖAIHEET

NeoShades-suojaimet on tarkoitettu suojaamaan silmiä valohoidon aikana. Ne on tarkoitettu käytettäväksi lapsipotilailla (vastasyntyneet, vauvat ja lapset).

### KÄYTTÖOHJEET

#### Valmistelu

##### 1 Valitse oikea koko.

Likimääräinen mitoitus:  
Mikro – 28 viikkoa ja alle  
Pieni – 29–36 viikkoa  
Suuri – 37 viikkoa ja yli

##### 2 Puhdista ja kuivaa iho sairaalan käytännön mukaisesti.

*Huomautus: On tärkeää, että iho on mahdollisimman puhdas ja kuiva. Hydrokolloidiset liimaliuskat eivät tartu kunnolla kosteaan ihoon tai hiuksiin/karvoitukseen. Öljyt ja voiteet heikentävät kiinnittymistä.*

**ÄLÄ KÄYTÄ ALKOHOLIA.**



#### Kiinnittäminen

##### 1 Poista hydrokolloidiset kielekkeet varovasti silmäsuojaimista.

Ennen muovikalvojen irrottamista hydrokolloidisia liimaliuskoja on lämmitettävä aktiivisesti. Mahdollisia lämmitystekniikoita: pidä liuskoja kämmenten välissä vähintään 60 sekuntia, säteilevän lämpölähteen lähistöllä 10–15 sekuntia tai kemiallista lämmittintä vasten 10–15 sekuntia.

##### 2 Irrota muovikalvot ja hävitä ne. Aseta hydrokolloidiset liimaliuskat ohimoille ja pidä paikoillaan 60 sekunnin ajan niin, että ne kiinnittyvät varmasti kunnolla.

##### 3 Suojaa silmät NeoShade-suojuksilla ja kiinnitä ne varovasti hydrokolloidisiin liimaliuskoihin.

*Huomautus: Jätä osa kielekkeestä näkyviin, jotta poistaminen on helpompaa.*




#### Poistaminen

##### 1 Vaihda ihoon kiinnitettyt hydrokolloidiset NeoShades-liimaliuskat uusiin viiden päivän välein tai sairaalan käytännön mukaisesti sen mukaan, kumpi tulee ensin.

##### 2 Pidä hydrokolloidisen liimaliuskan reunaan paikoillaan ja irrota NeoShades-suojus hitaasti liuskasta.

##### 3 Kasta hydrokolloidinen liimaliuska veteen tai suolaliukseen.

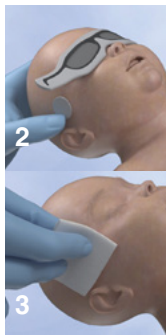

##### 4 Irrota hydrokolloidinen liimaliuska hitaasti ihosta pyyhkien samalla vedellä tai suolaliuksella.

Toista vastakkaisella puolella.

### VASTA-AIHEET, HUOMIOT JA VAROITUKSET

Kielekkeillä varustetut NeoShades-suojukset ovat vasta-aiheiset potilaille, joilla on epämuodostumia kasvoissaan, ihoinfektio tai hiertyneitä ihoalueita, joihin ei voi kiinnittää kielekkeitä kunnolla.

Niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi aikuisilla.

Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän laitteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

NeoShades-suojaimia saa käyttää vain, kun potilas on koulutettujen terveydenhuollon ammattilaisten jatkuvassa, suorassa valvonnassa.

Käytettäessä NeoShades-suojuksia ajoittain arvioi hydrokolloidisten kielekkeiden eheys aina silmäsuojusten poistamisen yhteydessä.

Jos hydrokolloidiset kielekkeet vetävät irti ihosta, poista ne käyttöohjeiden mukaisesti ja aseta uudet hydrokolloidiset kielekkeet ennen valohoidon jatkamista.

Hydrokolloidiset liimaliuskat eivät tartu kunnolla kosteaan ihoon tai hiuksiin/karvoitukseen. Öljyt ja voiteet heikentävät kiinnittymistä.

Älä käytä alkoholia ihon puhdistamiseen ennen kiinnitystä.

Lopeta käyttö välittömästi, jos ilmenee ihoärsytystä.

Vain yhden potilaan käyttöön.

Yleisiä kuljetus- ja säilytyskäytäntöjä sovelletaan.

Certified



Corporation



Valmistettu USA:ssa

Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

EC REP

EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT, Arnhem  
The Netherlands



PPE Regulation (EU) 2016/425  
Notified Body: BSI Group (2797),  
Say Building, John M. Keynesplein 9  
1066 EP Amsterdam, Netherlands