


NeoSeal[®]

NÄSTÄTNING

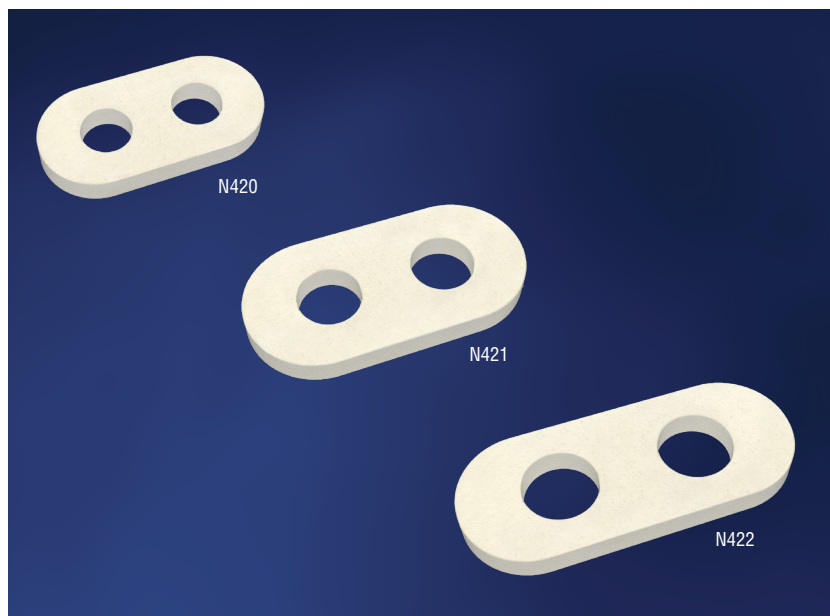

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- Utformad för att förbättra nästättningen för effektivare andningsstöd
- Skyddar huden vid näsans skiljevägg och näsborrarna
- Kompatibel med de flesta näsgrimmor
- Innehåller ej naturgummi eller mjukgörare (DEHP)

Antal	Storlek	Antal/Enhet
N420	Mikro	150/låda
N421	Små	150/låda
N422	Stor	150/låda

Patentsökt

NeoSeal®

NÄSTÄTNING

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

NeoSeal används för att tätas runt de nasala öppningarna och skydda huden på näsans skiljevägg och vid näsborrarna. Produkten är avsedd för barn (nyfödda, spädbarn och barn).

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

- 1 Dra av NeoSeal från plastskyddet.
- 2 Fäst näsgrimmman med vidhäftningsmedlet vänt mot kanylen.
Obs! Den mjuka lena sidan utan vidhäftningsmedel ska vara i kontakt med patientens hud.
- 3 För in grimmor enligt sjukhusets riktlinjer. Dokumentera placeringen av NeoSeal i patientjournalen.
Obs! För att minimera risken för inandning/sväljning, se till att näsgrimmorna och/eller NeoSeal inte kommer in i spädbarnets mun.
- 4 Byt NeoSeal varje dag eller enligt riktlinjerna på sjukhuset, vilket som infaller först.
Obs! Byt omedelbart vid tecken på nedsmutsning eller fukt.
- 5 Dokumentera avlägsning och/eller byte i patientjournalen.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

Denna produkt får, enligt amerikansk lag, endast säljas av eller på ordination av läkare.

Kvävningsrisk. NeoSeal får endast användas under kontinuerlig, direkt övervakning av utbildad vårdpersonal.

Risk för sväljning eller inandning. Se till att näsgrimmorna och/eller

NeoSeal inte kommer in i spädbarnets mun under användning.

Byt omedelbart vid tecken på nedsmutsning eller fukt.

Avlägsna genast om hudirritation uppstår.

Endast avsedd för användning till en patient.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2026 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech. M818 Rev A 2026.04.01



Tillverkad i USA