

NeoSeal[®]

NENÄLETKUJEN TIIVISTE



OMINAISUUDET JA EDUT

- Suunniteltu parantamaan nenänletkun tiivistettä tehokkaamman hengitystuen saavuttamiseksi
- Suojaa väliseinän ja sierainten ihoa
- Yhteensopiva useimpien nenäletkujen kanssa
- Valmistuksessa ei käytetty luonnonkumia (lateksia) tai DEHP-ftalaattia (pehmenintä)

Määrä	Koko	Määrä/Yksikkö
N420	Mikro	150/laatikko
N421	Pieni	150/laatikko
N422	Suuri	150/laatikko

Patentti vireillä



Valmistettu USA:ssa

NeoSeal®

NENÄLETKUJEN TIIVISTE

KÄYTTÖAIHEET

NeoSeal on tarkoitettu luomaan tiivistys sierainten ympärille sekä suojaamaan nenän väliseinän ja sierainten ihoa. Se on tarkoitettu käytettäväksi lapsipotilailla (vastasyntyneet, vauvat ja lapset).

KÄYTTÖOHJEET

- 1 Irrota NeoSeal-tiivisteen muovikalvo.
- 2 Pujota nenäletkuihin niin, että liimapuoli on kohti kanyyliä.
Huomautus: Pehmeään, sileään puolen, jossa ei ole liimaa, on oltava kosketuksissa potilaan ihoon.
- 3 Työnnä letkut sisään sairaalan käytännön mukaisesti. Kirjaa NeoSealin kiinnitys potilaan potilaskertomukseen.
Huomautus: Varmista aspiraatio- ja nielemisriskin minimoimiseksi, että nenäkanyylin letkut ja/tai NeoSeal eivät päädy vauvan suuhun.
- 4 Vaihda NeoSeal päivittäin tai sairaalan protokollan mukaisesti, sen mukaan, kumpi on aiemmin.
Huomautus: Vaihda välittömästi, jos likaantunut tai märkä.
- 5 Kirjaa poistaminen ja/tai vaihtaminen potilaan potilaskertomukseen.

HUOMIOT JA VAROITUKSET

Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän laitteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

Tukehtumisvaara. NeoSealia saa käyttää vain, kun potilas on koulutettujen terveydenhuollon ammattilaisten jatkuvassa, suorassa valvonnassa.

Aspiraatio- tai nielemisriski. Varmista laitetta käytettäessä, että nenäkanyylin letkut ja/tai NeoSeal eivät päädy vauvan suuhun.

Vaihda välittömästi, jos likaantunut tai märkä.

Lopeta käyttö välittömästi, jos ilmenee ihoärsytystä.

Vain yhden potilaan käyttöön.

