


NeoSeal[®]

SEGL TIL NÆSEKATETRE

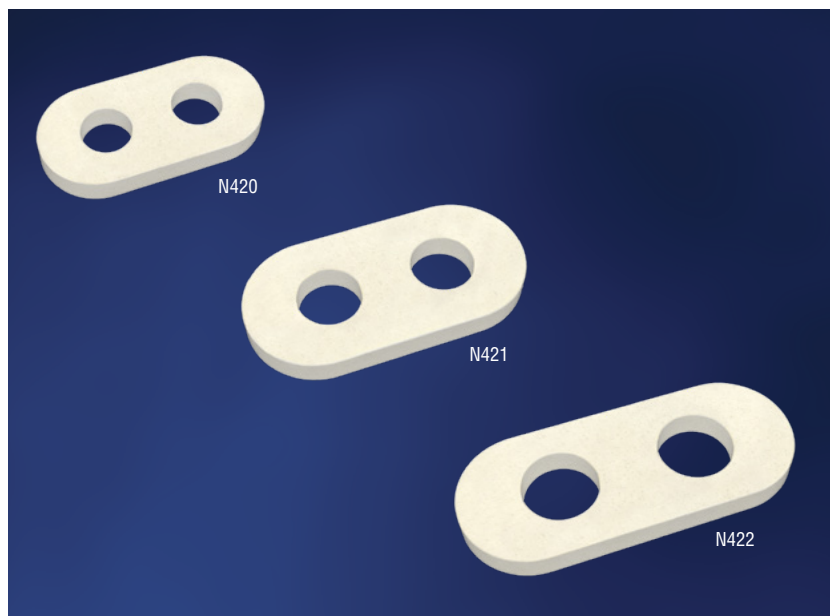

FUNKTIONER OG FORDELE

- Designet til at forbedre næseforseglingen for mere effektiv respirationsstøtte
- Beskytter huden ved næseskillevæggen og næsen
- Kompatibel med de fleste næsekatetre
- Ikke fremstillet med naturgummilatex eller blødgøringsmidlet DEHP

Antal	Størrelse	Antal/Enhed
N420	Mikro	150/boks
N421	Lille	150/boks
N422	Stor	150/boks

Patentanmeldt



Fremstillet i USA

NeoSeal®

SEGL TIL NÆSEKATETRE

INDIKATIONER FOR BRUG

NeoSeal er beregnet til at skabe en tætning omkring næsen og beskytte huden på næseskillevæggen og næsen. Den er beregnet til brug på pædiatriske (nyfødte, spædbørn og børn) patienter.

BRUGSANVISNING

- 1 Træk NeoSeal fra plastforingen.
- 2 Skub over næsekatetret med den klæbende side mod sonden.

Bemærk: Den bløde, glatte side uden klæbemiddel bør være i kontakt med patientens hud.

- 3 Indsæt kateter i henhold til hospitalsprotokol. Dokumentér placeringen af NeoSeal i patientjournalen.

Bemærk: For at minimere risikoen for aspiration/indtagelse skal du sikre, at næsekanylens kateter og/eller NeoSeal ikke kommer ind i spædbarnets mund.

- 4 Udskift NeoSeal dagligt eller i henhold til hospitalsprotokol, alt efter hvad der kommer først.

Bemærk: Udskift straks, hvis det bliver snavset eller vådt.

- 5 Dokumentér fjernelsen og/eller udskiftningen i patientjournalen.

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER

Føderal lovgivning begrænser denne enhed til salg af eller efter ordre fra en læge.

Kvælningsfare. NeoSeal må kun bruges, mens patienten er under konstant, direkte opsyn af uddannet sundhedspersonale.

Risiko for indtagelse eller aspiration Når det er i brug, skal du sikre, at næsekanylens kateter og/eller NeoSeal ikke kommer ind i spædbarnets mund.

Udskift straks, hvis det bliver snavset eller vådt.

Afbryd straks brugen, hvis der opstår hudirritation.

Kun til brug for en enkelt patient.

