

EZCare™ Softouch

TRAKEALTUBHÅLLARE



FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- NeoFoam® Ultra är extra tjockt för bättre stabilitet
- Mjukt, ventilerande, hudvänligt NeoFoam som transporterar bort svett
- Utformad för god komfort
- Lätt och formbar
- N925 och N926 kan klippas till i storlek
- Unikt material förhindrar glidning
- Innehåller ej naturgummi eller mjukgörare (DEHP)
- Singelpackning

Antal	Storlek	HCPCS	Antal/
N9106	6" (152mm) Enstaka stycke	A7526	20/låda
N9107	7" (178mm) Enstaka stycke	A7526	20/låda
N9108	8" (203mm) Enstaka stycke	A7526	20/låda
N9109	9" (229mm) Enstaka stycke	A7526	20/låda
N9110	10" (254mm) Enstaka stycke	A7526	20/låda
N9111	11" (279mm) Enstaka stycke	A7526	20/låda
N925*	11" (279mm) 2-delad (endast brun)	A7526	20/låda
N926**	18" (457mm) 2-delad (endast brun)	A7526	20/låda
N926BK-10**	18" (457mm) 2-delad (endast brun)(endast svart)		10/låda

Solbränna=TN, Rosa=PK, Blå=BL

*1/2" (13mm) lång

**1" (25mm) lång



EZCare™ Softouch

TRAKEALTUBHÅLLARE

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

EZCare Softouch används för att fästa trakealtuben på patienten. Den är avsedd för barn (nyfödda, spädbarn och barn).

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Mätning

Välj rätt storlek med hjälp av det medföljande EZCare Softouch-måttbandet.

Placera startlinjen vid vänsterflärpen och linda bakom nacken fram till högerflärpen. Om man hamnar mellan 2 storlekar, börja med att använda en större storlek.

Singelpackad (N9105-N9111)

- 1 Fäst hakdelen med den släta vita sidan vänd mot nacken i flärpen på ena sidan av plattan.
- 2 För att fästa ordentligt, dra hakdelen bakåt över flärpen och tryck fast det vita kardborretyget mot nackbandet.
- 3 Linda EZCare runt nacken och fäst hakdelen i flärpen på plattans motsatta sida.
- 4 För att fästa ordentligt, dra hakdelen bakåt över flärpen och tryck fast det vita kardborretyget mot nackbandet.
Obs! Se till att EZCare sitter åt ordentligt, men inte överdrivet hårt. Justera efter behov.
- 5 Byt EZCare Softouch var femte dag eller enligt riktlinjerna på sjukhuset, vilket som infaller förs. Byt ut omedelbart om hakdelen visar tecken på slitage eller smuts.

2 delar (N925-N926)

- 1 Separera delarna.
- 2 Fäst hakdelen med den släta vita sidan vänd mot nacken i flärpen på ena sidan av plattan.
- 3 För att fästa ordentligt, dra hakdelen bakåt över flärpen och tryck fast det vita kardborretyget mot nackbandet.
- 4 Linda båda sidorna av EZCare runt nacken och fäst ihop.
- 5 Bestäm rätt längd, lyft den längsta biten bort från nacken och klipp till önskad längd.
Obs! Se till att huden inte skaver mot kardborretygets låsflärp.

- 6 För att fästa ordentligt, för ihop båda sidorna bakom nacken och tryck fast det vita kardborretyget mot nackbandet.

Obs! Se till att EZCare sitter åt ordentligt, men inte överdrivet hårt. Justera efter behov.

- 7 Byt EZCare Softouch var femte dag eller enligt riktlinjerna på sjukhuset, vilket som infaller förs.

Byt ut omedelbart om hakdelen visar tecken på slitage eller smuts.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

Denna produkt får, enligt amerikansk lag, endast säljas av eller på ordination av läkare.

Byt ut omedelbart om hakdelen visar tecken på slitage eller smuts.

Slitage på hakdelen kan orsaka dekannulering.

Kontrollera regelbundet för att förhindra frikoppling.

Avlägsna genast om hudirritation uppstår.

Endast avsedd för användning till en patient.

Certified



Corporation

Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355



Tillverkad i USA