

EZCare™ Softouch

TRAKEOSTOMI-RØRHOLDER



FUNKTIONER OG FORDELE

- Tyk NeoFoam® Ultra for bedre stabilitet
- Blød, åndbar og hudvenlig NeoFoam transporterer sved væk
- Designet til komfort
- Let og tætsiddende
- N925 og N926 kan klippes til i størrelse
- Unikt materiale hjælper med at forhindre, at enheden glider ud af plads
- Ikke fremstillet med naturgummilatex eller blødgøringsmidlet DEHP
- Individuelt emballeret

Antal	Størrelse	HCPCS	Antal/	
N9106	6" (152mm)	Enkelt stykke	A7526	20/boks
N9107	7" (178mm)	Enkelt stykke	A7526	20/boks
N9108	8" (203mm)	Enkelt stykke	A7526	20/boks
N9109	9" (229mm)	Enkelt stykke	A7526	20/boks
N9110	10" (254mm)	Enkelt stykke	A7526	20/boks
N9111	11" (279mm)	Enkelt stykke	A7526	20/boks
N925*	11" (279mm)	2-delt(kun solbrun)	A7526	20/boks
N926**	18" (457mm)	2-delt(kun solbrun)	A7526	20/boks
N926BK-10**	18" (457mm)	2-delt(kun sort)	10/pakke	

solbrun=TN, Lyserød=PK, Blå=BL

*1/2" (13mm) høj

**1" (25mm) høj



Vanhempi keksi



Fremstillet i USA

EZCare™ Softouch

TRAKEOSTOMI-RØRHOLDER

INDIKATIONER FOR BRUG

EZCare Softouch er beregnet til at sikre en patients trakeostomirør. Den er beregnet til brug på pædiatriske patienter (nyfødte, spædbørn og børn).

BRUGSANVISNING

Opmåling

Vælg den passende størrelse ved hjælp af det medfølgende EZCare Softouch-målebånd.

Placer startlinjen ved flange på venstre side, og vikl bag nakken til højre flange. Hvis målene falder mellem størrelserne, så prøv den større størrelse først.

Enkelt stykke (N9105-N9111)

- 1 Med den glatte, hvide side mod halsen indsættes krogappen gennem flangen på den ene side af pladen.
- 2 Træk tappen tilbage over flangen, og tryk det hvide krogstof fast til halsbåndsstoffet for at sikre korrekt fastgørelse.
- 3 Vikl EZCare rundt om halsen, og indsæt krogappen gennem flangen på den anden side af pladen.
- 4 Træk tappen tilbage over flangen, og tryk det hvide krogstof fast til halsbåndsstoffet for at sikre korrekt fastgørelse.
Bemærk: Sørg for, at EZCare sidder stramt uden at være strakt for meget. Juster efter behov.
- 5 Udskift EZCare hver 5. dag eller i henhold til hospitalets protokol, alt efter hvad der kommer først.
Udskift straks, hvis krogappen er slidt eller synligt snavset.

2-styk (N925-N926)

- 1 Adskil de to stykker.
- 2 Med den glatte, hvide side mod halsen indsættes krogapper gennem flanger på hver side af pladen.
- 3 Træk tappen tilbage over flangen, og tryk det hvide krogstof fast til halsbåndsstoffet for at sikre korrekt fastgørelse.
- 4 Vikl begge sider af EZCare rundt om halsen og sæt dem sammen.

- 5 Fastslå korrekt længde, træk længere stykke væk fra halsen og klip overskydende af.

Bemærk: Sørg for, at huden ikke udsættes for krogstoffets fastgørelsestap.

- 6 Bring begge sider sammen igen, og tryk det hvide krogstofs fastgørelsestap fast til halsbåndsstoffet for at sikre korrekt fastgørelse.

Bemærk: Sørg for, at EZCare sidder stramt uden at være strakt for meget. Juster efter behov.

- 7 Udskift EZCare hver 5. dag eller i henhold til hospitalets protokol, alt efter hvad der kommer først.
Udskift straks, hvis krogappen er slidt eller synligt snavset.

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER

Føderal lovgivning begrænser denne enhed til salg af eller efter ordre fra en læge.

Udskift straks, hvis krogappen er slidt eller synligt snavset. Slidt tap kan forårsage dekanyleing.

Kontrollér regelmæssigt for at forhindre frigørelse.

Afbryd straks brugen, hvis der opstår hudirritation.

Kun til brug for en enkelt patient.

