

# Neotech Ninni™

## CHUPETE SIMILAR AL PECHO



### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Su forma flexible similar al pecho favorece los patrones de succión y agarre de la lactancia
- Fomenta la succión natural y el movimiento de la lengua durante la succión
- Diseño translúcido para mayor visibilidad
- Textura ultrasuave similar a la piel, diseñada para facilitar el agarre
- Ideal para recién nacidos de 0 a 6 meses
- Fácil de limpiar y apto para el lavavajillas
- Se puede esterilizar en una bolsa de esterilización al vapor
- 100 % silicona de grado médico
- Sin BPA, PVC ni ftalatos
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Envasado de manera individual

El Neotech Ninni es recomendado por consultores de lactancia, dentistas y logopedas.

Número	Tamaño	Cantidad por unidad
N8701-25	Estándar	25/caja



# Neotech Ninni™

## CHUPETE SIMILAR AL PECHO

### USO PREVISTO

El Neotech Ninni está previsto para calmar y favorecer la succión no nutritiva para los recién nacidos de 0 a 6 meses.

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Preparación

- 1 Extraiga el Neotech Ninni de su envase.
- 2 Lávelo bien con agua tibia y jabón suave.

*Nota: No use cepillos ni otros utensilios abrasivos, ya que podrían dañar el material.*

- 3 Esterilícelo utilizando una bolsa de esterilización al vapor aprobada.

*Nota: Siga las instrucciones del fabricante de la bolsa.*

*Repita los pasos 2 y 3 después de cada uso.*

*Guárdelo en un recipiente limpio y seco. No lo exponga a la luz solar directa durante periodos prolongados.*

#### Inspección

- 1 Inspeccione visual y manualmente el Ninni antes de cada uso.
- 2 Tire de la parte abultada de la tetina en todas las direcciones.
- 3 Deséchelo si observa alguno de los siguientes signos: grietas, desgarros, pegajosidad, decoloración, adelgazamiento del material o cambios en la textura.

#### Uso por parte del paciente

- 1 Coloque el Ninni en la boca del lactante y asegúrese de que los labios rodeen la base.
- 2 Coloque el dedo en la tetina para ayudar a guiar la lengua.

*Nota: si el lactante no acepta el Ninni inmediatamente, vuelva a introducir el dedo y presione suavemente hacia arriba contra el paladar para estimular una respuesta de succión similar al agarre.*

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Use siempre el Ninni bajo la supervisión de un adulto.

No ate el Ninni alrededor del cuello del bebé, ya que existe riesgo de estrangulamiento. Use únicamente sujetadores de chupetes específicos que hayan sido probados según la norma EN 12586.

No está previsto para masticar; no lo utilice para bebés en fase de dentición.

Revise el Ninni antes de cada uso. Deséchelo de inmediato si presenta daños (grietas, desgarros, pegajosidad, decoloración, adelgazamiento del material o cambios en la textura).

Un solo paciente, varios usos.



Para información o muestras GRATIS  
**1-800-966-0500 • neotechproducts.com**  
Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355

