


# Neotech ChinStrap™

## RESPIRATORISK STØTTETILBEHØR

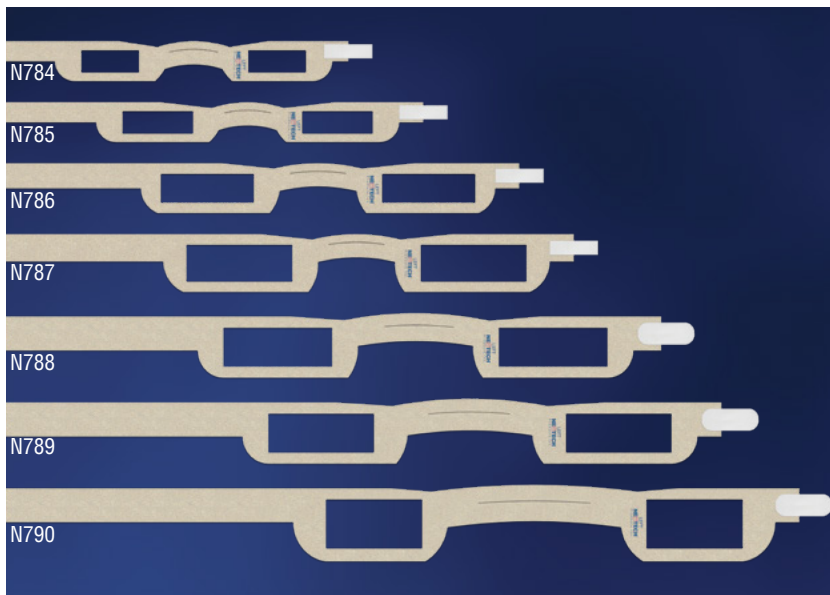

### FUNKTIONER OG FORDELE

- Blød, åndbar og hudvenlig NeoFoam® transporterer sved væk
- Flexibilitet muliggør minimal mundbevægelse
- Formtilpasset og justerbar
- Design med delt hage for komfort og stabilitet
- Øreåbninger for at forhindre folder
- Designet til at reducere risikoen for tryksår eller nekrose
- Unikt materiale hjælper med at forhindre, at enheden glider ud af plads
- Ikke fremstillet med naturgummilatex eller blødgøringsmidlet DEHP
- Individuelt emballeret

Antal	Størrelse	Antal/Enhed
N784	Nano	20/boks
N785	Mikro	20/boks
N786	Lille	20/boks
N787	Stor	20/boks
N788	X-Large	20/boks
N789	Makro	20/boks
N790	Jumbo	20/boks

Amerikansk patent #10,342,693



Fremstillet i USA

# Neotech ChinStrap™

## RESPIRATORISK STØTTETILBEHØR

### INDIKATIONER FOR BRUG

Neotech ChinStrap er beregnet som hjælp til at holde en patients mund lukket under respirationsterapi. Den er beregnet til brug på pædiatriske patienter (nyfødte, spædbørn, børn og unge) samt voksne patienter.

### BRUGSANVISNING

- 1 Vælg den rigtige størrelse ved at måle fra midten af hagen, langs øret, hen over hovedets krone, langs det andet øre og tilbage til midten af hagen.

N784 Nano: passer til hovedomkreds 22-27 cm

N785 Micro: passer til hovedomkreds 28-35 cm

N786 Small: passer til hovedomkreds 33-42 cm

N787 Large: passer til hovedomkreds 36-46 cm

N788 X-Large: passer til hovedomkreds 38-53 cm

N789 Makro: passer til hovedomkreds 39-58 cm

N790 Jumbo: passer til hovedomkreds 40-66 cm

- 2 Placer Neotech Chin Strap på hagen med den tyndere del på tværs af forsiden af hagen og den bredere del under hagen.

*Bemærk: Kun den hvide side af remmen skal placeres mod huden.*

- 3 Træk forsigtigt remmen mod den bagerste del af kronen med ørerne placeret inde i øreåbningerne, og fastgør derefter krogen til remmen. Sidemærket "LEFT" skal være under patientens venstre øre.

*Bemærk: Kan klippes til for korrekt pasform. Sørg for, at remmen ikke er for stram eller presser på ørerne. Krogen skal helt overlape stroppen.*

- 4 Udskift hver 5. dag eller pr. hospitalsprotokol, alt efter hvad der kommer først.

Udskift straks, hvis den er slidt eller synligt snavset.

### FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER

Føderal lovgivning begrænser denne enhed til salg af eller efter ordre fra en læge.

Neotech ChinStrap må kun bruges, mens patienten er under konstant direkte opsyn af sundhedspersonale. Chin Strap kan udgøre en potentiel kvælningfare.

Afbryd straks brugen, hvis der opstår hudirritation.

Kun til brug for en enkelt patient.

