


NeoBar[®]

ENDOTRAKEALSLANGHÅLLARE

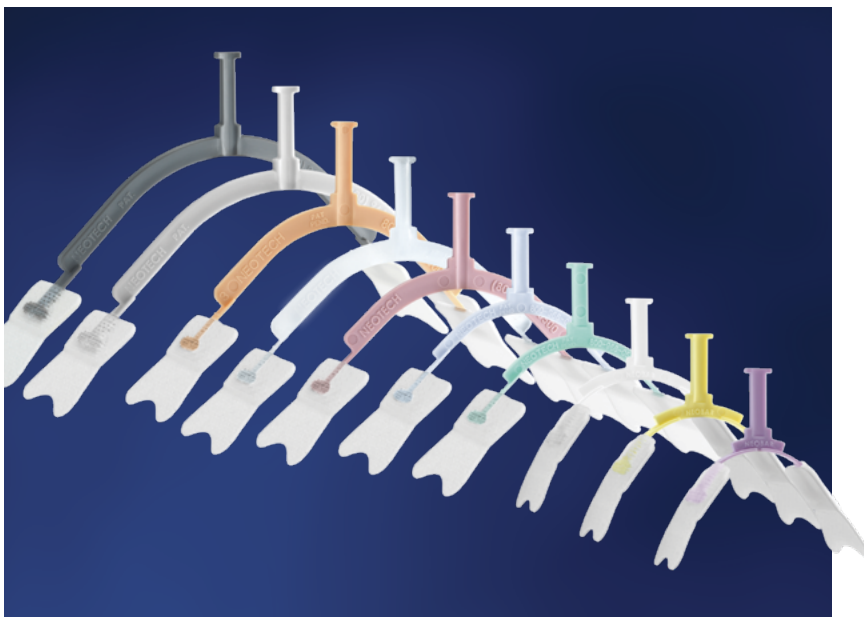

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- Hudvänliga NeoBond[®] hydrokolloidflärpar
- Makro- och Jumbo-storlekar tillgängliga med akryllim av medicinsk kvalitet
- Utformad för att minska extubering, bidra till att förhindra gomtrauma och säkerställa bättre munhygien
- Elimineras behovet av tejp nära näsa och mun
- Färgkodade storlekar
- Innehåller ej naturgummi eller mjukgörare (DEHP)
- Singelpackning

| Antal | Storlek | Färg | Antal/Enhet |
|---|---------|---------|-------------|
| N709 | Mini | Purpur | 5/låda |
| N710 | Ultra | Gul | 5/låda |
| N711 | Micro | Vit | 5/låda |
| N712 | Små | Grön | 5/låda |
| N713 | Stor | Blå | 5/låda |
| N714 | XL | Ros | 5/låda |
| N715H | Makro | Rensa | 5/låda |
| N716H | Jumbo | Grå | 5/låda |
| Med medicinskt akryllim | | | |
| N715F | Makro | Persika | 5/låda |
| N716F | Jumbo | Kol | 5/låda |
| Blandad | | | |
| N718 Transport (1 varje N709, N710, N711, N712, N713, N714) | | | |



INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

NeoBar används för fixering av endotrakealslangar. Den är avsedd för barn (nyfödda, spädbarn och barn).

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Förberedelser

- 1 NeoBar fästes efter intubering. För att välja korrekt storlek, mät med hjälp av det medföljande måttbandet. Placera från mittlinjen på näsans skiljevägg till örat. Färgen på den delen av det färgkodade måttbandet som räcker anda fram till öronen anger korrekt NeoBar-storlek.

Obs! Om du tvekar mellan två storlekar, försök först med den mindre storleken.

- 2 För att få korrekt storlek, placera NeoBar-bygeln över munnens mittpunkt mellan över- och underläppen. NeoBar får inte komma i kontakt med läpparna. Hydrokolloidflikarna måste vara precis framför örat.

- 3 Rengör och torka huden på kinderna enligt sjukhusets rutiner.

Obs! Det är viktigt att huden är så ren och torr som möjligt. Hydrokolloida, självhäftande flikar fäster inte ordentligt på fuktig hud eller hår. Även oljor och krämer motverkar vidhäftningen.

ANVÄND INTE SPRIT.

Applicering

- 1 Innan du tar bort plastskydden måste de hydrokolloida, självhäftande flikarna aktivt värmas upp. Uppvärmningstekniken är enligt följande: håll mellan handflatorna i minst 60 sekunder, håll i närheten av en strålningsvärmare i 10-15 sekunder eller håll mot en kemisk halvvärmare i 10-15 sekunder.

- 2 Dra av och kasta plastskydden. Applicera de hydrokolloida, självhäftande flikarna framför öronen, och håll på plats i minst 60 sekunder så att de fäster ordentligt.

Obs! Se till att endotrakealslangen är nedanför plattan för att minska trycket på gommen eller tandköttet.

- 3 Fäst först med 12,5 mm tyg- eller förbandstejp runt NeoBar-bygeln, och linda sedan tejp runt både bygeln och ET-slangen.

Avlägsning

- 1 Byt NeoBar var femte dag eller enligt riktlinjerna på sjukhuset, vilket som infaller först.
- 2 Avlägsna tejp för att skilja endotrakealtuben från NeoBar-fästplattan.

- 3 Blöt plattan med vatten eller saltlösning.
- 4 Dra långsamt bort de hydrokolloida, självhäftande flikarna från huden samtidigt som du svabbar med vatten eller en saltlösning.

KONTRAINDIKATIONER, VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

NeoBar är kontraindicerat för patienter med infekterade eller irriterade hudområden som skulle kunna förhindra korrekt placering av plattorna.

Den är inte avsedd för användning på vuxna.

Denna produkt får, enligt amerikansk lag, endast säljas av eller på ordination av läkare.

NeoBar ska endast användas under kontinuerlig, direkt övervakning av utbildad vårdpersonal.

Avlägsna genast om hudirritation uppstår.

NeoBar bör inte komma i kontakt med läpparna.

Hydrokolloida, självhäftande flikar fäster inte ordentligt på fuktig hud eller hår. Även oljor och krämer motverkar vidhäftningen.

Använd inte sprit till att rengöra huden innan förbandet appliceras.

Endast avsedd för användning till en patient.