

NeoHug[®]

APUVÄLINEPIDIKE



OMINAISUUDET JA EDUT

- Leikkisiä simpanssi- tai hymyilevä naamakuvio, saatavilla viisi kirkasta väriä
- Taivutettavat "kädet" pitämään erilaisia kevyitä esineitä
- Sopii tutin, imukärjen, teipin ja muiden pienten esineiden kiinnittämiseen
- Kolme kiinnitysvaihtoehtoa
- C-kiinnitin:
 - Kiinnittyy 3/4" (19mm) osioon infuusiolineesta
 - Painuu kiinni ja irtoaa helposti
 - Ulkopuolelta uritettu muoto vähentämään liukumista
 - Paikkaa voi vaihtaa toistuvasti ilman liimajäämiä
- Imukuppi:
 - Kiinnittyy useimpiin sileisiin pintoihin
 - Suuri imukuppi vahvaa kiinnitystä ja helppoa poistamista varten
 - Pysyy kiinni kuumalla ja kostealla
 - Paikkaa voi vaihtaa toistuvasti ilman liimajäämiä
- Valmistuksessa ei käytetty luonnonkumia (lateksia) tai DEHP-ftalaattia (pehmenintä)
- Yksittäispakattu

Määrä	Tuote	Määrä/Yksikkö
N680A-C	Erlaisia simpanssin C-klipsi	25/laatikko
N680A-S	Sekalaiset simpanssin imut	25/laatikko
N681A-C	Erlaisia hymyileviä C-klipsejä	25/laatikko
N681A-S	Erlaisia hymymureita	25/laatikko

Sekoitettu = 5 kutakin väriä

Yhdysvaltain patentti #9,174,026; #D941,782



Kliinikon keksimä

NeoHug®

APUVÄLINEPIDIKE

KÄYTTÖAIHEET

NeoHug on tarkoitettu muiden välineiden kuin toiminnassa olevien lääkinällisten laitteiden tukemiseen, järjestämiseen ja pitelemiseen.

KÄYTTÖOHJEET

1 Ota NeoHug pois pakkauksesta ja hävitä pussi.

2a (C-kiinnitin) Aseta NeoHug infuusiotelineeseen painamalla C-kiinnittimen keskiosaa, kunnes se naksauttaa paikalleen.

2b (Imukuppi) Kiinnitä NeoHug painamalla imukupin keskiosaa lujasti sileää, tasaista pintaa vasten.

Huomautus: Jos teet asennusta erittäin kosteissa olosuhteissa (esim. keskoskaapin sisään), pyyhi ylimääräinen kosteus pinnalta ennen asennusta.

3 Taivuta ja mukauta käsivarsia tarvittavalla tavalla haluttujen esineiden pitelemistä varten.


4 Puhdista tarvittaessa sairaalan protokollan mukaisesti. Käytä jokaisen potilaan kohdalla uutta NeoHugia.

Poistaminen

1a (C-kiinnitin) Pidä C-kiinnittimestä lujasti kiinni ja vedä se pois. Älä vedä NeoHugia.

1b (Imukuppi) Nosta imukupin kielekettä irrottaaksesi imukupin pinnasta.

Huomio: Vaihda välittömästi, väline on vaurioitunut TAI jos C-kiinnitin tai imukuppi ei pidä enää tehokkaasti.

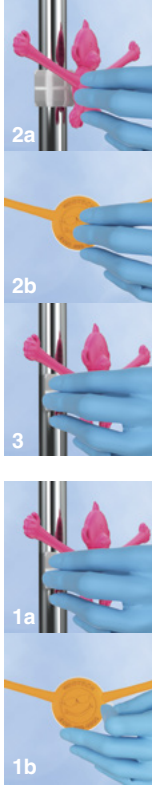

HUOMIOT

Imukuppi on pidettävä puhtas, eikä siinä saa olla likaa tai nesteitä.

Vaihda välittömästi, jos väline on vaurioitunut.

Vaihda, jos C-kiinnitin tai imukuppi ei pidä enää tehokkaasti.

Älä pakota C-kiinnitintä telineeseen, jonka halkaisija on yli 3/4 tuumaa.

Vain yhden potilaan käyttöön.