

NeoSmile[™]

TEMPERATURSONDSSKYDD



FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- Hudvänlig NeoBond[®] hydrokolloidförband
- Utformad för långvarig vidhäftning
- Reflexfolie skyddar mot omgivande och strålade värme
- Söt smiley-design
- Innehåller ej naturgummi eller mjukgörare (DEHP)

Antal	Storlek	Antal/Enhet
N731	1" (25 mm) Diameter	150/låda



INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

Neosmile används för att skydda och säkra temperatursonden.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Förberedelser

Rengör och torka huden där NeoSmile ska placeras enligt gällande riktlinjer på sjukhuset.

Obs! Det är viktigt att huden är så ren och torr som möjligt. Neosmile fäster inte ordentligt på fuktig hud eller hår. Även oljor och krämer motverkar vidhäftningen.

ANVÄND INTE SPRIT.

Applicering

- 1 Innan du tar bort plastskyddet måste hydrokolloidlimmet aktivt värmas upp. Uppvärmningstekniken är enligt följande: håll mellan handflatorna i minst 60 sekunder, håll i närheten av en strålningsvärmare i 10-15 sekunder eller håll mot en kemisk hälvärmare i 10-15 sekunder.
- 2 Avlägsna och kasta skyddspappret. Applicera NeoSmile på huden och håll på plats i 60 sekunder så att det fäster ordentligt.

Avlägsning

- 1 Byt NeoSmile var 5:e dag eller enligt riktlinjerna på sjukhuset, vilket som infaller först.
- 2 Blöt NeoSmile med vatten eller saltlösning.
- 3 Skrapa försiktigt bort NeoSmile från huden allteftersom huden blöts med vatten eller koksaltlösning.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

Avlägsna genast om hudirritation uppstår.

Neosmile fäster inte ordentligt på fuktig hud eller hår. Även oljor och krämer motverkar vidhäftningen.

Använd inte sprit till att rengöra huden innan förbandet appliceras.

Återanvänds ej.

Endast avsedd för användning till en patient.